

Spitze und scharfe Gegenstände oder kontaminierte Gebrauchsartikel können bei unsachgemäßer Handhabung Gefahr für Leib und Leben darstellen. Bitte beachten Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise.

1. Montage (Deckelmontage)

Vor dem Befüllen den Deckel (1) fest auf das Boxenunterteil (2) drücken, der Deckel (1) rastet ringsum hörbar ein.

2. Täglicher Gebrauch

Für den täglichen Gebrauch den Tagesdeckel (3) leicht in die Füllöffnung (4) eindrücken, dann ist ein Öffnen wieder möglich.

3. Endverschluss des Tagesdeckels (3)

Nach Befüllung der Box (Vorsicht: Nicht über die Füll-Linie (5) auffüllen) wie folgt verfahren:

Die Box auf einen festen Untergrund stellen und den Tagesdeckel (3) fest in die Füllöffnung (4) drücken, bis dieser ringsum hörbar einrastet.

4. Füll-Linie, maximale Füllhöhe (5)

Im oberen Teil der Boxen ist eine Füll-Linie (5) sichtbar. Die Box nicht über diese Füll-Linie (5) hinaus befüllen.

Die maximale Füllhöhe (5) darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.

5. Haltevorrichtung-Klebeadapter (7)

Bei Verwendung eines Klebeadapter (7) wie folgt vorgehen:

Box umdrehen. Im Boden der Box befindet sich eine Adapteraussparung. Klebeadapter (7) in die Aussparung einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen. Stellen Sie fest, an welcher Stelle Sie die Box positionieren wollen und in welche Richtung die Abzieh-/ Abdrehr-Vorrichtungen (siehe 6. Abzieh-/ Abdrehr-Vorrichtungen) zeigen sollen. Die Stelle, an der der Klebeadapter (7) angebracht werden soll, muss staub- und fettfrei gereinigt sein. Das Schutzpapier vom Klebeadapter abziehen und die Box, zusammen mit dem Klebeadapter (7), auf die vorgesehene Fläche aufsetzen und von oben fest auf die Box drücken. Der Klebeadapter (7) ist nun durch Festkleben positioniert. Zur Sicherheit die Box vom Klebeadapter (7) abdrehen und nochmals fest mit der Handfläche auf den Adapterrand drücken. Der Klebeadapter (7) sitzt nun fest und sicher. Es kann jetzt beliebig oft eine leere Box auf den Klebeadapter aufgedreht werden und die Box kann nun nicht mehr umgeworfen werden. Nach der Befüllung und dem Verschluss (siehe Endverschluss des Tagesdeckels) die Box durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn abdrehen.

Erklärung:

Zum Aufsetzen der Box im Uhrzeigersinn drehen und zum Wegnehmen der Box gegen den Uhrzeigersinn drehen.

6. Abdreh-/Abziehvorrückung

6.1 Aussparung mit Stufen (A)


Kanülenansatz bei Blutentnahmesystemen in gezackte Aussparung (A) einlegen, bis die Flanken des Blutentnahmesystems greifen. Kanüle gegen Uhrzeigerrichtung drehen, bis Kanüle abgedreht ist. Kanüle fällt dann in das Boxenunterteil (2).

6.2 Halbbrunde Aussparung (B)


Diese Kerbe (B) dient dem Abziehen von normalen Kanülen vom Spritzenkörper. Sollte das verwendete Blutentnahmesystem in diese Aussparung (B) passen Kanüle gegen Uhrzeigerrichtung drehen, bis Kanüle abgedreht ist und in das Boxenunterteil fällt.

6.3 Sternenförmige, Vielzahn-Öffnung (C)


Abdrehvorrückung für Insulin-Pens. Nach Gebrauch des Insulin-Pens die Pen-Kanüle in die runde Vielzahn-Öffnung (C) stecken und den Pen einige Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wenn die Kanüle abgedreht ist, Insulin-Pen etwas tiefer in die Vielzahn-Öffnung (C) drücken. Die Pen-Kanüle fällt in die Box.

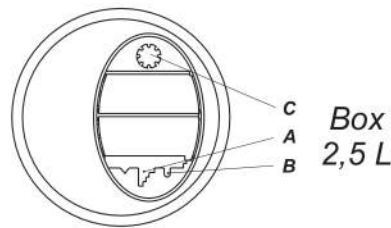

Box
2,5 L

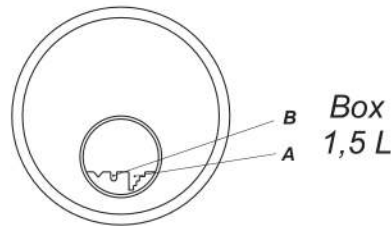




Box
1,5 L

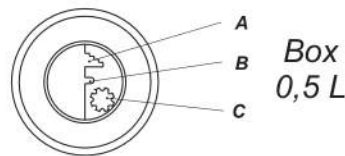

Box
0,5 L



* jedoch mit autoklavierbarem Tagesdeckel. (geeignet für die VDV-Sterilisation bei 110°C)

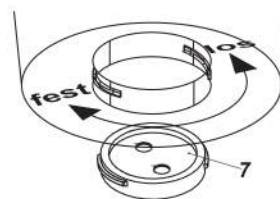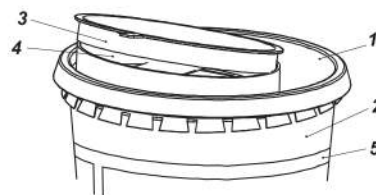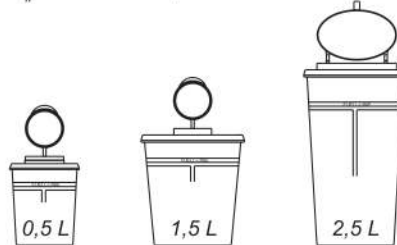

A. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Entsorgungsbehälter dienen ausschließlich zur Entsorgung von Kanülen, Spritzen, Skalpellen und Glasbruch aus dem medizinischen Bereich. Alle anderen Verwendungsarten sind nicht bestimmungsgemäß. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entfällt die Herstellerhaftung.

B. Allgemeine Beschreibung

Die benannten Entsorgungsboxen bestehen aus umweltfreundlichem Polypropylen. Bei der Verbrennung entstehen - laut Bestätigung vom 24.02.1992 der Forschungs- und Materialprüfungsanstalt Baden-Württemberg - keine schädlichen Emissionen.

Die Herstellerdaten, wie Herstellerdatum (Monat/Jahr) und die Identifizierungsnummer, sind für eine Chargenrückverfolgung auf dem Behälter angegeben.

C. Entsorgung und Kennzeichnung:

Die zu entsorgenden Produkte (siehe Bestimmungsgemäße Verwendung) müssen vor dem Befüllen des Entsorgungsbehälters auf spezifizierte oder unspezifizierte Schadstoffe geprüft und die Box durch einen Verantwortlichen nach Gefährdungsgrad gekennzeichnet werden.

Beachten Sie zur Entsorgung der Box die gesetzlichen Richtlinien, bzw. Vorschriften der einzelnen Bundesländer.

7. Sicherheitshinweise

- Der Deckel (1) muss vor Beginn der Befüllung aufgesetzt und eingerastet sein.
- Nicht mit der Hand oder in sonstiger Weise in die Box fassen. (Verletzungsgefahr!)
- Keine Gegenstände gewaltsam in die Box drücken.
- Befüllte Box nicht von außen in irgendeiner Weise zusammendrücken.
- Vor der Entsorgung der Box genau prüfen, dass Deckel 1 und 3 fest verschlossen sind.
- Skalpelle müssen mit besonderer Sorgfalt in die Box entsorgt werden. Durch zu hohe Krafteinwirkung beim Einwerfen oder beim Nachfüllen anderer Gegenstände besteht die Gefahr einer Verkantung und Beschädigung der Boxenwandungen oder des Bodens.
- Keine Flüssigkeiten in die Box einfüllen.
- Box mit empfohlenem Klebe- oder Griff-Adapter durch Aufdrehen verbinden, um ein Umfallen zu verhindern.
- Gebrauchsanweisung und Box-Aufschriften (falls eingepreßt) beachten.
- Box nicht herunterwerfen. Box nicht schütteln. Box nicht fallenlassen.
- Vor Verschluss der Box prüfen, ob Gegenstände aus der Öffnung ragen, sonst entfernen.
- Box nur mit den Händen und nicht gewaltsam schließen.
- Den Klappdeckel (3) nicht zum Eindrücken der zu entsorgenden Gegenstände verwenden.
- Gefahrgut niemals schräg, sondern nur senkrecht in die Box abwerfen.
- Box beim Endverschluss (Pos 3.) nicht gegen den eigenen Körper (z.B. Brust) drücken.
- Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung und der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen.
- Spitze und scharfe Gegenstände gehören nicht in Plastiksäcke oder andere ungeeignete Behälter.

Hinweis:

Gegenüber Darstellungen und Angaben in dieser Gebrauchsanweisung sind technische Änderungen, die zur Verbesserung des Produktes notwendig sind, vorbehalten.