

Nagelkorrektur

Quick Spangen-System

Zur medizinischen Nagelkorrektur. Nie war Nagelkorrektur so einfach!

Einfache Handhabung und sofortiger Einsatz bei entzündeten, schmerzhaften eingewachsenen Nägeln, sekundenschnell appliziert, mit festem sicheren Sitz – das sind die besonderen Eigenschaften der B/S-Spange. Die B/S-Spange drückt nicht im Schuh, hat einen optimalen Tragekomfort, ist fast nicht sichtbar, wasserfest und mit Nagellack überziehbar.

Die B/S-Spange besteht aus einem glasfaserverstärkten Kunststoff und wird auf den eingewachsenen Nagel quer aufgeklebt. Die hierbei entstehenden Rückstellkräfte heben die seitlichen Nagelränder aus dem Nagelfalz heraus, verflachen die Krümmung des Nagels, korrigieren ihn und heilen so den schmerzhaften Nagelfalz wieder aus.



Quick Profi-Set

Art.	Inhalt
2400	30 x B/S Spangen (je 5 x Gr. 14 bis 24) 1 x Clean-Ex Reiniger 25 ml 1 x Quick Dry Aktivator 25 ml 1 x Basic-Kleber 3 ml 1 x Anleitung

Quick Starter-Set

Art.	Inhalt
2401	12 x B/S Spangen (je 2 x Gr. 14 bis 24) 1 x Clean-Ex Reiniger 3 ml 1 x Quick Dry Aktivator 3 ml 1 x Basic-Kleber 3 ml 1 x Anleitung


B/S Quick Spangen-System

Art.	Produkt	Größe	Inhalt
2409	QuickDry Aktivator		25 ml
2411	Basic-Kleber		3 ml
2413	Clean-Ex Reiniger		25 ml
2414	Spangen Quick	14 mm	5 Stück
2416	Spangen Quick	16 mm	5 Stück
2418	Spangen Quick	18 mm	5 Stück
2420	Spangen Quick	20 mm	5 Stück
2422	Spangen Quick	22 mm	5 Stück
2424	Spangen Quick	24 mm	5 Stück

B/S Spangen Classic

Art.	Produkt	Größe	Inhalt
2524	Spangen Classic	24 mm	10 Stück
2410	Applikator		

passende Spange
abmessen

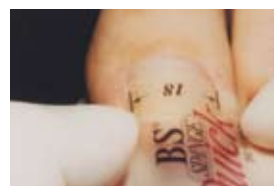

den Kleber dünn
auftragen



Spange mit dem
kurzen Ende aufsetzen



ca. 5 Sekunden
fixieren



die Trägerfolie
entfernen

