

## - Allgemeine Information -

### **Pflege & Reinigung der Gummiträger für Schleifkappen**

Die Pflege & Reinigung der Kappenträger erfolgt, unabhängig von der Marke, nur mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln im Tauch- oder Ultraschallbad.

Es dürfen KEINE thermischen Behandlungen im Heißluftsterilisator oder Autoklaven durchgeführt werden, da sich das Gummi bei Temperaturen über 100°C verformen kann und somit nicht mehr garantiert werden kann, dass die Schleifkappen sicher gehalten werden.



<b>REINIGUNG</b>
• Tauchbad
• Ultraschallbad

- |                  |
|------------------|
| • Tauchbad       |
| • Ultraschallbad |



<b>STERILISATION</b>
• Heißluft-Sterilisation
• Dampf-Sterilisation

- |                          |
|--------------------------|
| • Heißluft-Sterilisation |
| • Dampf-Sterilisation    |