

- Allgemeine Information -

Pflege & Reinigung der Gummiträger für Schleifkappen

Die Pflege & Reinigung der Kappenträger erfolgt, unabhängig von der Marke, nur mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln im Tauch- oder Ultraschallbad.

Es dürfen KEINE thermischen Behandlungen im Heißluftsterilisator oder Autoklaven durchgeführt werden, da sich das Gummi bei Temperaturen über 80°C verformen kann und somit nicht mehr garantiert werden kann, dass die Schleifkappen sicher gehalten werden.



REINIGUNG
• Tauchbad
• Ultraschallbad

- | |
|------------------|
| • Tauchbad |
| • Ultraschallbad |



STERILISATION
• Heißluft-Sterilisation
• Dampf-Sterilisation

- | |
|--------------------------|
| • Heißluft-Sterilisation |
| • Dampf-Sterilisation |