

FACHKREISE:

NAGEL-STABILISIERUNG / PASSIVE NAGELKORREKTUR MIT UNGUISAN HARD COMPOSITE GEL

Das Prinzip der passiven Nagelkorrektur beruht auf der Beobachtung, dass stark gewölbte, eingerollte Nägel häufig einen geringeren Wölbungsgrad am proximalen Nagelrand aufweisen (also im Bereich von Nagelwurzel und Nagelhäutchen), als am distalen Ende der Nagelplatte (= freier Nagelrand).

Bei der passiven Nagelkorrektur wird dieser geringere Wölbungsgrad der Nagelplatte während des Nagelwachstums nach vorne konserviert und dadurch im Laufe der Zeit eine insgesamt flachere Nagelwölbung erreicht.

Das UNGUISAN HARD COMPOSITE GEL wird hierzu streifenförmig und quer zur Wachstumsrichtung auf die Nagelplatte aufgebracht und ausgehärtet (siehe Abb. 1).



Der extrem harte Composite-Streifen wirkt nun wie ein „Stützkorsett“ und wächst mit dem Nagel nach vorne. Die Nagelplatte behält währenddessen ihre Wölbung bei. Das alles passiert völlig schmerzlos, spannungsfrei und schonend. Das Verfahren ist somit auch für Fälle geeignet, bei denen man keine klassische Nagelkorrektur durchführen sollte (brüchige Nägel, Nagelablösungen, Risikopatienten, etc.).

Es eignet sich auch hervorragend, um das Korrekturergebnis einer Nagelspangenbehandlung zu sichern und die verbesserte Nagelform nachhaltig zu bewahren.

ANWENDUNG

1. Vorbereitung des Nagels:
 - a. Verdickte Nägel werden ggf. vorsichtig auf ein normales Maß verdünnt
 - b. Entfernen Sie ggf. Rückstände von Nagellack
 - c. Die Nageloberfläche wird leicht aufgeraut
 - d. Der Nagel soll trocken, staubfrei und fettfrei sein
2. Aufbringen von UNGUISAN PRIMER:
 - a. Im Bereich der geplanten Anbringung wird der UNGUISAN PRIMER mittels Wattestäbchen oder Pinsel (einmaliger Gebrauch) auf die Nagelplatte aufgebracht.
 - b. Hautkontakt ist zu vermeiden.
 - c. Der UNGUISAN PRIMER ist lufttrocknend. Die Trocknungszeit beträgt ca. 1 Minute.
 - d. Nach Gebrauch Flasche sofort wieder gut verschließen, da UNGUISAN PRIMER sonst leicht austrocknen kann.
3. Aufbringen von UNGUISAN HARD COMPOSITE GEL:
 - a. Mit der Dosierspritze wird das Gel punktgenau auf den Nagel aufgetragen.
 - b. Gegebenenfalls kann es zusätzlich mit einem Spatel in Form gebracht werden.
 - c. Die Dicke sollte ca. 2mm bis maximal 3mm betragen
4. Aushärten von UNGUISAN HARD COMPOSITE GEL:
 - A. Bitte verwenden Sie ausschließlich die UNGUISAN BLUE LIGHT HOCHLEISTUNGS-LED-LAMPE
 - b. Bestrahlen Sie das HARD COMPOSITE GEL aus möglichst kurzer Entfernung für 20 Sekunden
 - c. Fertig
5. Entfernen oder Nachbearbeiten von UNGUISAN HARD COMPOSITE GEL:
 - a. Das ausgehärtete Composite Material kann am besten mit Hartmetall-Fräsern abgeschliffen werden.

WAS BENÖTIGE ICH FÜR DIE PASSIVE NAGELKORREKTUR MIT UNGUISAN.

Das UNGUISAN Blue Light System besteht aus

1. **UNGUISAN BLUE LIGHT PRIMER** (inklusive Wattestäbchen zum Auftragen): Dient als Haftvermittler zwischen Nagelplatte und Hard Composite Gel
2. **UNGUISAN BLUE LIGHT HARD COMPOSITE GEL** (in Dosierspritze mit gebogener Kanüle)
3. **UNGUISAN BLUE LIGHT HOCHLEISTUNGS-LED-LAMPE** zum sekundenschnellen Auspolymerisieren
4. Zusätzlich empfehlen wir folgendes bereit zu halten:
 - a. einen Diamant-Fräser zum Anrauen der Nageloberfläche
 - b. einen Cleaner zum Entfetten des Nagels (z.B. Alkoholtupfer)
 - c. einen Spatel, um die Masse ggf. zu modellieren
 - d. einen Hartmetall- bzw. Keramikfräser zum Beschleifen oder Entfernen der passiven Spange.

ENDVERBRAUCHER:

PASSIVE NAGELKORREKTUR MIT UNGUISAN HARD:

SCHMERZFREI – INDIVIDUELL – INNOVATIV

UNGUISAN HARD ist ein vielseitiges und innovatives Produkt zur völlig schmerzfreien Behandlung fast aller Formen von eingerollten und eingewachsenen Fußnägeln.

Ihr Fußtherapeut fixiert dazu die individuell angepasste Passiv-Spange auf dem betroffenen Nagel, der dann während des natürlichen Wachstums eine flachere Form erhält. Dabei sind sowohl das Anbringen selbst als auch das Tragen schmerzfrei!

DIE VORTEILE VON UNGUISAN HARD

Schmerzfreie Behandlung

Schnelle Schmerzlinderung

Korrigiert den Nagel während des physiologischen Nagelwachstums

Wirkt ohne Zug auf den Nagel auszuüben

Besonders für Diabetiker geeignet

Auch bei brüchigen, splittrigen oder teilweise abgelösten Nägeln anwendbar

Keine Einschränkungen für den Patienten (inkl. Schwimmen oder Saunabesuche)

Lackieren der Fußnägel möglich