

Gebrauchsanleitung



Fußpflegegerät
RAUE Air 300 Touch
(Bestellnummer 3049)

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Sicherheitshinweise	4
Reinigung und Desinfektion	9
Gerät kennen lernen	10
Vor dem Gebrauch	11
Anwendungsbereich	11
Inbetriebnahme	11
Gebrauch	13
Bedienschritte	13
Haltung bei der Bearbeitung	14
Absaugung	16
Filterbeutel wechseln	16
Grobstaubfilter wechseln	16
Werkzeug einspannen	17
Drehzahl einstellen	17
Speichertasten	17
Taster am Handstück	17
Fußschalter	18
Auswahlmenü	19
Hilfemenü	19
Menü <i>Einstellungen</i>	20
Filterwechsel bestätigen	20
Licht ein- und ausschalten	20
Bilder und Videos	21
Meldungen	24
Wartung & Pflege	25
Spannzange reinigen	25
Übersicht Wartungen	26
Firmware aufspielen	27
Handhabungshinweise	28
Fehlersuche	29
Technische Daten	30

Vorwort

Mit dem Fußpflegegerät *Raue Air 300 Touch* haben Sie ein Produkt erworben, das den aktuellsten Stand der Technik darstellt und nach strengen Qualitätskriterien hergestellt wurde. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, ist es möglich, dass die Bilder und Zeichnungen in diesem Dokument leicht von dem Produkt abweichen, das Sie erworben haben.

Diese Gebrauchsanweisung enthält eine genaue Beschreibung und erklärt den Umgang mit dem *Raue Air 300 Touch*. Sollten Sie noch weitere Fragen oder Anregungen haben, stehen wir Ihnen telefonisch oder per E-Mail gern zur Verfügung.

Diese Gebrauchsanweisung gehört zum *Raue Air 300 Touch*. Bewahren Sie sie griffbereit auf. Wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch dieses Dokument mit, denn es enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Produktes.

Kurzbeschreibung der Funktionen

Beim *Raue Air 300 Touch* handelt es sich um ein Gerät für die Fußpflege zum Bearbeiten von Hornhaut und Nägeln. Das Handstück kann rotierende Instrumente, wie Diamant-schleifer, Stahlfräser oder Keramikfräser, aufnehmen. Diese werden mit hoher Drehzahl in Rotation versetzt und ermöglichen somit ein effizientes Abtragen von Gewebe. Die Drehrichtung kann per Knopfdruck verändert werden. Die integrierte Absaugung mit Filter nimmt entstehende Stäube zuverlässig auf. Das Einschalten des Gerätes sowie das Einstellen der Drehgeschwindigkeit erfolgt mittels Folientastatur. Alle anderen Funktionen werden mit dem Touch-Display aufgerufen. Das Gerät zeigt Ihnen im Display an, wann der Filter gewechselt werden muss und wann das Gerät zur Inspektion eingeschickt werden sollte. Funktionen und Wartungsschritte werden mit Bildern und Filmen im Display erklärt. Darüber hinaus können Sie einen USB-Stick mit eigenen Bildern anschließen, um Ihren Kunden direkt am Gerät beispielsweise den Behandlungsfortschritt zeigen zu können.

Sicherheitshinweise



Die Installation des Arbeitsraumes muss den einschlägigen Bestimmungen entsprechen. Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind und die Abluft gut entweichen kann.



Das Gerät ist nur von Personen zu benutzen, die mit der Funktion und Arbeitsweise des Gerätes vertraut sind.



Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf dieses Gerät nur an einem Versorgungsnetz mit Schutzleiter angeschlossen werden. Durch Ziehen des Netzsteckers wird das Gerät vom Versorgungsnetz getrennt. Stellen Sie

Sicherheitshinweise

das Gerät daher so auf, dass der Netzstecker jederzeit gut zugänglich ist. Auch der Netzschalter muss immer gut zugänglich sein.



Schalten Sie das Steuergerät nur ein, wenn Sie das Motorhandstück sicher in der Hand halten, oder es sich in der Handstückablage befindet.



Verhindern Sie das Eindringen von Flüssigkeit in das Steuergerät. Die elektronischen Komponenten könnten dadurch zerstört werden. Vor der Reinigung/Desinfektion ist der Netzstecker zu ziehen.



Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers komplett vom Stromnetz getrennt werden. Kontrollieren Sie regelmäßig die Kabel auf Beschädigungen und lassen Sie diese ggf. von einer Fachwerkstatt ersetzen.



Achten Sie darauf, dass Ihre Haare während des Arbeitens mit dem Gerät nicht von den rotierenden Teilen erfasst werden können. Tragen Sie ggf. ein Haarnetz.



Wenn bei der Bearbeitung von Werkstoffen Stäube oder Dämpfe freigesetzt werden, ist eine Absaug- oder Sprayeinrichtung zu benutzen. Tragen Sie während der Bearbeitung einen Mund- und Nasenschutz. Bei der Bearbeitung von techni-

Sicherheitshinweise

schen Werkstücken sind Schutzmaßnahmen entsprechend den Angaben der Werkstoffhersteller zu treffen.



Aus Sicherheitsgründen müssen während der Behandlung undurchlässige Einmalhandschuhe und Schutzbrille getragen werden. Zudem muss ein Mundschutz (Atemschutzmaske) nach EN 14683 Typ IIR oder EN 149 FFP 2 getragen werden.



Während des Filterwechsels ist eine Atemschutzmaske nach EN 14683 Typ IIR oder EN 149 FFP 2 zu tragen.



Achten Sie beim Arbeiten darauf, dass das Motorhandstück und der Fuß des Patienten bzw. das Werkstück einen festen Halt haben. Arbeiten Sie am Fuß des Patienten nur mit leichtem Druck und äußerster Vorsicht, um Verletzungen vorzubeugen.



Um einen festen Halt des Werkzeugs in der Spannzange zu gewährleisten, arbeiten Sie nicht mit Werkzeugen,

- die einen öligen Werkzeugschaft haben,
- deren Werkzeugschaft abgenutzt ist,
- deren Werkzeugschaft verbogen ist.

Sicherheitshinweise



Es ist vor dem Betrieb des Gerätes zu gewährleisten, dass

- sich das Werkzeug weit genug in die Spannzange schieben lässt (ggf. Prüfung mit Prüfstift und Reinigung durchführen),
- das Werkzeug beim Einspannen nicht verkantet,
- das Werkzeug fest in der Spannzange sitzt,
- das Werkzeug für die maximale Drehzahl des Gerätes zugelassen ist (Angabe des Werkzeugherstellers),
- das Werkzeug absolut trocken ist.



Wechseln Sie das Werkzeug aus Sicherheitsgründen nur, wenn das Handstück ausgeschaltet ist.



Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn

- sich das Werkzeug während der Bearbeitung aus der Spannzange lösen sollte,
- der Motor bei der Bearbeitung blockiert.



Im Anwendungsbereich Fußpflege dürfen die Geräte nur mit eingeschalteter Absaugung betrieben werden.



Betreiben Sie die Absaugung nur, wenn ein Filter eingesetzt ist. Überprüfen Sie den Filter alle 10 Betriebsstunden. Tauschen Sie einen vollen Filter

Sicherheitshinweise

sofort aus, spätestens jedoch nach 50 Betriebsstunden.



Das Licht am Handstück ist nur zum Ausleuchten der Behandlungsstelle vorgesehen. Schauen Sie nicht direkt in das Licht.



Saugen Sie mit der Absaugung niemals Flüssigkeiten oder Luft mit hohem Flüssigkeitsanteil (z.B. Wassernebel) ein.



Handhaben Sie das Gerät nur entsprechend der Gebrauchsanweisung. Nehmen Sie selbst keine Reparatur-, Umbau- oder Wartungsarbeiten am Gerät vor. Lassen Sie diese Arbeiten nur von einem Fachmann durchführen. Werkstätten werden auf Anfrage zur Instandhaltung notwendige Unterlagen zur Verfügung gestellt. Das Gehäuse darf niemals geöffnet werden, wenn das Steuergerät am Netz angeschlossen ist, da einige Gerätekompontenten spannungsführend sind. Dieses Gerät darf ohne Erlaubnis des Herstellers nicht geändert werden. Bei unsachgemäßer Behandlung des Steuergerätes übernehmen wir keine Garantie, Gewährleistung oder Haftung.



Arbeiten Sie nur mit Werkzeugen, die für die unter (12) bis (14) abgespeicherten Drehzahlen zugelassen sind!



Wird das Gerät aus dem Standby-Modus wieder eingeschaltet, startet das Gerät mit den letzten eingestellten Werten für die Drehzahl und die Absaugstufe. Achten Sie darauf, dass der eingewechselte Fräser nicht mit zu hoher Drehzahl gestartet wird. Stellen Sie die benötigte Drehzahl vor dem Wechsel des Fräsers ein.



Wenn das Touch-Display eine Beschädigung aufweist oder nicht mehr einwandfrei funktioniert, darf das Gerät nicht mehr betrieben werden. Schicken Sie es an eine Fachwerkstatt zur Reparatur.



Reinigung und Desinfektion



Das Gerät ist für den Einsatz von rotierenden Instrumenten bestimmt, die beim bestimmungsgemäßen Gebrauch die Haut oder Schleimhaut nicht durchdringen, unbeabsichtigt aber dennoch Verletzungen verursachen können. Für diesen Einsatzzweck sind auch die folgenden Reinigungs- und Desinfektionsverfahren ausgelegt. Nach jeder Behandlung sind folgende Schritte durchzuführen:

- Entfernen Sie zunächst das rotierende Instrument (Fräser). Dies ist nach Angaben des Herstellers aufzubereiten.
- Gewebereste sind durch Abwischen mit einem mit Leitungswasser leicht angefeuchteten Papiertuch vom Gerät zu entfernen. Alle Oberflächen des Gerätes sind anschließend mit Desinfektionstüchern (Mikrocid AF Tücher von Schülke und Mayr) abzuwischen. Während der Lebensdauer des Gerätes kann es uneingeschränkt oft gereinigt und desinfiziert werden.

Gerät kennen lernen

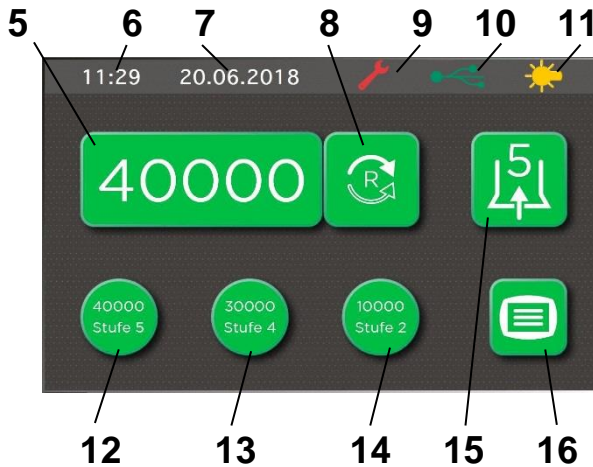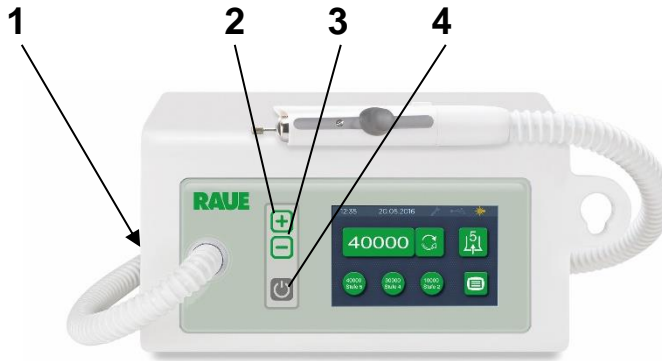

- 1 Netzschalter
- 2 Drehzahl erhöhen
- 3 Drehzahl verringern
- 4 kurz drücken: Gerät einschalten
nochmal kurz drücken: Handstück einschalten
lang drücken: Gerät ausschalten (Standby)
- 5 Anzeige der Drehzahl
- 6 Uhrzeit
- 7 Datum
- 8 Drehrichtung ändern
- 9 Wartung erforderlich
- 10 USB-Stick eingesteckt
- 11 Licht (leuchtet gelb, wenn eingeschaltet)
- 12 - 14 Speichertasten für Drehzahl/Absaugleistung
- 15 Absaugstufe einstellen
- 16 Menü mit weiteren Funktionen

Vor dem Gebrauch

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem ersten Betrieb komplett durch. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung gut auf.

Anwendungsbereich

Das Gerät darf nur von Personen betrieben werden, die eine Ausbildung als Fußpfleger(in) absolviert haben. Vor dem Gebrauch muss sich der Anwender mittels dieser Anleitung mit dem Gerät vertraut machen oder eingewiesen worden sein.

Das Gerät darf nur in geschlossenen Räumen betrieben werden. Es kann in gewerblicher Umgebung oder Haushalten eingesetzt werden. Das Gerät ist nicht für den Einsatz in Operationssälen vorgesehen.

Das Gerät kann zum Einbauen in Schränke oder als transportables Gerät für Koffer benutzt werden. Es ist für folgende Anwendungsbereiche geeignet:

Fußpflege (Schleif-, Fräs-, und Polierarbeiten)



Das Gerät ist für den Einsatz von rotierenden Instrumenten bestimmt, die beim bestimmungsgemäßen Gebrauch die Haut oder Schleimhaut nicht durchdringen, unbeabsichtigt aber dennoch Verletzungen verursachen können.



Achtung: Im Fußpflegebereich muss mit Absaugung gearbeitet werden.

Inbetriebnahme

Die Installation des Arbeitsraumes muss den einschlägigen Bestimmungen entsprechen. Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind und die Abluft gut entweichen kann. Um ein ungehindertes Ausströmen der Abluft zu gewährleisten, müssen rechts vom Gerät 12 cm Abstand sein.

Positionieren Sie das Gerät so, dass die Bedienelemente einfach zu erreichen sind und die Austrittsstelle des Schlauches einen Abstand von maximal 60 cm zum Fuß des Patienten hat. Die Positionierungshöhe beträgt 30 – 90 cm über dem Fußboden.

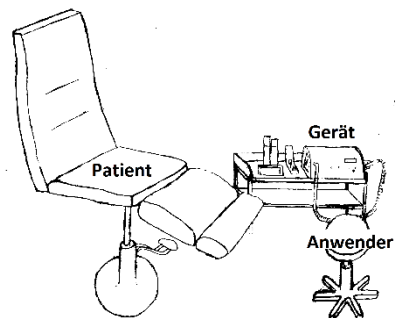


Bild: Beispiel für die Positionierung des Fußpflegegerätes im Behandlungsraum

Vor dem Gebrauch

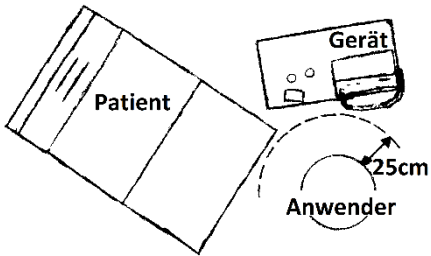



Bild: Arbeitsplatz aus der Vogelperspektive

Sofern Sie über einen Fußschalter verfügen, stecken Sie den Stecker des Fußschalters in die Buchse rechts am Gerät mit dem Symbol .


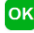
Vergewissern Sie sich, dass der Filterbeutel und der Grobstaubfilter (siehe S. 16) eingesetzt sind. Überprüfen Sie, dass das Werkzeug (siehe S. 17) eingespannt ist.

Links hinten am Gerät befindet sich der Hauptschalter. Betätigen Sie diesen, um das Gerät einzuschalten:



Im Display werden Sie aufgefordert, die Gerätesprache einzustellen:



Anschließend folgen fünf weitere Seiten mit wichtigen Hinweisen. Mit  springen Sie jeweils zur nächsten Seite. Auf der letzten Seite drücken Sie auf . Der Zähler für die Berechnung des Wartungsvorschlags wird nun automatisch auf null gesetzt.

Das Display geht nun aus und das Gerät befindet sich im Standby. Nehmen Sie das Handstück in die Hand. Sollte der Schlauch das Handstück verdrehen, so lässt er sich am Steuergerät justieren:



Zum Starten des Handstücks und der Absaugung drücken Sie die Taste (4) an der Gerätevorderseite.

Gebrauch

Nachfolgend wird die Reihenfolge der Bedienschritte beschrieben. Im Anschluss wird auf einzelne Schritte detailliert eingegangen. Lesen Sie die komplette Anleitung, bevor Sie mit Ihrer Arbeit beginnen.

Bedienschritte

Nachdem Sie das Instrument eingespannt haben, drücken Sie die Standby-Taste (4), um den Bildschirm einzuschalten. Wählen Sie mittels der Tasten (2) und (3) die gewünschte Drehzahl aus. Die Instrumentenhersteller geben oftmals Empfehlungen für die optimale Drehzahl heraus. In jedem Fall ist aber darauf zu achten, dass die maximal zulässige Drehzahl nicht überschritten wird. Drücken Sie nun nochmals die Standby-Taste (4), um das Handstück in Rotation zu versetzen.

Mittels des Icons (8) können Sie nun noch die Drehrichtung wählen. In der Regel arbeitet man im Rechtslauf. Auch die meisten Fräser-Instrumente (Stahlinstrumente mit Stahlschneide) sind für den Rechtslauf optimiert. Bei Diamantschleifern oder Edelkorundschleifern hat die Drehrichtung keinen Einfluss auf die Abtragsleistung. Das Arbeiten im Linkslauf kann von Nutzen sein, wenn der anfallende Frässtaub im Rechtslauf in das Sichtfeld gewirbelt wird.

Schalten Sie nun auch die Absaugung zu. Mittels des Icons (15)

können Sie die Stärke der Absaugung einstellen.

Häufig verwendete Drehzahlen und Absaugleistungen können abgespeichert werden. Stellen Sie zunächst die gewünschte Drehzahl und Absaugleistung ein. Speichern Sie diese ab, indem Sie eine der drei Speichertasten (12) - (14) für 4 Sekunden gedrückt halten. Um die gespeicherte Drehzahl und Absaugleistung schnell aufrufen zu können, drücken Sie kurz die entsprechende Speichertaste.

Nachdem Drehzahl und Absaugleistung eingestellt sind, können Sie mit dem Arbeiten beginnen. Wenn Sie die Arbeit unterbrechen oder beenden wollen, drücken Sie die Standby-Taste (4). Handstückmotor und Absaugung gehen dann aus. Das Handstück können Sie nun in der Handstückablage rechts am Gerät ablegen. Alternativ kann das Handstück auch durch langes Drücken des Tasters am Handstück oder durch Drücken des Tasters am Fußschalter ausgeschaltet werden. Durch langes Drücken des Standby-Tasters (4) wird das Gerät ausgeschaltet und befindet sich im Standby-Modus.

Wir empfehlen, das Gerät am Netzschalter auszuschalten, wenn es länger nicht betrieben wird. So sparen Sie Strom. Bei Außerbetriebnahme ist zusätzlich der Netzstecker zu ziehen.

Gebrauch

Haltung bei der Bearbeitung

Die folgenden Bilder sind Beispiele für die Haltung bei der Bearbeitung verschiedener Fußbereiche. Stellen Sie stets sicher, dass der Fuß einen sicheren Halt hat, und dass Sie spannungsfrei arbeiten können.



Gebrauch



Absaugung

Stellen Sie die Absaugung am Icon (15) ein. Die Absaugleistung kann in fünf Stufen reguliert werden. Im Display erscheint die gewählte Absaugstufe. Bei einer Überhitzung des Absaugmotors schaltet sich dieser automatisch ab. Lassen Sie das Gerät abkühlen, um es wieder in Betrieb zu nehmen. Schicken Sie das Gerät zur Inspektion ein, wenn der Fehler wiederholt auftritt.

Filterbeutel wechseln



Während des Filterwechsels ist eine Atemschutzmaske nach EN 14683 Typ IIR oder EN 149 FFP 2 zu tragen.


Betreiben Sie die Absaugung nur, wenn ein Filter eingesetzt ist. Überprüfen Sie den Filter alle 10 Betriebsstunden. Tauschen Sie einen vollen Filter sofort aus, spätestens jedoch nach 50 Betriebsstunden.

Die Öffnung des Staubfilters (Best.-Nr. 3084) mit dem Finger leicht eindrücken.



Öffnen Sie den Staubkammerdeckel und entnehmen Sie den alten

Filter. Halten Sie den Filter zum Aufschieben wie im Bild gezeigt mittig, um ein Abknicken zu vermeiden.

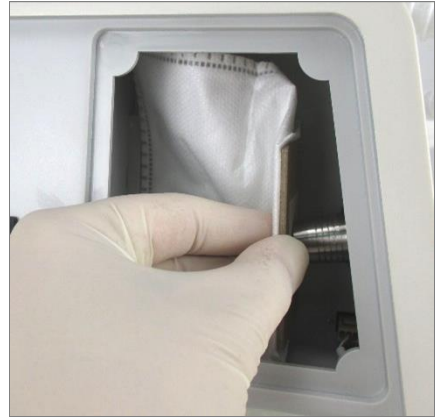


Es muss der Staubfilter (Best.-Nr. 3084) verwendet werden. Es darf NICHT der Papierfilter (Best.-Nr. 3082) eingesetzt werden.

Nach erfolgtem Filterwechsel muss dies im Gerät eingegeben werden. Siehe dazu Kapitel „Filterwechsel bestätigen“ auf Seite 20.


Grobstaubfilter wechseln

Der Grobstaubfilter (Best.-Nr. 3081) muss alle 200 Betriebsstunden gewechselt werden. Der alte Filter wird entnommen und der neue in die Halterung geschoben.

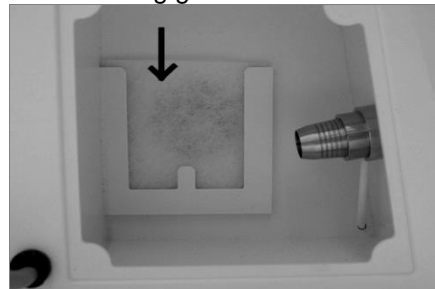

Werkzeug einspannen

Das Handstück ist mit einer Spannzange ausgestattet, die Werkzeuge aufnehmen kann, wie sie üblicherweise in der Fußpflege verwendet werden (Durchmesser 2,35 mm). Um die Spannzange zu öffnen, schieben Sie den Spannkopf mit dem Daumen nach vorne und lassen Sie ihn in dieser Stellung. Führen Sie nun das Werkzeug bis zum Anschlag ein. Ziehen Sie den Knopf zurück und das Werkzeug wird gespannt.

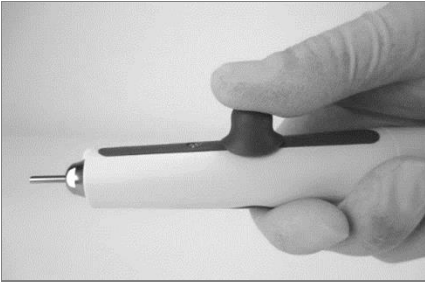

Wechseln Sie das Werkzeug nur, wenn das Handstück ausgeschaltet ist.

Drehzahl einstellen

Nehmen Sie das Handstück (mit Werkzeug) in die Hand oder legen Sie es in die Handstückablage. Schalten Sie das Gerät am Taster (4) ein. Nun können Sie die gewünschte Drehzahl mittels der Tasten (3) bzw. (4) einstellen und die Drehrichtung wählen (Taster (8)).

Speichertasten

Häufig verwendete Drehzahlen / Absaugleistungen können abgespeichert werden. Dafür stehen Ihnen 3 Speichertasten zur Verfügung. Stellen Sie zunächst die gewünschte Drehzahl / Absaugleistung ein. Speichern Sie diese ab, indem Sie eine der Speichertasten (12), (13) oder (14) für 4 Sekunden gedrückt halten. Die abgespeicherte Drehzahl/Absaugleistung steht nun direkt auf der Speichertaste. Um die gespeicherte Drehzahl / Absaugleistung schnell aufrufen zu können, drücken Sie kurz die entsprechende Speichertaste (12), (13) oder (14).

Taster am Handstück

Durch langes Drücken des Tasters wird das Handstück ein- oder ausgeschaltet. Durch kurzes Drücken rufen Sie die Drehzahl/Absaugleistung der linken Speichertaste (12) auf. Durch nochmaliges kurzes Drücken rufen Sie die Drehzahl/Absaugleistung der mittleren Speichertaste (13) auf. Durch nochmaliges kurzes Drücken wird dann wieder die Drehzahl der ersten Speichertaste (12) aufgerufen usw.




Arbeiten Sie nur mit Werkzeugen, die für die unter (12) - (14) abgespeicherten Drehzahlen zugelassen sind!

Fußschalter

Inbetriebnahme des Fußschalters

Verwenden Sie nur original Fußschalter (Best.-Nr. 3036), um Schäden zu vermeiden. Stecken Sie den Stecker des Fußschalters in die Buchse rechts am Gerät mit dem

Symbol .

Funktion des Fußschalters

Durch langes Drücken des Fußschalters werden Handstück und Absaugung eingeschaltet. Durch nochmaliges langes Drücken werden Handstück und Absaugung wieder ausgeschaltet.

Durch kurzes Drücken rufen Sie die Drehzahl und Absaugleistung der linken Speichertaste (12) auf. Durch nochmaliges kurzes Drücken rufen Sie die Drehzahl und Absaugleistung der mittleren Speichertaste (13) auf. Durch nochmaliges kurzes Drücken wird dann wieder die Drehzahl und Absaugleistung der ersten Speichertaste (12) aufgerufen usw.



Arbeiten Sie nur mit Werkzeugen, die für die unter (12) - (14) abgespeicherten Drehzahlen zugelassen sind!



Tipp: Wenn das Display ausgeschaltet ist, können Sie es durch langes Betätigen des Fußschalters aktivieren.

Auswahlmenü



Im Auswahlmenü können Sie zu folgenden Funktionsseiten wechseln:

Bilder/Videos: Anzeigen von Bildern und Videos von Ihrem USB-Stick

Hilfe: Gebrauchsanleitung, Hilfetutorials, Problemlösungen

Licht: Licht ein-/ausschalten

Wartung: Datum der letzten Wartung und Fehlermeldungen anzeigen lassen

Filterwechsel: Wechsel des Filterbeutels eingeben und Datum des letzten Wechsels anzeigen

Einstellungen: Uhrzeit, Datum und Sprache einstellen

Mittels der Taste  können Sie in das vorherige Menü zurückkehren.

Hilfemenü



Gebrauchsanleitungen: Hier finden Sie eine Kurzform der Gebrauchsanleitung. Diese ersetzt die Originalanleitung in Papierform nicht, da die Originalanleitung weitergehende Hinweise und Sicherheitshinweise enthält.

Fräser einspannen: Film, der das Einspannen von rotierenden Werkzeugen demonstriert

Spannzange reinigen: Film, der das Reinigen der Spannzange demonstriert

Filter wechseln: Film, der das Wechseln des Filterbeutels zeigt

Problemlösungen: Lösungen zu bekannten Problemen

Mittels der Taste  können Sie in das vorherige Menü zurückkehren.

Gebrauch

Menü *Einstellungen*



Uhrzeit: Einstellen der Systemuhrzeit.

Datum: Einstellen des Systemdatums

Sprache: Einstellen der Sprache

Sicherheitsabfrage: Einstellen, ob ab einer Drehzahlerhöhung von 10.000 U/min, die mittels Speichertasten hervorgerufen wurde, eine Sicherheitsmeldung erscheinen soll. Sofern Sie nur mit Instrumenten arbeiten, die für eine Drehzahl von 40.000 U/min zugelassen sind, kann die Sicherheitsmeldung deaktiviert werden.

Filterwechsel bestätigen

Alle 50 Stunden Betriebszeit im Absaugmodus erhalten Sie den Hinweis „Bitte Filter wechseln!“. Nach erfolgtem Filterwechsel muss dies im Gerät eingegeben werden. Klicken Sie im Startbildschirm auf die Taste für das Auswahlm Menü:




Anschließend klicken Sie auf „Filter wechseln“. Bestätigen Sie die Frage „Filter jetzt wechseln?“ mit „JA“.

Licht ein- und ausschalten

Um das Licht ein- oder auszuschalten, klicken Sie oben in der Leiste auf das Lichtsymbol:



Alternativ können Sie das Licht auch im Auswahlm Menü ein- oder ausschalten. Klicken Sie dazu im Startmenü auf die Taste für das Auswahlm Menü:

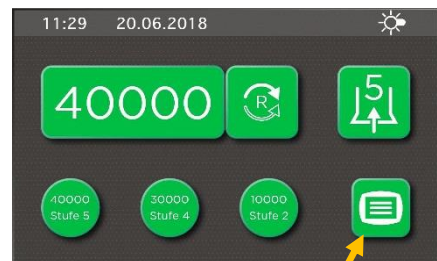

Anschließend klicken Sie auf „Licht“. Bestätigen Sie nun mit „Ja“ oder „NEIN“.

Gebrauch

Bilder und Videos

Mit dem Bild und Videobetrachter können Bilder im Format JPG und Videos im Format EMF vom USB-Stick angezeigt werden. Verwenden Sie vorzugsweise den mitgelieferten USB-Stick (4GB). USB-Sticks anderer Hersteller sind meist kompatibel. Die Sticks müssen das Dateiformat FAT16 oder FAT32 aufweisen. Auf dem mitgelieferten Stick sind Beispieldateien aufgespielt. Ein Löschen dieser Dateien beeinflusst nicht die Funktion des Gerätes.

Bitte beachten Sie, dass sich maximal 100 Dateien im Verzeichnis für den Bildbetrachter befinden dürfen.

Klicken Sie im Auswahlnenü auf „Bilder/Videos“, um das Betrachtungsprogramm zu starten.



In der Dateiliste sehen Sie die Dateien vom USB-Stick. Durch Herunterwischen des Scrollbalkens können Sie in der Liste nach unten scrollen. Wählen Sie ein Bild aus und rechts wird ein kleines Vorschaubild gezeigt. Klicken Sie auf das Vorschaubild, um es zu vergrößern. Wenn Sie in der vergrößerten Ansicht nochmals auf das Bild klicken, dann kehren Sie zur Vorschaubildansicht zurück.

Gebrauch

Tipp: Nutzen Sie das Programm, um dem Kunden am Gerät Bilder vom Behandlungsfortschritt zu zeigen. Legen Sie dazu als Dateinamen den Kundennamen an und anschließend eine fortlaufende Nummer. Über die Sortierfunktion können Sie das gewünschte Bild finden.

Bilder sortieren

Durch Tippen auf <Name> wird die Dateiliste aufsteigend nach Dateinamen sortiert. Durch nochmaliges Tippen auf <Name> wird die Dateiliste absteigend nach Dateinamen sortiert.

Durch Tippen auf <Datum> wird die Dateiliste aufsteigend nach Datum sortiert. Durch nochmaliges Tippen auf <Datum> wird die Dateiliste absteigend nach Datum sortiert.

Videoformate

Es können Videos vom Dateiformat EMF betrachtet werden. Unter <https://www.hadewe.de/raue-air-300-touch/> stellen wir ein Programm bereit, um eigene Videos aus anderen Formaten in das EMF-Format zu konvertieren.

Öffnen Sie die Datei, um die Installation zu starten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Monitor.

Bedienung des Konvertierungsprogramms File-Converter



Input: Quelldatei auswählen. Folgende Formate werden unterstützt: MP4, WMV. Die Quelldateien sollten im Verhältnis 4:3 aufgenommen sein, damit es beim Konvertieren nicht zu Verzerrungen kommt.

Gebrauch

Output: Zielordner angeben. Ein Dateiname muss nicht angegeben werden. Es wird der Dateiname der Quelldatei übernommen.

Framerate: Anzahl der Bilder pro Sekunde. Wert zwischen 10 und 40 möglich. Empfohlener Wert: 25.

Qualität der Aufnahme: Wert zwischen 1 und 31 möglich. Je höher der Wert, desto höher ist die Komprimierung und desto niedriger ist die Qualität und die Dateigröße. Empfohlener Wert: 20.

Durch Klicken auf Convert wird die Konvertierung gestartet. Die Video-Datei [* .emf] wird in den Zielordner geschrieben.

Video-Bibliothek


Unter <https://www.hadewe.de/raue-air-300-touch/> können Sie Videos und Bilder rund um das Thema Fußpflege für Ihr Gerät herunterladen. Laden Sie diese auf den USB-Stick, um sie am Gerät betrachten zu können.

In der Video-Bibliothek finden Sie Videos und Bilder, mit deren Hilfe Sie Ihren Kunden die Behandlung erläutern können. Gerade neue Kunden sind oft unsicher, da sie nicht wissen, was bei einer Behandlung auf Sie zukommt. Da ist es hilfreich, dem Patienten die Behandlungsschritte genau zu erklären. Oft ist dies schwierig, besonders wenn die Patienten die Behandlungsstelle gar nicht einsehen können. Bilder sagen mehr als viele Worte. Nutzen Sie unsere Videos, um den Patienten zu erläutern, welche Schritte Sie im Laufe der Behandlung durchführen werden.

Darüber hinaus befinden sich in der Video-Bibliothek Anleitungen, welche die Bedienung und die Wartung des Gerätes beschreiben.


Meldungen

ERINNERUNG

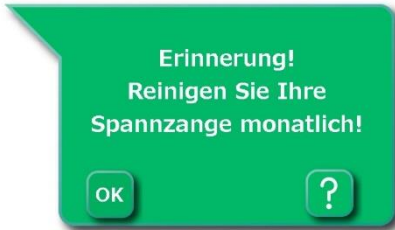

→ Sie erhalten monatlich eine Erinnerung an das Reinigen der Spannzanze. Eine Anleitung dazu finden Sie auf Seite 25. Außerdem bietet Menüpunkt „Hilfe“ eine Video-Anleitung zu diesem Thema.

LETZTE WARTUNG

→ Nach längerem Betrieb ist der Austausch von Verschleißteilen, wie Kugellagern, ratsam. Die Steuerung wertet den Zeitraum seit der letzten Wartung und die tatsächliche Betriebszeit aus und zeigt ggf. eine Wartungsempfehlung an. In diesem Fall erscheint das Symbol . Durch Tippen auf dieses Symbol wird folgende Meldung angezeigt:



Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler oder eine Reparaturwerkstatt.

FILTER WECHSELN

→ Alle 50 Stunden Betriebszeit im Absaugmodus erhalten Sie den Hinweis „Bitte Filter wechseln!“. Im Kapitel „Filterbeutel wechseln“ auf

Seite 16 finden Sie eine Anleitung und unter dem Menüpunkt „Hilfe“ ein Hilfevideo dazu.

ABSCHALTUNG DREHZ. ABWEICHUNG

→ Das Gerät schaltet ab, wenn die eingestellte Handstückdrehzahl nicht eingehalten werden kann.

ABSCHALTUNG ABSAUGMOTOR DREHZ.ABWEICHUNG

→ Das Gerät schaltet ab, wenn die Drehzahl des Absaugmotors nicht eingehalten werden kann.

ABSCHALTUNG HOHE HANDST.BELASTUNG


→ Das Gerät schaltet ab, wenn das Handstück über einen längeren Zeitraum außergewöhnlich stark belastet wurde.

Spannzange reinigen


Aufgrund der Dichtung dringt Schmutz üblicherweise nur in geringem Maße in das Handstück ein. Im Laufe der Zeit kann sich jedoch Schmutz ansammeln und die Funktion des Gerätes beeinflussen. Reinigen Sie die Spannzange daher monatlich.

Spannzange ausbauen

Schrauben Sie mit dem Zangenschlüssel die Spitze des Handstückes ab:

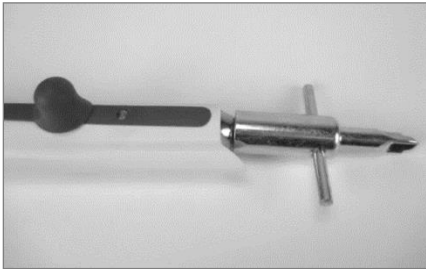

Reinigen Sie nun das Handstück und die Spitze mit der Reinigungsbürste. Schieben Sie den Spannkopf nach vorne:

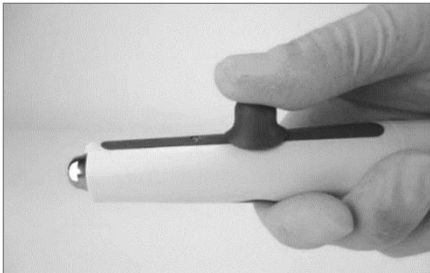

Stecken Sie den runden Achsen-schlüssel auf die Achse und halten Sie ihn fest. Drehen Sie mit der spitzen Seite des Zangenschlüssels

die Spannzange heraus:



Reinigung der Spannzange

Weichen Sie die Spannzange in Spiritus oder einer Flüssigkeit zur Instrumentenreinigung ein. Säubern Sie die Schlitzte der Spannzange mit der Reinigungsbürste:



Drücken Sie mit der Reinigungsbürste alle Schmutzrückstände aus der Bohrung:



Spülen Sie die Spannzange gut ab. Lassen Sie die Spannzange dann trocknen. Machen Sie einen kleinen

Wartung & Pflege

Tropfen Öl auf den Zeigefinger und verreiben Sie ihn mit Daumen und Zeigefinger. Tupfen Sie nun das Öl ab, so dass sich nur noch ein ganz leichter Ölfilm auf den Fingern befindet. Drehen Sie nun die Spannzange zwischen Daumen und Zeigefinger. Es darf sich nur ein hauchdünner Ölfilm auf der Spannzange befinden. Es gilt: Besser zu wenig als zu viel.

Die Montage der Spannzange erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie darauf, dass die Spannzange bei der Montage geöffnet ist (Knopf nach vorne schieben) und richtig angezogen wird.

Übersicht Wartungen

Was?	Wie oft? Durch wen?
Spannzange reinigen	monatlich durch Anwender
Filterbeutel wechseln	alle 50 Stunden (Kontrolle alle 10 Stunden) durch Anwender
Grobstaubfilter wechseln	alle 200 Stunden durch Anwender
Wartung durch Fachwerkstatt (Verschleißteile wechseln; Gehäuse prüfen; Reinigung; Ableitstrom)	alle 500 Betriebsstunden

Firmware aufspielen

Wenn Sie das Gerät am Netzschalter einschalten, erscheint die Versionsnummer kurz im Display:

```
BLTOS Firmware Version: 2.00.04 compile date: Jan 1
```

1. Firmware herunterladen unter <https://www.hadewe.de/raue-air-300-touch/>. Speichern Sie die Datei auf einen USB-Stick. Die Datei muss sich im Stammverzeichnis befinden. Der Dateiname *encrypted_blto_m7.bin* darf nicht verändert werden.

2. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus und stecken Sie den USB-Stick ein.



3. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten + / - und halten Sie diese gedrückt, während Sie das Gerät am Netzschalter einschalten.

4. Im Display erscheint während der Aktualisierung:

```
Bootloader version: 1.00.01 compile date: May 1
SDRAM TEST...OK!
SD Card Version: Version:b004

Searching usb device... found
Copy file1:/bootloader_data/Dateiname.jpg to 0:
103 bytes written...done
```

Der Vorgang dauert ca. 15 Minuten.



Schalten Sie das Gerät auf keinen Fall während der Aktualisierung aus. Es könnte sonst Schaden nehmen.

5. Sobald in der letzten Zeile „Please restart device“ steht, ist die Aktualisierung abgeschlossen und Sie können das Gerät am Netzschalter ausschalten.

```
Bootloader version: 1.00.01 compile date: May 1
SDRAM TEST...OK!
SD Card Version: Version:b004

Searching usb device... found
Load file to memory... done

----- BOOT FILE DATA -----
HW Id: 1
FW Version: 2.0.4
CRC: 3eab
-----

Decrypt Data... done
Calculated CRC: 3eab → CRC CHECK OK!
FW update complete
Please restart device
```

6. Das Gerät kann nun wieder normal benutzt werden.

Handhabungshinweise



Legen Sie das Motorhandstück nie in eine Flüssigkeit und ölen Sie es nicht. Achten Sie darauf, dass auch bei der Reinigung und Desinfektion keine Feuchtigkeit in das Motorhandstück eindringt. Wenden Sie keine Sprühdesinfektion an.



Spannen Sie niemals nasse Fräser ein. Sie bringen damit Feuchtigkeit in das Handstück ein, was zu einem Schaden führen kann.



Die von verwendeten Materialien schließen eine Rostbildung aus. In Fällen, in denen es zu einem Rostbefall im Handstück kommt, beweisen Überprüfungen immer wieder, dass es sich um Fremdstoff handelt, der von Werkzeugen stammt. Selbst an Edelstahlinstrumenten namhafter Hersteller kann Rostbildung auftreten, z.B. bei falscher Behandlung mit chemischen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Fremdstoff setzt sich im Handstück in Form von Flugrost ab und führt dort zu Rostfraß. Lassen Sie daher kein Werkzeug im Handstück eingespannt, wenn Sie nicht mit dem Handstück arbeiten.



Achten Sie darauf, dass Sie das Motorhandstück nicht fallen lassen oder

Stößen aussetzen. Die Kugellager und der Motor könnten dabei Schaden nehmen. Arbeiten Sie nur mit Werkzeugen, die einwandfrei sind.



Arbeiten Sie nicht mit Werkzeugen,

- die verbogen sind,
- die eine Unwucht haben,
- deren Schaft abgenutzt ist
- oder die angerostet sind.



Das Arbeiten mit nicht einwandfreien Werkzeugen verursacht eine stärkere Vibration des Motorhandstücks. Ein Schaden oder die Zerstörung der Lager, der Einspannvorrichtung und des Motors können die Folge sein.



Das Arbeiten mit zu hohem Druck erhöht die Arbeitsleistung nicht, da der Motor abgebremst wird. Ein weiterer Nachteil ist die stärkere Belastung des Motors und der Lager.



Falls Sie das Gerät versenden wollen, so ist zuvor der Staubbeutel zu entfernen.



Saugen Sie ausschließlich Schleifspäne oder Stäube, niemals aber größere Partikel, wie z.B. Wattereste, ein. Diese können im Handstück stecken bleiben und zu einer Verstopfung führen.

Fehlersuche

Handstück vibriert, ist laut oder wird im vorderen Bereich heiß.

Verwendung verbogener Fräser → ggf. anderen Fräser verwenden (Der Fräser kann mit Fräserprüflehre 2380 auf Verbiegung überprüft werden.)

Maximal zulässige Drehzahl des Fräasers wurde überschritten, was zu einer zu höheren Vibration führt. → Herstellerangabe des Fräserherstellers beachten.

Fräser lässt sich nur schwer in das Handstück einführen.

Verwendung verbogener Fräser → ggf. anderen Fräser verwenden (Der Fräser kann mit Fräserprüflehre 2380 auf Verbiegung überprüft werden.)

Spannzange ist verschmutzt. → Reinigung der Spannzange entsprechend der Anweisung in der Gebrauchsanleitung.

Fräser spannt nicht (dreht sich mit).

Spannzange ist nicht richtig angezogen. → Anziehen der Spannzange entsprechend der Anweisung in der Gebrauchsanleitung.

Handstückknopf lässt sich nur schwer betätigen.

Spannzange ist verschmutzt. → Reinigung der Spannzange entsprechend der Anweisung in der Gebrauchsanleitung.

Das Gerät hat gar keine Funktion.

Überprüfen Sie, ob der Hauptschalter an der linken Seite eingeschaltet ist.

Fußschalter ist ständig betätigt oder defekt → Stecker des Fußschalters

probehalber aus der Gerätebuchse nehmen.

Netzstecker ziehen, um das Gerät zu resetten.

Das Gerät ist an verschiedenen Orten verschieden laut.

Je nach Untergrund variiert die Gerätelautstärke. Steht das Gerät direkt vor Wänden, wird der Schall dort stärker reflektiert, als wenn es weiter weg von Wänden steht.

Handstückmotor stottert kurz (ca. 1 Sekunde) beim Einschalten.

In seltenen Fällen kann dieser Effekt auftreten. Der Effekt schadet dem Gerät nicht.

Die Absaugung funktioniert nicht.

Bei einer Überhitzung des Absaugmotors schaltet sich dieser automatisch ab. Lassen Sie das Gerät abkühlen, um es wieder in Betrieb zu nehmen. Schicken Sie das Gerät zu Inspektion ein, wenn der Fehler wiederholt auftritt.

Speichertaste für Drehzahl/Absaugung wird beim langen Drücken schlecht erkannt.

Sie verbessern die Tasterkennung, wenn Sie

→ während des Drückens nicht mit der anderen Hand die Scheibe berühren.

→ sich während des Drückens mit der Hand nicht abstützen.

Beschreibungen der Meldungen auf dem Gerätedisplay finden Sie auf Seite 24.

Technische Daten

6485 RAUE Air 300 Touch

Steuergerät

Komplettgewicht: 2,7kg
Abmessungen: B273xH142xT186mm
Eingang: 100 V - 230V ~, 50 Hz
Stromaufnahme: 1 A
Sicherung Primär:
F1, F2: 4 A träge, Schmelzsicherung
Sicherung Sec.: Thermosicherung
Schutzklasse: I
Genauigkeit Drehzahlanzeige: $\pm 10\%$

Handstück

Gewicht: 150 g
Durchmesser: 19 - 25 mm
Länge: 144 mm
Drehzahl: 6.000 - 40.000 U/min

Zubehör und Ersatzteile

<u>Best.-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
3036	Fußschalter
3081	Grobstaubfilter
3084	Feinstaubfilter

im Lieferumfang enthalten (bei Bedarf lieferbar)

Doppel-Reinigungsbürste
Zangenschlüssel
Achschlüssel
USB-Stick (4GB)

Das Spannsystem ist für rotierende Instrumente ausgelegt, die in Übereinstimmung mit EN ISO 1797-1 einen Schaftdurchmesser von 2,35 mm haben.

Einsatzzeit

Das Gerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt.

Umgebungsbedingungen

Das Gerät ist für den Gebrauch in trockenen geschlossenen Räumen bestimmt.

Betrieb:

Temperatur: +10°C bis +26°C
Relative Luftfeuchte: 25% bis 75%
(nicht kondensiert)
Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa

Lagerung:

Temperatur: -5°C bis +55°C
Relative Luftfeuchte: 10% bis 95%
(nicht kondensiert)
Luftdruck: 500 hPa bis 1060 hPa

Transport (bis 4 Wochen):

Temperatur: -5°C bis +55°C
Relative Luftfeuchte: 10% bis 95%
(nicht kondensiert)
Luftdruck: 500 hPa bis 1060 hPa

Sicherheitstechnische Prüfung

Das Gerät ist jährlich einer sicherheitstechnischen Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 (ehemals BGV A3) zu unterziehen.

Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Fußpflegegerät 6485 mit den folgenden Richtlinien übereinstimmt:

2014/30/EU EMV Richtlinie
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

hadewe GmbH - Grambartstraße 10 -
30165 Hannover

Entsorgung



Gerät und Filter können infektiöses Material, wie Rückstände von Schleifstaub oder Gewebereste, enthalten. Daher sind die nachfolgend beschriebenen Hinweise zur Entsorgung dringend zu beachten.

Geräteentsorgung

Entsprechend dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Altgeräte, die in Deutschland gekauft wurden, direkt an den Hersteller (hadewe) zu schicken. Die Entsorgung durch hadewe ist kostenlos. Die Geräte dürfen nicht bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben werden (WEEE-Reg.-Nr. DE20392713, b2b-Gerät). Bei im Ausland erworbenen hadewe-Geräten wenden Sie sich bitte an den Importeur.

Hinweis für die Behandlungsanlagen zur Geräteentsorgung

Bei der Demontage des Gerätes sind Schutzhandschuhe der Klasse 2 nach DIN EN 374-2 zu tragen. Zudem muss eine Atemschutzmaske nach EN 14683 Typ IIR oder EN 149 FFP 2 aufgesetzt werden.

Filterbeutel und Grobstaubfilter entsorgen

Es handelt sich beim Filterbeutel und Grobstaubfilter um gering kontaminierte Abfälle. Diese sind in undurchsichtigen, flüssigkeitsdichten, widerstandsfähigen Kunststoffsäcken zu sammeln und nicht gestaut dem Hausmüll beizulegen.

Bildzeichen



Vorsicht! Gefahr!



Wichtiger Hinweis!



Gebrauchsanweisung beachten!



Temperaturbegrenzung

(Hinweis auf eine obere und untere Temperaturgrenze)



Luftdruck: zulässiger Bereich



Luftfeuchtigkeit: zulässiger Bereich



Trocken halten!



Wechselstrom



Gleichstrom



Schmelzsicherung



Buchse Fußschalter



Herstellungsdatum

RAUE

Kosmetik- & Fußpflegebedarf

RAUE GmbH

Berkhopstr. 12

30938 Burgwedel

Tel.: 05139 / 98 14 0

www.raue-kosmetik.de