



Bedienungsanleitung

## Behandlungsliegen der Lina Select Podo-Serie



Lina Select Alu Podo



Lina Select Wood Podo



Lina Select Static Podo



Gharieni Group GmbH  
Gutenbergstraße 40  
47443 Moers

- |             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ➤ Telefon:  | +49 (0)2841/88300-0   |
| ➤ Fax:      | +49 (0)2841/88300-999 |
| ➤ Vertrieb: | +49 (0)2841/88300-300 |
| ➤ E-Mail:   | service@gharieni.com  |
| ➤ Web:      | www.gharieni.de       |

Bereich zum Notieren der **SERIENNUMMER**.  
Die Seriennummer befindet sich auf dem  
Typenschild (s. Kapitel 7. TYPENSCHILD).

## Vorwort

Sehr verehrte Kundin, sehr verehrter Kunde,

wir möchten Ihnen auf diesem Weg für den Kauf unseres Qualitätsprodukts und Ihr in uns gesetztes Vertrauen danken.

**Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie die Lina Select Podo zum ersten Mal verwenden.**

Das Lesen der kompletten Bedienungsanleitung ist für den ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch der Lina Select Podo unerlässlich und wird Ihnen dabei helfen, die Lina Select Podo zu Ihrer vollsten Zufriedenheit zu betreiben.

Unsere Lina Select Podo ist sehr robust und weist bei ordnungsgemäßer Verwendung eine lange Lebenszeit auf.

**Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und betreiben Sie die Lina Select Podo ausschließlich gemäß der in der Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendung.**

**Nur so schützen Sie Ihre Kunden und sich selbst vor Gefahren, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren.**

Verwahren Sie die Bedienungsanleitung immer griffbereit in der Nähe der Lina Select Podo.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG MUSS FÜR JEDE PERSON, WELCHE DIE LINA SELECT PODO BETREIBT, STETS ZUGÄNGLICH SEIN. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM BETRIEB DER BEHANDLUNGSLIEGE GELESEN UND VERSTANDEN WURDE.

**⚠️ WARNUNG!** Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gefährdet das Leben und die Gesundheit des Liegenbetreibers und des Kunden und / oder kann die Lina Select Podo beschädigen.

# Inhalt

1. Sicherheitshinweise.....	5
1.1 Abkürzungen.....	6
1.2 Signalwörter .....	6
1.3 Sicherheitsanweisungen.....	6
2. Bestimmungsgemäße Verwendung .....	13
3. Lieferumfang .....	13
4. Vorbemerkungen.....	13
5. Anlieferung und Auspacken .....	14
5.1 Anlieferung .....	14
5.2 Auspacken .....	14
6. Transport, Platzbedarf und Montage .....	15
6.1 Transport.....	15
6.2 Platzbedarf .....	15
6.3 Montage .....	15
7. Typenschild.....	16
8. QR-Code.....	17
9. Polsterung und Varianten der Basis .....	21
9.1 Polsterung.....	21
9.1.1 Standard-Polsterung (Kunstleder).....	21
9.1.2 Soft-Polsterung (Polyurethan).....	21
9.1.3 Super-Soft-Polsterung (Polyurethan) .....	22
9.2 Varianten der Basis.....	23
9.2.1 Lina Select Alu Podo .....	23
9.2.2 Lina Select Wood Podo.....	23
9.2.3 Lina Select Static Podo.....	24
10. Bedienung.....	25
10.1 Eigenschaften .....	25
10.2 Modellvarianten / Anzahl der Motoren .....	26
10.2.1 Lina Select Podo; 2-motorig .....	26
10.2.2 Lina Select Podo; 3-motorig .....	27
10.2.3 Lina Select Podo; 5-motorig .....	27
10.3 Vor dem ersten Gebrauch .....	28

10.4 Ansicht (Beispiel: Lina Select Alu Podo) .....	28
11. Elektrische Steuerung und Einstellungen .....	30
11.1 Elektrische Steuerung: Lina Select Podo; 2-motorig .....	30
11.1.1 Fußschalter (Standardsteuerung).....	30
11.2 Elektrische Steuerung: Lina Select Podo; 3-motorig .....	31
11.2.1 Handschalter (Standardsteuerung) .....	32
11.2.1.1 Sperrfunktion.....	35
11.2.1.2 Memory-Funktionen des Handschalters .....	37
11.3 Elektrische Steuerung: Lina Select Podo; 5-motorig .....	38
11.3.1 Handschalter (Standardsteuerung) .....	38
11.3.1.1 Sperrfunktion.....	42
11.3.1.2 Memory-Funktionen des Handschalters .....	44
11.3.2 Fußschalter Lina Select Podo 3 (optionale Steuerung) .....	45
11.3.2.1 Fußschalter mit Bluetooth (Lina Select Podo 3, optional).....	49
11.3.3 Fußschalter Lina Select Podo 5 (optionale Steuerung) .....	52
11.3.3.1 Fußschalter mit Bluetooth (Lina Select Podo 5, optional).....	56
11.4 Einstellung der Arbeitshöhe .....	59
11.5 Einstellung der Rückenlehne .....	60
11.6 Einstellung der Sitzneigung .....	62
11.7 Einstellung der Beinteile.....	63
11.7.1 Fußstützen.....	65
11.8 weitere Einstellmöglichkeiten .....	66
11.8.1 Kopfstütze.....	66
11.8.2 Armlehnen.....	67
11.8.3 Beinteile.....	67
11.8.4 Rückenlehne .....	68
12. Smart Thermo 3-Heizsystem der 2-motorigen Modellvariante (optionale Ausstattung) .....	69
12.1 Bedienung.....	71
13. Heizsystem 3- und 5-motorige Modellvariante (optionale Ausstattung) .....	75
13.1 Bedienung.....	77
14. Audio Relax-Kopfstütze (optionale Ausstattung) .....	80
15. Reset und Initialisierung (3- und 5-motorige Modellversion) .....	80
16. Reinigung und Pflege.....	82
16.1 Reinigung und Pflege des Außenmaterials der Polsterung .....	83
16.1.1 Reinigung und Pflege des Kunstleders .....	83

16.1.2 Reinigung und Pflege des Polyurethan - Materials (PU) .....	83
16.2 Reinigung des Gehäuses und der Armaturen.....	83
17. Betriebsstörungen (Ursachen und Fehlerbehebung).....	84
17.1 Reparatur.....	85
18. Optional bestellbares Zubehör.....	86
18.1 Rollensatz .....	86
18.2 XL-Verbreiterung .....	86
18.3 Fußrollen .....	87
18.4 Nackenstütze "Dentalax".....	87
18.5 Schonbezüge für Behandlungsliegen .....	88
19. Polsterpflege und -reinigungsmittel.....	89
19.1 Mikrozid® Sensitive (alkoholfrei).....	89
19.2 Skai Reiniger .....	91
20. Bedingungen für Transport, Lagerung und Betrieb.....	92
20.1 Transport.....	92
20.2 Umgebungsbedingungen für Lagerung und Transport .....	92
20.3 Umgebungsbedingungen für den Betrieb.....	92
21. Technische Daten .....	93
22. Entsorgung.....	95
23. Garantie.....	96
23.1 Garantiedauer .....	96
23.2 Garantieausschlüsse.....	96
24. EG-Konformitätserklärung.....	97
25. Ausgabestatus .....	98



Entsorgen Sie die Lina Select Podo nicht zusammen mit ihrem Hausmüll. Die Behandlungsliege darf nur über eine Sammelstelle für wiederverwendbare elektrische und elektronische Geräte entsorgt werden. Entfernen Sie nicht die Symbole / Aufkleber an der Lina Select Podo.

# 1. Sicherheitshinweise

---

Sie müssen bei der Bedienung elektrischer Produkte / Geräte - besonders dann, wenn sich Kinder in der Nähe befinden - immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der hier folgenden, einhalten:

**LESEN SIE VOR DER ERSTINBETRIEBNAHME  
DER LINA SELECT PODO DIE KOMPLETTEN  
SICHERHEITSHINWEISE UND SICHERHEITSANWEISUNGEN  
AUF DEN FOLGENDEN SEITEN.**

- **Alle darin enthaltenen Informationen dienen der Sicherheit des Liegenbetreibers. Wenn Sie die Sicherheitshinweise und Sicherheitsanweisungen ignorieren, gefährden Sie nicht nur Ihre Gesundheit und Ihr Leben, sondern auch die Gesundheit und das Leben Ihrer Kunden.**

STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE PERSONEN,  
DIE MIT DER GHARIENI BEHANDLUNGSLIEGE LINA SELECT PODO  
ARBEITEN, DIE KOMPLETTE BEDIENUNGSANLEITUNG GELESEN  
UND ALLE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN UND  
ANWEISUNGEN VERSTANDEN HABEN.

- Diese Bedienungsanleitung ist ein integraler Bestandteil des Produkts und muss zur möglichen Einsichtnahme während der Dienstzeit der Behandlungsliege sorgfältig an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Kopien dieser Bedienungsanleitung sind auf Anfrage erhältlich.
- Die Gharieni Group GmbH ist nicht für Schäden verantwortlich, die direkt oder indirekt an Personen, Tieren oder Gegenständen entstehen auf Grund einer Nichtbeachtung oder Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen.
- Bevor Sie eine Behandlungsliege oder ein beliebiges Altgerät entsorgen, **machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig!** Das bedeutet, Sie sollten immer den Netzstecker ziehen und danach das Stromanschlusskabel an der Behandlungsliege / am Gerät abschneiden und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen!

- ★ **Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass sie bei Bedarf jederzeit griffbereit ist. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise, um Unfälle oder eine Beschädigung der Behandlungsliege zu vermeiden.**

## 1.1 Abkürzungen

Lina Select Alu Podo Lina Select Wood Podo Lina Select Static Podo	In der Bedienungsanleitung allgemein <b>Lina Select Podo</b> genannt.
	➤ Bedienungshinweis / Tipp

## 1.2 Signalwörter

**⚠ GEFAHR!** verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

**⚠ VORSICHT!** verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleineren Verletzungen führen kann.

**⚠ WARNUNG!** verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

**HINWEIS!** verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung der Behandlungsliege / des Gerätes zur Folge hat.

## 1.3 Sicherheitsanweisungen

### **⚠ GEFAHR!**

#### **Zur Verringerung der Stromschlaggefahr:**

1. Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gefährdet das Leben und die Gesundheit des Liegenbetreibers und des Kunden und / oder kann die Behandlungsliege beschädigen.
2. Alle zum Anschluss an die Stromversorgung notwendigen elektrischen Arbeiten müssen von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) durchgeführt werden. Es dürfen keine Veränderungen an der Stromversorgung durchgeführt werden. Der Anschluss muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. **STROMSCHLAGEFAHR!**
3. Die Netzspannung und die Netzfrequenz **muss** den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.

4. Nehmen Sie **keine** Veränderungen oder Manipulationen an der Lina Select Podo und/oder deren Stromversorgung (Netzanschlusskabel / Netzstecker vor. Bei nicht autorisierten Veränderungen oder Manipulationen ist **jegliche** Gewährleistung der Gharieni Group GmbH ausgeschlossen.
5. Schließen Sie die Lina Select **keinesfalls** an die Stromversorgung an, wenn die Liege, das Netzanschlusskabel oder der Netzstecker sichtbare Beschädigungen aufweisen. STROMSCHLAGGEFAHR!
6. Das Netzanschlusskabel darf sich nicht unter der Liege befinden, außer es ist seitens der Gharieni Group GmbH ausdrücklich gestattet. STROMSCHLAGGEFAHR!
7. Das Netzanschlusskabel darf sich beim Anschließen und bei jeder Neupositionierung der Lina Select Podo niemals in direkter Nähe zum Motor befinden, da es ansonsten beim Betrieb des Motors beschädigt werden kann. STROMSCHLAGGEFAHR!
8. Rollen<sup>1</sup> Sie die Lina Select Podo niemals über das Netzanschlusskabel; andernfalls können Sie das Netzanschlusskabel nachhaltig beschädigen.
9. Versuchen Sie niemals selbst, die Lina Select Podo zu reparieren. Falls die Lina Select nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie die bitte unseren Kundendienst oder Ihren Händler. Lassen Sie nur Original-Ersatzteile einbauen.
10. Falls eine Reparatur oder ein Austausch des Netzanschlusskabels und / oder des Netzanschlussteckers notwendig sind, beauftragen Sie dafür **immer** eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) oder einen von der Gharieni Group GmbH autorisierten Kundendienst. Reparieren oder ersetzen Sie diese **niemals** selbst. STROMSCHLAGGEFAHR!
11. Trennen Sie die Lina Select Podo immer von der Stromversorgung, wenn Sie die Liege für einen längeren Zeitraum nicht mehr verwenden.
12. Trennen Sie die Lina Select Podo **vor** allen Pflege- und Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung. Ansonsten besteht STROMSCHLAGGEFAHR!
13. Benutzen Sie zum Ziehen des Netzsteckers **niemals** das Netzanschlusskabel. Ziehen Sie immer am Netzstecker selbst, um die Behandlungsliege von der Stromversorgung zu trennen. STROMSCHLAGGEFAHR!
14. Berühren Sie Netzanschlusstecker, Netzschalter oder andere elektrische Komponenten **niemals** mit nassen oder feuchten Händen. STROMSCHLAGGEFAHR

---

<sup>1</sup> Rollen = optionales Zubehör

15. Platzieren oder lagern Sie die Lina Select Podo nicht in der Nähe einer Flüssigkeitsquelle wie zum Beispiel einer Badewanne, einer Dusche oder eines Waschbeckens. Es besteht die Gefahr, dass die Liege mit Spritzwasser in Kontakt kommen könnte.  
**STROMSCHLAGGEFAHR!**

 **WARNUNG!**

**Zur Verringerung der Verbrennungsgefahr, Stromschlaggefahr, Feuergefahr oder von Personenschäden:**

1. Benutzen Sie ausschließlich eine ordnungsgemäß gesicherte Sicherheitssteckdose mit der entsprechenden Netzspannung und Netzfrequenz. Siehe Technische Daten und Typenschild.
2. **Die elektrischen Bauteile dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.**  
**STROMSCHLAGGEFAHR!**
3. Überprüfen Sie regelmäßig alle Kabel. Rufen Sie den Kundendienst an, wenn sich ein Kabel in einem nicht ordnungsgemäßen Zustand befindet. **STROMSCHLAGGEFAHR!**
4. Achten Sie darauf, dass das Netzanschlusskabel beim Bewegen der Behandlungsliege nicht beschädigt wird. Treten Sie nicht auf das Netzanschlusskabel. Überstrecken Sie das Netzanschlusskabel nicht.
5. Achten Sie darauf, dass Sie das Netzanschlusskabel während der Installation nicht übermäßig knicken oder einklemmen.
6. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachsteckleisten oder Adapter. **BRANDGEFAHR!**
7. Öffnen Sie **niemals** die Gehäuse der elektrischen Bedienfelder.  
**STROMSCHLAGGEFAHR!**
8. Es dürfen **keine** Flüssigkeiten in die elektrischen Bedienfelder eindringen. **STROMSCHLAGGEFAHR!**
9. Benutzen Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten für Behandlungen bzw. schütten Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten über, auf oder in die Lina Select Podo! Falls Wasser oder Flüssigkeiten über oder auf der Lina Select Podo verschüttet wurden, ziehen Sie **sofort** den Netzstecker und trocknen Sie die Lina Select Podo gründlich. **STROMSCHLAGGEFAHR!**
10. Tauchen Sie Teile der Lina Select Podo niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Achten Sie während der Reinigung der Behandlungsliege darauf, dass niemals Wasser in die Liege selbst oder deren Gehäuse eindringt. **STROMSCHLAGGEFAHR!**

11. Bei der Ausführung mit dem (Smart Thermo) Heizsystem<sup>2</sup> befinden sich die Kabel zwischen der Polsterung und dem Untergestell (modellabhängig). **Das Abnehmen der Polsterung darf nur durch von uns autorisierten Personen durchgeführt werden.**
12. **Nur für Modelle mit Softpolsterung / Super-Softpolsterung:**  
Zur Vermeidung von Hitzeschäden muss bei längerer Nutzung des Heizsystems (optionale Ausstattung) ein Spalt zwischen Rücken- und Sitzpolster vorhanden sein (s. Abb. unten), damit sich die beiden Heizelemente nicht berühren und somit addieren können. **VERBRENNUNGSGEFAHR!**



RICHTIG

FALSCH

13. Falls Ihre Lina Select Podo mit dem optional erhältlichen (Smart Thermo-)Heizsystem ausgestattet ist, dürfen keine schweren Decken, Kleidungsstücke o.Ä. auf die Polsterung gelegt werden während das Heizsystem eingeschaltet ist. Anderenfalls kann ein Hitzestau entstehen. **BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**  
**VERBRENNUNGSGEFAHR!**
14. **Menschen mit akuten Schmerzen, Venenleiden, niedrigem Blutdruck, entzündlichen Prozessen und anderen Krankheitsbildern, die Wärmeanwendungen oder diese Form der Kundenpositionierung bedenklich machen, müssen immer vor der Anwendung den Arzt konsultieren.**
15. **Verwenden Sie die Lina Select Podo niemals bei Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.**
16. Betreiben oder lagern Sie die Lina Select Podo **nur** an einem trockenen Ort.
17. Halten Sie die Lina Select Podo immer unter intensiver Beobachtung, wenn sie von, an oder in der Nähe von Kindern und / oder von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet wird.

<sup>2</sup> optionale Ausstattung

18. Die Lina Select Podo darf nur ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechend eingesetzt werden, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie keine Zubehörteile / Vorrichtungen, die nicht von der Gharieni Group GmbH empfohlen werden.
19. Betreiben Sie die Lina Select Podo nicht, wenn das Netzanschlusskabel oder der Netzstecker beschädigt sind, wenn die Lina Select Podo nicht ordnungsgemäß arbeitet, wenn sie beschädigt wurde oder wenn sie nass geworden ist. Geben Sie die Lina Select Podo zur Prüfung und Reparatur an einen von der Gharieni Group GmbH autorisierten Kundendienst.
20. Bei auftretenden Defekten oder Fehlfunktionen der Behandlungsliege muss **umgehend** Kontakt zum Kundenservice aufgenommen werden. Die Nutzung der Behandlungsliege **muss** eingestellt werden bis das Problem geklärt ist, um weitere Sach- und Personenschäden zu vermeiden.
21. Entfernen Sie **regelmäßig** eventuelle Staubanhaftungen am Netzanschlusstecker, an der Sicherheitssteckdose und an allen elektrischen Steckverbindungen, zum Beispiel mit einem handelsüblichen Staubsauger. **BRANDGEFAHR!**
22. Halten Sie das Netzanschlusskabel von erwärmten Flächen fern.
23. Legen oder setzen Sie niemals Objekte, gleich welcher Art, in irgendwelche(n) Öffnungen der Lina Select Podo ab oder ein.
24. Verwenden Sie die Lina Select Podo **niemals** im Freien.
25. Stellen Sie sicher, dass der Lina Select Podo ausschließlich von dazu ermächtigten Personen betrieben wird.
26. Achten Sie darauf, dass die Lina Select Podo bei Betrieb auf einer waagerechten Fläche steht.
27. Legen oder stellen Sie niemals Gegenstände oder Flüssigkeiten, jedweder Art, auf die Lina Select Podo. Die Liege sowie das Material könnten dadurch beschädigt werden.  
**STROMSCHLAGGEFAHR! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**
28. Sämtliche Reparatur- oder Wartungsarbeiten dürfen **nur** durch von der Gharieni Group GmbH autorisiertem Personal durchgeführt werden. **STROMSCHLAGGEFAHR! BRANDGEFAHR!**
29. Verwenden Sie zur Reinigung **niemals** einen Dampfreiniger.  
**STROMSCHLAGGEFAHR!**
30. Stützen oder stellen Sie sich nicht auf einen beliebigen Bereich der Liegefläche oder der Stützkonstruktion der Lina Select Podo. Üben Sie keine größere physikalische Kraft auf die genannten Teile aus; ansonsten können Sie die Stützkonstruktion der Lina Select Podo nachhaltig beschädigen. **KIPPGEFAHR! BRUCHGEFAHR! VERLETZUNGSGEFAHR!**

31. Durch das hohe Eigengewicht der Liege kann trotz SPLINE-FUNKTION eine Verletzung nicht ausgeschlossen werden; deshalb ist stets darauf zu achten, dass sich keine Körperteile oder Gegenstände unter der Liege befinden. VERLETZUNGSGEFAHR!  
QUETSCHGEFAHR!
32. Es dürfen sich beim Verstellen der Liegefläche **keine** Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände zwischen der Basis bzw. Stützkonstruktion und der Liegefläche befinden. QUETSCHGEFAHR!
33. Achten Sie bei der Einstellung der Behandlungsposition immer darauf, dass sich keine Körperteile oder Gegenstände zwischen den Liegenteilen befinden. QUETSCHGEFAHR!
34. Benutzen Sie die Stützkonstruktion **nicht** als Fußstütze.  
QUETSCHGEFAHR
35. Falls die Lina Select Podo mit Rollen ausgestattet ist<sup>3</sup>, achten Sie immer darauf, dass die Bremsen der Rollen ordnungsgemäß arretiert sind. Falls die Bremsen der Rollen nicht ordnungsgemäß arretiert sind, besteht WEGROLLGEFAHR!
36. Bewegen Sie die Lina Select Podo nicht auf den Rollen<sup>4</sup> solange sich Personen oder Lasten auf der Lina Select Podo befinden; ansonsten beschädigen Sie die Konstruktion bzw. den Unterbau der Lina Select Podo sowie die Rollen. VERLETZUNGSGEFAHR!  
BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!
37. Die Lina Select Podo darf **niemals** (weder mit noch ohne Rollen<sup>5</sup>) zum Transport von Personen oder schweren Lasten verwendet werden. VERLETZUNGSGEFAHR! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!
38. Achten Sie beim Auspacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung **nicht** in die Reichweite von Kindern, Tieren oder Menschen mit verringerten mentalen Fähigkeiten gelangen. VERLETZUNGSGEFAHR! ERSTICKUNGSGEFAHR!
39. Halten Sie Kinder und Tiere grundsätzlich außer Reichweite der Lina Select Podo.
40. Kinder dürfen **niemals** mit der Lina Select Podo oder deren einzelnen Bestandteilen spielen.
41. Die Lina Select Podo darf nicht von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie nicht beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Behandlungsliege unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

---

<sup>3</sup> optionales Zubehör

<sup>4</sup> optionales Zubehör

<sup>5</sup> optionales Zubehör

## HINWEIS!

1. Aus Sicherheitsgründen bewegt sich die Behandlungsliege nur, solange Sie eine der Tasten des Handschalters oder eines oder mehrere Pedale/Tasten des jeweiligen optionalen Fußschalters<sup>6</sup> drücken. Beim Loslassen wird die Bewegung sofort gestoppt.
2. Stützen, stellen oder knien Sie sich niemals auf einen beliebigen Bereich der Liegefläche. Üben Sie keine größere physikalische Kraft auf die Liegefläche aus; ansonsten können Sie die Polsterung der Lina Select Podo nachhaltig beschädigen. **BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**
3. Lehnen Sie sich nicht gegen die Armlehnen oder die Kopfstütze! Stellen, setzen oder knien Sie sich niemals auf die Armlehnen oder auf die Kopfstütze! **BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**
4. Die maximale Belastbarkeit der Armlehnen beträgt 25 kg.
5. Um eine nicht autorisierte Benutzung der 3- und 5-motorigen Modellvariante zu verhindern, sperren Sie bei Verlassen des Behandlungsraumes **immer** manuell die Antriebe mittels des Handschalters oder mittels des optionalen Fußschalters. Standardmäßig ist keine automatische Sperrung eingestellt. Sie können selbst entscheiden, ob Sie dies ändern. Eine manuelle Sperrung beeinträchtigt den aktuell laufenden Heizzyklus **nicht** und hat **keine Auswirkung auf die Bedienung des Heizsystems**. Der aktuell laufende Heizzyklus ist von einer automatischen Sperrung **nicht beeinträchtigt**.
6. Das Typenschild darf niemals unleserlich gemacht oder entfernt werden! **Zu widerhandlungen führen zum Garantieausschluss!**

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG GRÜNDLICH DURCH UND  
BEWAHREN SIE DIESE SICHER AUF.

---

<sup>6</sup> Ausstattung abhängig vom Modell

## 2. Bestimmungsgemäße Verwendung

---

- i** Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Behandlungsliege darf **nur** der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechend eingesetzt werden.
- ❖ Die Gharieni Lina Select Podo ist **kein** Medizinprodukt.
- ❖ Bei der Lina Select Podo handelt es sich um eine Behandlungsliege, die sowohl speziell für Behandlungen im Bereich der Fußpflege (Pediküre, podologische Behandlungen) als auch für vielseitige kosmetische Behandlungen geeignet ist. **Ein anderer Gebrauch ist nicht zulässig und beeinträchtigt die Garantieansprüche.**
- ❖ Die Lina Select Podo ist **nur** für die Verwendung in geschlossenen Räumen mit definierten Umgebungsbedingungen bestimmt.  
Siehe Kapitel 20. BEDINGUNGEN FÜR TRANSPORT, LAGERUNG UND BETRIEB.

**★ Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen wird keinerlei Haftung für Personen- oder Materialschäden übernommen.**

## 3. Lieferumfang

---

- 1 BEHANDLUNGSLIEGE **Lina Select Podo** in gewünschter Ausführung und Ausstattung
  - 1 FUBSCHALTER oder 1 HANDSCHALTER (je nach Modellvariante)
  - 1 BEDIENUNGSANLEITUNG
- i** Falls Sie beim Kauf **optionales Zubehör** für Ihre Behandlungsliege erworben haben, ist dieses **ebenfalls im Lieferumfang enthalten.**

## 4. Vorbemerkungen

---


- ❖ Die Gharieni Behandlungsliege Lina Select Podo unterliegt hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards.
- ❖ Überzeugen Sie sich vor dem ersten Gebrauch davon, dass alle Teile vorhanden sind und keine sichtbaren Schäden aufweisen.
- ❖ Stellen Sie sicher, dass die Steckdose für die Behandlungsliege ordnungsgemäß geerdet ist und die richtige Netzspannung und Netzfrequenz hat, siehe Typenschild.

## 5. Anlieferung und Auspacken

---

### 5.1 Anlieferung

- ❖ Achten Sie vor dem Aufbau darauf, dass für die Lina Select Podo genügend Platz vorgesehen ist, damit sie auch in vollständig ausgeklapptem Zustand nirgends anstößt.
- ❖ Die Liegen werden in Kartons an den Kunden. Dabei ist das Beinteil um 90° nach unten geklappt (siehe Abbildung unten).

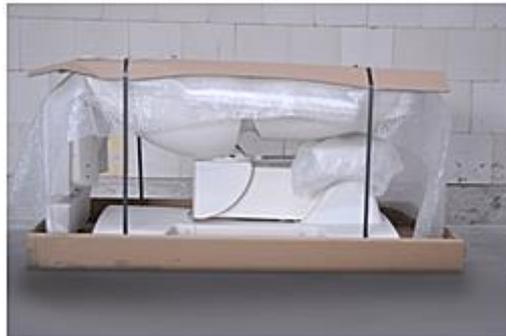

*Abb. ähnlich: Abb. dient ausschließlich als Beispiel.*

### 5.2 Auspacken

**⚠️ WARNUNG!** Achten Sie beim Auspacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung nicht in die Reichweite von Kindern und Tieren gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR! VERLETZUNGSGEFAHR!**

**BEI ANLIEFERUNG DER LINA SELECT PODO  
IN EINEM KARTON BITTE FOLGENDES BEACHTEN:**

- Öffnen Sie vorsichtig die Oberseite des Kartons. Benutzen Sie dabei keine scharfen Gegenstände, welche die Polsterung beschädigen könnten.
- Heben Sie die Liege **nicht** hoch, **sondern** entfernen Sie **erst** die obere Abdeckung der Kartonage. Danach können Sie die Umhüllung hochziehen und zur Seite legen.
- Die Kopfstütze ist im gleichen Karton verpackt. Sie muss noch angebracht werden. Bitte lesen Sie dazu das Kapitel 11.8.1 über die KOPFSTÜTZE in dieser Bedienungsanleitung.
- Tragen Sie die Liege **ausschließlich** an der Basis / Stützkonstruktion. Die Transportsicherung (2 Bänder / falls vorhanden) vor Inbetriebnahme der Liege entfernen.

## 6. Transport, Platzbedarf und Montage

---

### 6.1 Transport

- ❖ Heben Sie die Lina Select Podo bei einem Transport **ausschließlich** an der Basis (Stützkonstruktion) an.
- ❖ Heben Sie die Lina Select Podo bei einem Transport **niemals** an der Sitzfläche / Liegefläche oder den Armlehnen an; ansonsten können Sie die Lina Select Podo ernsthaft beschädigen.
- ❗ Ein Transport der Lina Select Podo kann durch ungünstige Umgebungsverhältnisse z.T. stark beeinträchtigt werden. Solche ungünstigen Umgebungsverhältnisse sind z.B. enge Türen, schmale Ecken hinter Türen, enge Gänge, enge Treppenaufgänge, Wendeltreppen etc. Das Gewicht der Lina Select Podo beträgt ca. 75 - 80 kg (ohne Optionen). Bitte beachten Sie, dass die Manövrierbarkeit der Lina Select Podo somit begrenzt ist.

### 6.2 Platzbedarf

- ❖ Achten Sie vor dem Aufbau darauf, dass für die Liege genügend Platz vorgesehen ist, damit sie auch in vollständig ausgeklapptem Zustand sowie beim Drehen nirgends anstößt.
- Der **Mindestplatzbedarf** der Lina Select Podo beträgt:  
Länge = mind. 202 cm \* Breite = mind. 80 cm.

**HINWEIS!** Haben Sie einen geeigneten Stellplatz mit genügend Raum für die Liege gefunden, so entfernen Sie gegebenenfalls die Tragehilfe<sup>7</sup> und bewahren Sie diese für einen evtl. späteren Transport gut auf!

### 6.3 Montage

- ❖ Die Behandlungsliege ist bereits mit wenigen Handgriffen voll einsatzfähig. Sie lässt sich flexibel an jede Körpergröße anpassen. Je nach Verwendungszweck können Sie die gewünschte Position elektrisch in sehr kurzer Zeit einstellen und sich dann ganz auf Ihre Kunden konzentrieren.

---

<sup>7</sup> Ausstattung abhängig vom Modell

## VERSTELLBARE STANDFÜßE INKL. STELSCHRAUBEN

- ❖ Verwenden Sie zur ordnungsgemäßen Ausrichtung der Lina Select Podo die verstellbaren Standfüße. Für den ordnungsgemäßen Betrieb, **muss** sich die Lina Select Podo in einer **stabilen und ebenen Position** befinden. Damit die Lina Select Podo nicht wackelt, **müssen** die 4 Standfüße fest auf dem Boden stehen. Justieren Sie die Standfüße mit Hilfe der Stellschrauben dementsprechend.

**⚠️ WARNUNG!** Bei der Ausführung mit dem Heizsystem<sup>8</sup> befinden sich die Kabel zwischen der Polsterung und dem Untergestell (modellabhängig). **Das Abnehmen der Polsterung darf nur durch von uns autorisierten Personen durchgeführt werden.**

**HINWEIS!** Ist der Fußboden nicht ganz eben, **muss** eventuell die Standfestigkeit durch Verstellen der Regulierungsschraube(n)<sup>9</sup> dem Boden angepasst werden.

## 7. Typenschild

---

- ❖ Das Typenschild befindet sich für gewöhnlich an der Basis (Stützkonstruktion) der Lina Select Podo (Änderungen vorbehalten).
- i** Das Typenschild darf niemals entfernt oder unleserlich gemacht werden! **Zuwerhandlungen führen zum Garantiausschluss!**



Falls Sie bezüglich Ihrer Behandlungsliege Kontakt mit dem Gharieni Kundendienst aufnehmen möchten, empfehlen wir Ihnen, das Typenschild vorher zu fotografieren (z.B. mit einem Mobiltelefon oder einer Digitalkamera). So können Sie die Angaben auf dem Typenschild (z.B. die Seriennummer der Behandlungsliege) leichter erkennen und dem Kundendienst die benötigten Informationen mitteilen. Auf dem Deckblatt dieser Bedienungsanleitung befindet sich ein freies Feld, in dem Sie die Seriennummer Ihrer Behandlungsliege eintragen können. So haben Sie die Seriennummer stets griffbereit.

---

<sup>8</sup> optionale Ausstattung

<sup>9</sup> Ausstattung abhängig vom Modell

## 8. QR-Code



Im Servicefall können Sie mittels der OCR-Scan-Funktion eines geeigneten Endgeräts (z.B. mit einem Smartphone) den QR-Code scannen. Es öffnet sich dann via Internetbrowser Ihres Endgeräts ein Formular, das bereits automatisch die Seriennummer Ihrer Lina Select Podo enthält. Bitte schildern Sie dort Ihr Problem und geben Ihre Daten an. Sie haben die Möglichkeit, eine Datei von Ihrem Gerätespeicher anzuhängen oder mit Ihrem Endgerät ein Foto aufzunehmen und dieses anzuhängen. Tippen Sie hierzu auf die Schaltfläche „Datei auswählen“. Es öffnet sich dann ein Fenster mit Optionen. Das Erscheinungsbild dieses Fensters kann je nach Endgerät und Betriebssystem von der Abbildung abweichen. Nachdem Sie durch Setzen des Hakens im Kästchen am Ende des Formulars bestätigt haben, unsere Datenschutzrichtlinien gelesen zu haben, wird das Formular mit allen von Ihnen getätigten Eingaben mit einem Klick auf „Senden“ umgehend an unseren Kundendienst übermittelt.

- ❖ Der QR-Code befindet sich an der Basis (Stützkonstruktion) der Lina Select Podo.



**B**

**B**

QR-CODE

(Abb. ähnlich: Abb. dient ausschließlich als Beispiel, Position kann abweichen)

Serial number (Complete as written on nameplate) /

Seriennummer (Komplett wie im Typenschild) /

Numéro de série (Complet comme inscrit sur la plaque d'identification)

KoM4-3A-M1-SUPERSOFT-SM-RAL9007-0530

Please describe the issue\* (Required Field) /

Bitte schildern Sie das Problem\* (Pflichtfeld) /

Veuillez s'il vous plait décrire le problème\* (Champ obligatoire)

Add file: / Datei hinzufügen: / Ajoutez un fichier:

Datei auswählen Keine ausgewählt

**Your address / Ihre Adresse / Votre adresse**

First and last name\* (Required Field) /

Vor- und Zuname\* (Pflichtfeld) /

Prénom et nom\* (Champ obligatoire)

Company / Firma / Entreprise

Street adress /

Strasse und Hausnummer /

Rue et numéro de rue

ZIP Code\* (Required Field) /

Postleitzahl\* (Pflichtfeld) /

*Abb. zeigt Formular, das sich nach dem Scannen des QR-Codes im Internetbrowser des Endgeräts öffnet.*

Code postal\* (Champ obligatoire)

City\* (Required Field) /  
Stadt\* (Pflichtfeld) /  
Ville\* (Champ obligatoire)


E-Mail-Adress\* (Required Field) /  
E-Mail-Adresse\* (Pflichtfeld) /  
Votre adresse e-mail\* (Champ obligatoire)

Phone number\* (Required Field) /  
Telefonnummer\* (Pflichtfeld) /  
Téléphone\* (Champ obligatoire)

I read the privacy policy of the Gharieni Group.  
Ich habe die [Datenschutzrichtlinien](#) der Gharieni Group gelesen.< /br> J'ai lu la [protection des données](#) du Groupe Gharieni.

SEND

*Abb. zeigt Formular, das sich nach dem Scannen des QR-Codes im Internetbrowser des Endgeräts öffnet.*

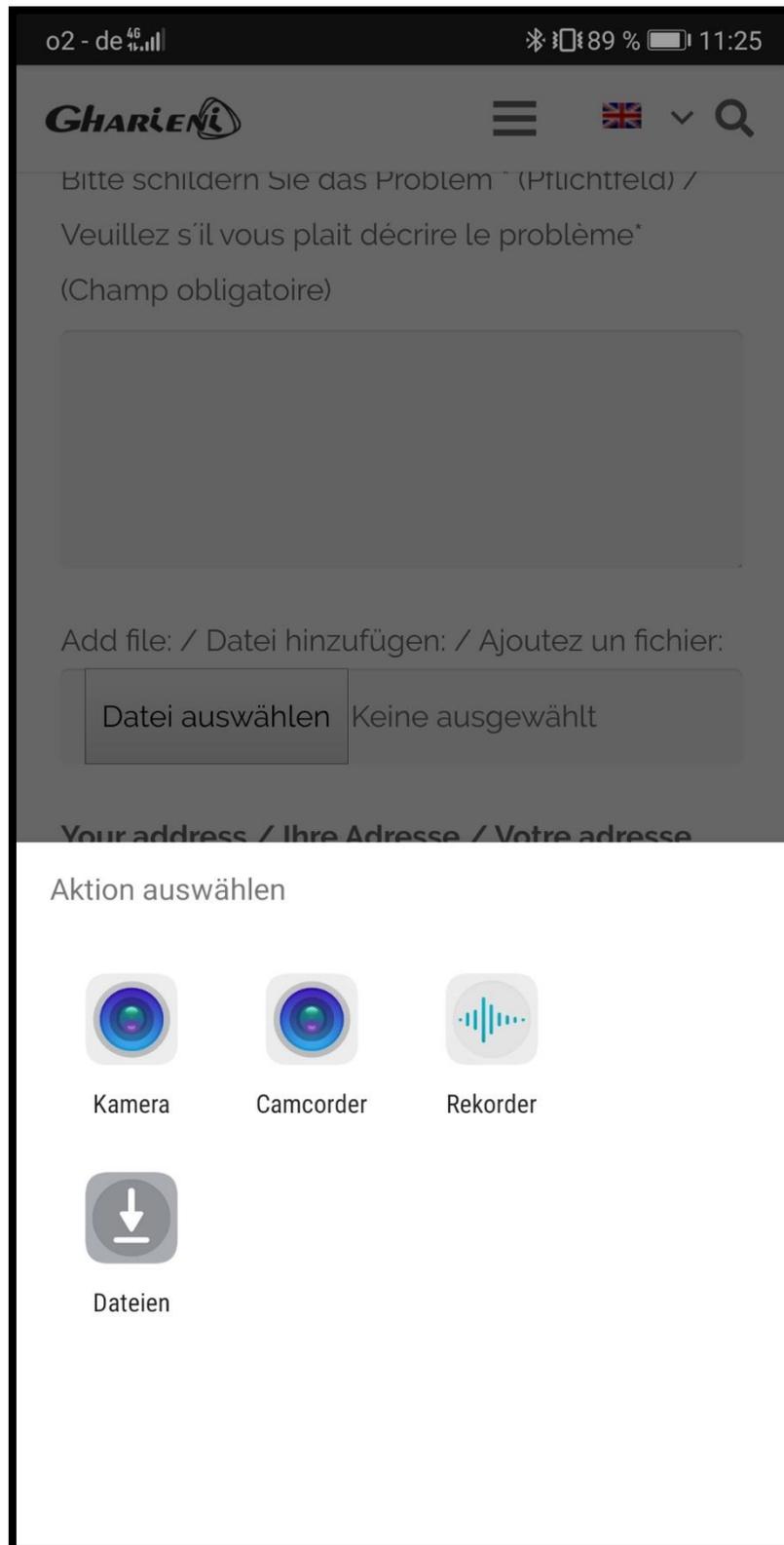

*Abb. ähnlich: Optionsfenster zum Hinzufügen einer Datei.  
Erscheinungsbild kann je nach Endgerät und Betriebssystem abweichen.*

## 9. Polsterung und Varianten der Basis

---

### 9.1 Polsterung

- ❖ Die Lina Select Podo ist in **drei** Polstervarianten erhältlich.

#### 9.1.1 Standard-Polsterung (Kunstleder)

- ❖ Die Standard-Polsterung der Lina Select Podo ist eine komfortable und qualitativ hochwertige Polsterung; (s. Abb. unten).
- ❖ Das Außenmaterial der Standard-Polsterung besteht aus KUNSTLEDER und ist in vielen Farben aus unseren zwei Farbkollektionen erhältlich.
- ❖ Das Innenmaterial der Polsterung besteht aus hochwertigem Schaumstoff.
- ❖ Die Standard-Polsterung ist mit einem **AIRBACK®** für die Lordoseunterstützung ausgestattet, der sich in der Rückenlehne befindet; siehe auch Kapitel 11.8.4 RÜCKENLEHNE.



*Abb. ähnlich: Farbe, Ausführung und Ausstattung können je nach Modell variieren.*

#### 9.1.2 Soft-Polsterung (Polyurethan)

- ❖ Die Soft-Polsterung der Lina Select Podo ist eine weiche, komfortable und qualitativ hochwertige Polsterung; s. Abb. unten.
- ❖ Das Außenmaterial dieser Polsterung besteht aus POLYURETHAN (PU) und ist in verschiedenen Farben aus unserer Farbkollektionen für PU Polster erhältlich.
- ❖ Das Innenmaterial der Polsterung besteht aus hochwertigem Schaumstoff.
- ❖ Die Soft-Polsterung ist im Vergleich zur Standard-Polsterung weicher gepolstert. Sie ist mit einem **AIRBACK®** für die Lordoseunterstützung ausgestattet, der sich in der Rückenlehne befindet; siehe auch Kapitel 11.8.4 RÜCKENLEHNE.

- ❖ POLYURETHAN (PU) ist nicht nur viel elastischer und daher gefühlt „weicher“, sondern auch viel pflegeleichter als Kunstleder. Es ist wasserundurchlässig, ölundurchlässig und bis 95 °C abwaschbar / waschbar.



*Abb. ähnlich: Farbe, Ausführung und Ausstattung können je nach Modell variieren.*

### 9.1.3 Super-Soft-Polsterung (Polyurethan)

- ❖ Die Super-Softpolsterung der Lina Select Podo ist eine komfortable, qualitativ hochwertige, besonders weiche und dicke Polsterung; s. Abb. unten.
- ❖ Das Außenmaterial dieser Polsterung besteht aus POLYURETHAN (PU) und ist in verschiedenen Farben aus unserer Farbkollektionen für PU Polster erhältlich.
- ❖ Das Innenmaterial der Polsterung besteht aus hochwertigem Schaumstoff.
- ❖ Die Super-Softpolsterung ist im Vergleich zur Softpolsterung **noch** dicker und weicher gepolstert. Sie ist mit einem **AIRBACK©** für die Lordoseunterstützung ausgestattet, der sich in der Rückenlehne befindet; siehe auch Kapitel 11.8.4 RÜCKENLEHNE.
- ❖ POLYURETHAN (PU) ist nicht nur viel elastischer und daher gefühlt „weicher“, sondern auch viel pflegeleichter als Kunstleder. Es ist wasserundurchlässig, ölundurchlässig und bis 95 °C abwaschbar / waschbar.



*Abb. ähnlich: Farbe, Ausführung und Ausstattung können je nach Modell variieren.*

## 9.2 Varianten der Basis

- ❖ Die Lina Select Podo ist in **drei** Basis-Varianten erhältlich.

### 9.2.1 Lina Select Alu Podo

- ❖ Die Basis der **Lina Select Alu Podo** besteht aus einem stabilen aluminiumverkleideten Fuß, welcher durch die seitlichen Holz- **oder** Kunstlederapplikationen einen dekorativen Blickfang bietet.



*Abbildung ähnlich: Farbe, Polsterung und Ausführung können je nach Modell variieren.*

1

ALUMINIUMVERKLEIDETE BASIS MIT APPLIKATION

### 9.2.2 Lina Select Wood Podo

- ❖ Die Basis der **Lina Select Wood Podo** besteht aus einem stabilen und eleganten Fuß aus Holz.



*Abbildung ähnlich: Farbe, Polsterung und Ausführung können je nach Modell variieren.*

1

BASIS MIT HOLZ-DEKOR

### 9.2.3 Lina Select Static Podo

- ❖ Die Basis der **Lina Select Static Podo** wird mit Schrauben fest im Boden verankert. Diese Art der Installation bietet großzügige Beinfreiheit bei maximaler Stabilität.



*Abbildung ähnlich: Farbe, Polsterung und Ausführung können je nach Modell variieren.*

**1**

**BASIS INKL. SCHRAUBEN**

## 10. Bedienung

---

**⚠️ WARNUNG!** Setzen Sie sich niemals auf das Kopfteil oder die Armlehnen.

**⚠️ WARNUNG!** Üben Sie, unabhängig von der Liegeflächeneinstellung, keinesfalls physikalische Kraft auf die oben benannten Bauteile aus. Bei Missachtung dieser Anweisung kann die Stützkonstruktion der Lina Select Podo dauerhaft beschädigt werden. **KIPPGEFAHR!**  
**BRUCHGEFAHR! VERLETZUNGSGEFAHR!**

### 10.1 Eigenschaften

- ❖ Die Gharieni Lina Select Podo ist eine Behandlungsliege mit wahlweise zwei, drei oder fünf Motoren (s. Kapitel 10.2 MODELLVARIANTEN / ANZAHL DER MOTOREN), mit denen Sie die Liege über einen Fußschalter oder einen Handschalter ganz flexibel nach Ihren Wünschen einstellen können:
  - i** 2-motorige Modellvariante: inkl. eines Fußschalters
  - i** 3-motorige Modellvariante: inkl. eines Handschalters; ein entsprechender Fußschalter und ein Fußschalter mit Bluetooth sind optional gegen Aufpreis erhältlich
  - i** 5-motorige Modellvariante: inkl. eines Handschalters; ein entsprechender Fußschalter und ein Fußschalter mit Bluetooth sind optional gegen Aufpreis erhältlich.
- ❖ Die Arbeitshöhe und die Sitzneigung sind in **allen** Modellvarianten elektrisch verstellbar.
- ❖ Die Rückenlehne und die Beinteile sind bei der 5-motorigen Modellvariante elektrisch verstellbar; bei der 2- motorigen Modellvariante sind die Rückenlehne und die Beinteile pneumatisch verstellbar. Bei der 3-motorigen Modellvariante ist die Rückenlehne elektrisch verstellbar, die Verstellung der Beinteile erfolgt pneumatisch, s. Kapitel 11. ELEKTRISCHE STEUERUNG UND EINSTELLUNGEN. Die in der 2-und 3-motorigen Modellvariante **nicht** motorbetriebenen Bereiche lassen sich durch Betätigung der entsprechenden Gasdruckfedern mittels der zugehörigen Hebel pneumatisch verstellen.
- ❖ Die Kopfstütze ist manuell ausziehbar und kann komplett herausgenommen werden.
- ❖ Die Fußstützen sind manuell ausziehbar und können ebenfalls komplett herausgenommen werden.
- ❖ Die Lina Select Podo ist standardmäßig ebenfalls mit einem mechanischen AIRBACK© für die Lordose Unterstützung ausgestattet, der sich in der Rückenlehne befindet; s. Kapitel 11.8.4 RÜCKENLEHNE.

- ❖ Die Armlehnen der Lina Select sind **beidseitig** gepolstert und erlauben ein angenehmes und komfortables Ablegen der Arme.
- ❖ Die maximale Hebekraft der Lina Select Podo beträgt ca. 200 kg.
- ❖ Die maximale Belastbarkeit der Sitz-/Liegefläche beträgt ca. 250 kg.
- ❖ Die maximale Belastbarkeit der Armlehnen beträgt 25 kg.
- ❖ Die Einstiegshöhe der Lina Select Podo mit Soft-Polsterung oder Super-Soft-Polsterung beträgt aufgrund der dickeren Polsterung mind. **+ 5 cm** gegenüber der Standard-Polsterung.

## 10.2 Modellvarianten / Anzahl der Motoren

- ❖ Die Behandlungsliegen der Gharieni Lina Select Podo-Baureihe sind wahlweise mit zwei, drei oder fünf Motoren ausgestattet (je nach gewünschter Ausführung), mit denen Sie die Liege über einen Fußschalter, einen Fußschalter mit Bluetooth (Lina Select Podo 3 und 5) oder einen Handschalter ganz flexibel nach Ihren Wünschen einstellen können.
  - ❖ Die ARBEITSHÖHE und die SITZNEIGUNG sind in **allen** Modellvarianten elektrisch verstellbar.
  - ❖ Die in der 2- und 3-motorigen Modellvariante **nicht** motorbetriebenen Bereiche (RÜCKENLEHNE / BEINTEILE) lassen sich durch Betätigung der entsprechenden Gasdruckfedern mittels Hebel pneumatisch verstellen.
- Siehe auch Kapitel 11. ELEKTRISCHE STEUERUNG UND EINSTELLUNGEN ff.

### 10.2.1 Lina Select Podo; 2-motorig

LINA SELECT PODO; 2-MOTORIG	
Hubsäule	Elektrische HÖHENVERSTELLUNG.
Motor 1	SITZNEIGUNG elektrisch verstellbar.

- Die **elektrischen Einstellungen** der 2-motorigen Lina Select Podo erfolgen durch einen **Fußschalter**; s. Kapitel 11. ELEKTRISCHE STEUERUNG UND EINSTELLUNGEN ff.
- Die **verbleibenden nicht motorbetriebenen Bereiche** (RÜCKENLEHNE und BEINTEILE) werden durch Betätigung der entsprechenden Gasdruckfedern mittels Hebel (einer je Beinteil) pneumatisch verstellt.

### 10.2.2 Lina Select Podo; 3-motorig

LINA SELECT PODO; 3-MOTORIG	
<b>Hubsäule</b>	Elektrische HÖHENVERSTELLUNG.
<b>Motor 1</b>	RÜCKENNEIGUNG elektrisch verstellbar.
<b>Motor 2</b>	SITZNEIGUNG elektrisch verstellbar.

- Die **elektrischen Einstellungen** der 3-motorigen Lina Select Podo erfolgen durch einen Handschalter; s. Kapitel 11. ELEKTRISCHE STEUERUNG UND EINSTELLUNGEN ff. Ein entsprechender Fußschalter und ein Fußschalter mit Bluetooth sind **optional** gegen Aufpreis erhältlich; siehe auch Kapitel 11.3.2 FUßSCHALTER (optionale Steuerung) und Kapitel 11.3.2.1 FUßSCHALTER MIT BLUETOOTH.
- Die **verbleibenden nicht motorbetriebenen Bereiche** (BEINTEILE) der LINA SELECT PODO 3 werden durch Betätigung der entsprechenden Gasdruckfedern mittels Hebel (einer je Beinteil) pneumatisch verstellt.
- Der Handschalter der LINA SELECT PODO 3 ist mit **zwei** Memory-Positionen für individuell einstell- und speicherbare Positionen ausgestattet; siehe auch Kapitel 11.2.1.2 MEMORY-FUNKTIONEN DES HANDSCHALTERS.

### 10.2.3 Lina Select Podo; 5-motorig

LINA SELECT PODO; 5-MOTORIG	
<b>Hubsäule</b>	Elektrische HÖHENVERSTELLUNG.
<b>Motor 1</b>	SITZNEIGUNG elektrisch verstellbar
<b>Motor 2</b>	RÜCKENLEHNE elektrisch verstellbar.
<b>Motor 3 / Motor 4</b>	BEINTEILE elektrisch verstellbar.

- **Alle Bereiche** der Lina Select Podo 5 sind elektrisch verstellbar.
- Die **elektrischen Einstellungen** erfolgen durch einen Handschalter; s. Kapitel 11. ELEKTRISCHE STEUERUNG UND EINSTELLUNGEN ff. Ein entsprechender Fußschalter ist **optional** gegen Aufpreis erhältlich; siehe auch Kapitel 11.3.3. FUßSCHALTER (OPTIONALE STEUERUNG) und Kapitel 11.3.3.1 FUßSCHALTER MIT BLUETOOTH.
- Der Handschalter Lina Select Podo 5 ist mit **zwei** Memory-Positionen ausgestattet; siehe auch Kapitel 11.3.1.2 MEMORY-FUNKTIONEN DES HANDSCHALTERS.

### 10.3 Vor dem ersten Gebrauch

- Überzeugen Sie sich vor dem ersten Gebrauch davon, dass alle Teile vorhanden sind (s. Kapitel 3. LIEFERUMFANG) und keine sichtbaren Schäden aufweisen.
- Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitssteckdose für die Behandlungsliege ordnungsgemäß geerdet ist und die richtige Stromspannung aufweist. Siehe Technische Daten und Typenschild.

### 10.4 Ansicht (Beispiel: Lina Select Alu Podo)



Abb. ähnlich: Farbe, Polsterung und Ausführung können je nach Modell variieren.

<b>1</b>	<b>BASIS</b> (Stützkonstruktion)
<b>2</b>	<u>Vorrichtung der elektrischen <b>HÖHENVERSTELLUNG</b>:</u> ➤ Die Arbeitshöhe ist elektrisch verstellbar. ➤ siehe auch Kapitel 11.4 EINSTELLUNG DER ARBEITSHÖHE.
<b>3</b>	<u>Vorrichtung der elektrisch verstellbaren <b>SITZNEIGUNG</b>:</u> ➤ Die Sitzneigung ist elektrisch verstellbar. ➤ siehe auch Kapitel 11.6 EINSTELLUNG DER SITZNEIGUNG.
<b>4</b>	<b>SITZFLÄCHE</b>

<b>5</b>	<p><b><u>RÜCKENLEHNE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ elektrisch verstellbar.</li> <li>➤ mechanischer AIRBACK®.</li> <li>➤ siehe auch Kapitel 11.8.4 RÜCKENLEHNE.</li> <li>➤ siehe auch Kapitel 11.5 EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE.</li> </ul>
<b>6</b>	<p><b><u>KOPFSTÜTZE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ manuell ausziehbar; abnehmbar.</li> <li>➤ siehe auch Kapitel 11.8.1 KOPFSTÜTZE.</li> </ul>
<b>7</b>	<p><b><u>ARMLEHNEN:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ beidseitig gepolstert; hoch- bzw. zurückklappbar.</li> <li>➤ siehe auch Kapitel 11.8.2 ARMLEHNEN.</li> </ul>
<b>8</b>	<p><b><u>BEINTEILE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zwei separate Beinteile.</li> <li>➤ elektrisch verstellbar.</li> <li>➤ siehe auch Kapitel 11.8.3 BEINTEILE.</li> <li>➤ siehe auch Kapitel 11.7 EINSTELLUNG DER BEINTEILE.</li> </ul>
<b>9</b>	<p><b><u>FUßSTÜTZEN:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zwei separate Fußstützen.</li> <li>➤ manuell ausziehbar; abnehmbar.</li> <li>➤ siehe auch Kapitel 11.8.3 BEINTEILE.</li> <li>➤ siehe auch Kapitel 11.7.1 FUßSTÜTZEN.</li> </ul>
<b>10</b>	<p><b><u>VERSTELLBARE STANDFÜßE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ insgesamt 4; inkl. Stellschrauben.</li> <li>➤ siehe auch Kapitel 6.3 MONTAGE.</li> </ul>

## 11. Elektrische Steuerung und Einstellungen

---

- i** Die Motoren der Lina Select Podo sind mit der **SPLINE-FUNKTION** ausgestattet. Die **SPLINE-FUNKTION** bewirkt, dass Motoren nur eine Hubbewegung vollziehen. Das Senken funktioniert durch Eigengewicht.

**⚠️ WARNUNG!** Durch das hohe Eigengewicht der Liege kann trotz **SPLINE-FUNKTION** eine Verletzung nicht ausgeschlossen werden; deshalb ist stets darauf zu achten, dass sich keine Körperteile oder Gegenstände unter oder zwischen der Liege befinden.  
**QUETSCHGEFAHR!**

**⚠️ WARNUNG!** Achten Sie bei der Einstellung der Behandlungsposition darauf, dass sich keine Körperteile oder Gegenstände zwischen den Liegenteilen befinden. **QUETSCHGEFAHR!**

**HINWEIS!** Aus Sicherheitsgründen bewegt sich die Behandlungsliege nur, solange Sie eine Taste des Handschalters / Fußschalters drücken. Beim Loslassen wird die Bewegung sofort gestoppt.

### 11.1 Elektrische Steuerung: Lina Select Podo; 2-motorig


- ❖ Die **elektrischen** Einstellungen (Arbeitshöhe und Sitzneigung) der 2-motorigen Modellvariante erfolgen **standardmäßig** durch einen **FUSSSCHALTER**.
- ❖ Die **pneumatischen** Einstellungen (Rückenlehne und Beinteile) der 2-motorigen Modellvariante erfolgen durch die entsprechenden Gasdruckfedern, die mittels der zugehörigen Hebel betätigt werden.

#### 11.1.1 Fußschalter (Standardsteuerung)

- ❖ Der Fußschalter ist die Standardsteuerung der **2-motorigen Lina Select Podo** und ermöglicht die Steuerung der Grundfunktionen (**ARBEITSHÖHE** und **SITZNEIGUNG**).
- ❖ Der Fußschalter besteht aus einem linken Teil (**A**) und einem rechten Teil (**B**).
- ❖ Das Betätigen der Einzeltasten bewirkt das Verstellen nur eines Motors vor / zurück (**ARBEITSHÖHE** oder **SITZNEIGUNG**).

## LINA SELECT PODO; 2-MOTORIG: FUßSCHALTER (STANDARDSTEUERUNG)

- Elektrische HÖHENVERSTELLUNG.
- SITZNEIGUNG elektrisch verstellbar.

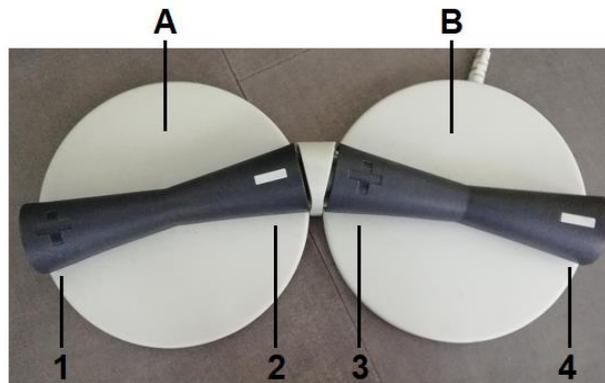

FUßSCHALTER A = ARBEITSHÖHE

FUßSCHALTER B = SITZNEIGUNG

1	ARBEITSHÖHE: AUF (+)
2	ARBEITSHÖHE: AB (-)
3	SITZNEIGUNG: VOR (+)
4	SITZNEIGUNG: ZURÜCK (-)

### 11.2 Elektrische Steuerung: Lina Select Podo; 3-motorig

- ❖ Die **elektrischen** Einstellungen (Arbeitshöhe, Rückenlehne und Sitzneigung) der 3-motorigen Modellvariante erfolgen **standardmäßig** durch einen **HANDSCHALTER**.
- ❖ Die **pneumatischen** Einstellungen (Beinteile) der 3-motorigen Modellvariante erfolgen durch die entsprechenden Gasdruckfedern, die mittels der zugehörigen Hebel betätigt werden.
- ❖ Die **elektrischen** Einstellungen können auch durch einen entsprechenden **optional** erhältlichen Fußschalter oder durch einen **optional** erhältlichen Fußschalter mit Bluetooth erfolgen; s. Kapitel 11.3.2 FUßSCHALTER (OPTIONALE STEUERUNG) und Kapitel 11.3.2.1 FUßSCHALTER MIT BLUETOOTH (LINA SELECT PODO 3).

### 11.2.1 Handschalter (Standardsteuerung)

- ❖ Der Handschalter ist die Standardsteuerung der 3-motorigen **Lina Select Podo**.
- ❖ Bei dem Handschalter handelt es sich um eine kabelgebundene Steuerung, die mit Niederspannung (24 V) betrieben wird. Diese ermöglicht die Betätigung der elektrisch steuerbaren Funktionen.
- ❖ Sie können die Hubsäule und die 2 Motoren einzeln durch Drücken der entsprechenden Tasten steuern.  
Das Abrufen der vier voreingespeicherten Positionen ist ebenfalls möglich.
- ❖ Weiterhin können Sie 2 Memory - Positionen individuell einstellen und speichern.
- ❖ Der Handschalter hat 12 Tasten.
- ❖ Die Einstellung der Arbeitshöhe, der Rückenlehne und der Sitzneigung (Tasten T1 - T3) erfolgt per Doppel-Tipp-System.  
Dies dient der Sicherheit. Eine Bewegung, die mit Gefahr verbunden ist, wird hierdurch bewusst getätigt.  
Für die Bewegungsrichtung beachten Sie bitte die Pfeil-Symbole und die Anzahl der Punkte im oberen Bereich des Handschalters.


Durch einfaches Drücken einer Taste und gedrückt Halten wird eine Bewegung nach oben getätigt.

Durch doppeltes Drücken (Doppel-Tipp-System) und gedrückt Halten wird eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung getätigt.

- i** Das Speichern bestimmter Liegenpositionen ist beschrieben in Kapitel 11.2.1.2 MEMORY-FUNKTIONEN DES HANDSCHALTERS.

#### HANDSCHALTER (STANDARDSTEUERUNG)

- Elektrische HÖHENVERSTELLUNG.
- RÜCKENLEHNE elektrisch verstellbar.
- SITZNEIGUNG elektrisch verstellbar.

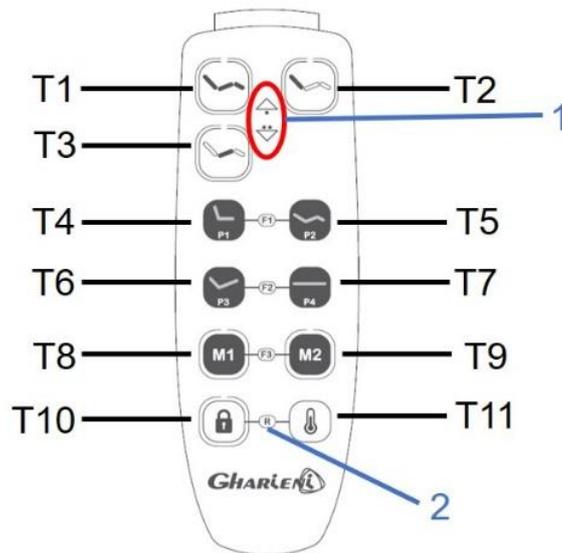

<b>T 1</b>	Taste zur Einstellung der <b>ARBEITSHÖHE</b>
<b>T 2</b>	Taste zur Einstellung der <b>RÜCKENLEHNE</b>
<b>T 3</b>	Taste zur Einstellung der <b>SITZNEIGUNG</b>
<b>T 4</b>	<p><b><u>PROGRAMMTASTE P1</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die PROGRAMMTASTE P1 fährt die Lina Select Podo 3 in die fest definierte Einstiegsposition.</li> <li>➤ <u>Die Einstiegsposition ist nicht veränderbar.</u></li> </ul>
<b>T 5</b>	<p><b><u>PROGRAMMTASTE P2</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die PROGRAMMTASTE P2 fährt die Lina Select Podo 3 in die fest definierte S-Curved-Position.</li> <li>➤ <u>Die S-Curved-Position ist nicht veränderbar.</u></li> </ul>
<b>T 6</b>	<p><b><u>PROGRAMMTASTE P3</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die PROGRAMMTASTE P3 fährt die Lina Select Podo 3 in die fest definierte höchstmögliche Fußposition.</li> <li>➤ <u>Die Fußposition ist nicht veränderbar.</u></li> </ul>

T 7	<p><b><u>PROGRAMMTASTE P4</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die PROGRAMMTASTE P4 fährt die Lina Select Podo 3 in die fest definierte Massageposition (Rückenlehne maximal eingefahren, Sitzneigung maximal eingefahren, Beinteil maximal eingefahren).</li> <li>➤ <u>Die Massageposition ist nicht veränderbar.</u></li> </ul>
T 8	<p><b><u>MEMORY-TASTE M1</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die MEMORY-TASTE M1 fährt die Lina Select Podo 3 in die erste individuell eingestellte Position.</li> </ul>
T 9	<p><b><u>MEMORY-TASTE M2</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die MEMORY-TASTE M2 fährt die Lina Select Podo 3 in die zweite individuell eingestellte Position.</li> </ul>
T 10	<p><b><u>SPERRTASTE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die SPERRTASTE sperrt bzw. gibt den Handschalter / die Antriebe frei.</li> </ul>
T 11	<p><b><u>TASTE FÜR HEIZSYSTEM</u></b> (optional)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mit der Taste für das HEIZSYSTEM können Sie das Heizsystem einschalten, es in 3 Stufen einstellen und es wieder ausschalten.</li> </ul>
1	<p><b><u>SYMBOLE FÜR DAS DOPPEL-TIPP-SYSTEM</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Die Einstellung der Arbeitshöhe, der Rückenlehne und der Neigung des Sitzbereichs (Tasten T 1 - T 3) erfolgt per Doppel-Tipp-System.</li> <li>❖ Dies dient der Sicherheit. Eine Bewegung, die mit Gefahr verbunden ist, wird hierdurch <u>bewusst</u> getätigt.</li> </ul>

2

### SYMBOL FÜR RESET

- ❖ Tasten T 10 + T 11 auf dem Handschalter gleichzeitig drücken und für ca. 10 Sekunden gedrückt Halten.
- ❖ Siehe Kapitel 15. RESET UND INITIALISIERUNG (3- UND 5-MOTORIGE MODELLVERSION).
- ❖ **Ein Reset-Vorgang ist nur im Falle eines Fehlers des Systems möglich.**

#### 11.2.1.1 Sperrfunktion

- ❖ Die 3-motorige Modellvariante der **Lina Select Podo** ist zum Schutz vor nicht autorisierter Benutzung mit einer SPERRFUNKTION ausgestattet.
- ❖ Standardmäßig ist keine automatische Sperrung eingestellt. Sie können selbst entscheiden, ob Sie dies ändern. Der aktuell laufende Heizzyklus ist von einer automatischen Sperrung **nicht beeinträchtigt**.
- ❖ Eine manuelle Sperrung **beeinträchtigt** den aktuell laufenden Heizzyklus ebenfalls **nicht** und hat **keine Auswirkung auf die Bedienung des Heizsystems**.

#### VERSCHIEDENE AUTOMATISCHE SPERRZEITEN:

Es können verschiedene automatische Sperrzeiten eingestellt werden. Um Feedback über die aktuell eingestellte automatische Sperrzeit zu erhalten, drücken Sie die Tasten T 8 und T 9 einmal gleichzeitig.

Feedback über die aktuell eingestellte automatische Sperrzeit wird wie folgt mittels Blinken aller LEDs des Handschalters und einer Anzahl von Pieptönen gegeben, je nach automatischer Sperrzeit:

- automatisches Sperren nach **30** Minuten:  
1 Piepton und **1 x** Blinken aller LEDs des Handschalters
- automatisches Sperren nach **60** Minuten:  
2 Pieptöne und **2 x** Blinken aller LEDs des Handschalters
- automatisches Sperren nach **90** Minuten:  
3 Pieptöne und **3 x** Blinken aller LEDs des Handschalters
- automatisches Sperren nach **120** Minuten:  
4 Pieptöne und **4 x** Blinken aller LEDs des Handschalters
- **kein** automatisches Sperren:  
5 Pieptöne und **5 x** Blinken aller LEDs des Handschalters

Um von einer automatischen Sperrzeit zur nächsten zu wechseln, drücken Sie bitte die beiden Tasten T 8 und T 9 gleichzeitig und halten diese für eine Dauer von ca. 6 Sekunden gedrückt.

Mittels Blinken aller LEDs und entsprechendem Piepton wird zunächst über die jeweilige aktuell eingestellte automatische Sperrzeit Feedback gegeben, dann wird zur nächsten automatischen Sperrzeit gewechselt.

Beispiel:


30 Minuten ist als automatische Sperrzeit eingestellt.

Sie möchten zur automatischen Sperrzeit 60 Minuten wechseln.

Drücken Sie die entsprechenden Tasten gleichzeitig und halten Sie diese für eine Dauer von ca. 6 Sekunden gedrückt, bis mittels Blinken aller LEDs des Handschalters und Pieptönen Feedback über die nun eingestellte automatische Sperrzeit 60 Minuten gegeben wird.

Die automatische Sperrzeit wird immer in dieser Abfolge gewechselt:

30 Min. - 60 Min. - 90 Min. - 120 Min. - **kein automatisches Sperren.**

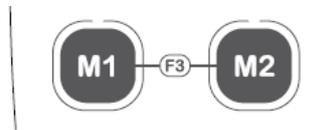

Tasten T 8 + T 9 (F3)

#### ANTRIEBE MANUELL SPERREN:

1. Um die Antriebe manuell zu sperren, drücken Sie die SPERRTASTE (Taste **T 11** des Handschalters) und **halten** Sie diese für ca. 2 Sekunden **gedrückt**.
2. Das erfolgreiche Sperren wird mittels eines akustischen Signals bestätigt und zusätzlich leuchtet die LED über der Taste des jeweiligen Handschalters auf.
3. Die Antriebe sind nun blockiert.



## ANTRIEBE MANUELL ENTPERREN:

1. Um die Antriebe zu entsperren, drücken Sie die SPERRTASTE (**T 11**) **zweimal schnell hintereinander** (Doppel-Klick) und **halten** Sie diese ca. 2 Sekunden **gedrückt**.
2. Das erfolgreiche Entsperren wird mittels eines akustischen Signals bestätigt und die LED über der Taste des jeweiligen Handschalters erlischt.
3. Die Antriebe sind nun entsperrt.



### 11.2.1.2 Memory-Funktionen des Handschalters

- ❖ Der Handschalter der Lina Select Podo 3 verfügt neben vier voreingespeicherten Behandlungspositionen über zwei Speicherpositionen (Memory - Positionen: M 1 / M 2).
- ❖ Die Memory - Funktion speichert die von Ihnen gewünschten Behandlungspositionen und erleichtert Ihnen somit die Arbeitsabläufe. Verwenden Sie die Tasten M 1 und M 2 [s. Kapitel 11.2.1 HANDSCHALTER (STANDARD-STEUERUNG)].
- ❖ Das **Speichern** von Memory-Positionen erfolgt wie die elektrischen Einstellungen der Lina Select Podo per Doppel-Tipp-System.

## EINSPEICHERN DER MEMORY-POSITIONEN:

1. Stellen Sie wie gewöhnlich die gewünschte Position mit den Tasten T 1 bis T 3 ein (s. Abb. in Kapitel 11.2.1).
2. Drücken Sie die TASTE M1 ODER M2 doppelt (Doppel-Tipp-System) und halten Sie diese für ca. 3 Sekunden gedrückt.
3. Nach erfolgreichem Speichern ertönt ein akustisches Signal.
4. Die jeweilige Memory-Position ist nun eingespeichert.



## ABRUFEN DER MEMORY-POSITIONEN:

Drücken und **halten** Sie die entsprechende MEMORY-TASTE M 1 oder M 2 gedrückt **bis** die gespeicherte Behandlungsposition erreicht ist.



### 11.3 Elektrische Steuerung: Lina Select Podo; 5-motorig

- ❖ **Alle** Bereiche der 5-motorigen Modellvariante sind elektrisch verstellbar.
- ❖ Die **elektrischen** Einstellungen erfolgen **standardmäßig** durch einen **HANDSCHALTER**.
- ❖ Die **elektrischen** Einstellungen können auch durch einen entsprechenden **optional** erhältlichen Fußschalter oder durch einen **optional** erhältlichen Fußschalter mit Bluetooth erfolgen; s. Kapitel 11.2.2 FUBSCHALTER (OPTIONALE STEUERUNG) und Kapitel 11.2.2.1 FUBSCHALTER MIT BLUETOOTH (LINA SELECT PODO 5).

#### 11.3.1 Handschalter (Standardsteuerung)

- ❖ Der Handschalter ist die Standardsteuerung der 5-motorigen **Lina Select Podo**.
- ❖ Bei dem Handschalter handelt es sich um eine kabelgebundene Steuerung, die mit Niederspannung (24 V) betrieben wird. Diese ermöglicht die Betätigung der elektrisch steuerbaren Funktionen.
- ❖ Sie können die Hubsäule und jeden der 4 Motoren einzeln durch Drücken der entsprechenden Tasten steuern.  
Das Abrufen der vier voreingespeicherten Positionen ist ebenfalls möglich.
- ❖ Weiterhin können Sie 2 Memory - Positionen individuell einstellen und speichern.
- ❖ Der Handschalter hat 12 Tasten.
- ❖ Die Einstellung der Arbeitshöhe, der Rückenlehne, der Sitzneigung und der Beinteile (Tasten T1 - T4 bzw. Tasten T3 + T4 in Kombination für die Rückenlehne) erfolgt per Doppel-Tipp-System.  
Dies dient der Sicherheit. Eine Bewegung, die mit Gefahr verbunden ist, wird hierdurch bewusst getätigt.  
Für die Bewegungsrichtung beachten Sie bitte die Pfeil-Symbole und die Anzahl der Punkte im oberen Bereich des Handschalters.


Durch einfaches Drücken einer Taste und gedrückt Halten wird eine Bewegung nach oben getätigt.

Durch doppeltes Drücken (Doppel-Tipp-System) und gedrückt Halten wird eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung getätigt.

**i** Das Speichern bestimmter Liegenpositionen ist beschrieben in Kapitel 11.2.1.2 MEMORY-FUNKTIONEN DES HANDSCHALTERS.

### HANDSCHALTER (STANDARDSTEUERUNG)

- Elektrische HÖHENVERSTELLUNG.
- NEIGUNG DER RÜCKENLEHNE elektrisch verstellbar.
- SITZNEIGUNG elektrisch verstellbar.
- BEINTEILE elektrisch verstellbar.

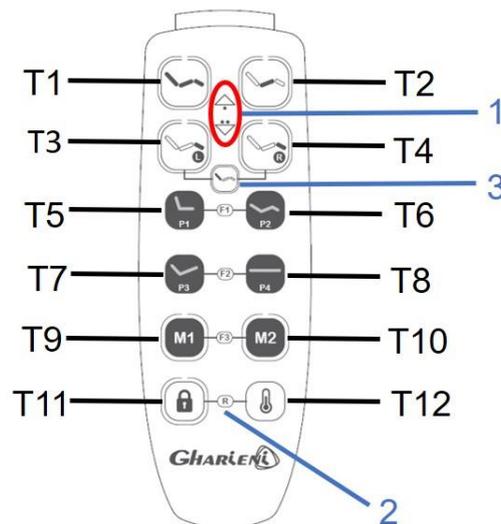

<b>T 1</b>	Taste zur Einstellung der <b>ARBEITSHÖHE</b>
<b>T 2</b>	Taste zur Einstellung der <b>SITZNEIGUNG</b>
<b>T 3</b>	Taste zur Einstellung des <b>LINKEN BEINTEILS</b>
<b>T 4</b>	Taste zur Einstellung des <b>RECHTEN BEINTEILS</b>
<b>T 5</b>	<p><b><u>PROGRAMMTASTE P1</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die PROGRAMMTASTE P1 fährt die Lina Select Podo 5 in die fest definierte Einstiegsposition.</li> <li>➤ <u>Die Einstiegsposition ist nicht veränderbar.</u></li> </ul>

T 6	<p><b><u>PROGRAMMTASTE P2</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die PROGRAMMTASTE P2 fährt die Lina Select Podo 5 in die fest definierte S-Curved-Position.</li> <li>➤ <u>Die S-Curved-Position ist nicht veränderbar.</u></li> </ul>
T 7	<p><b><u>PROGRAMMTASTE P3</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die PROGRAMMTASTE P3 fährt die Lina Select Podo 5 in die fest definierte höchstmögliche Fußposition.</li> <li>➤ <u>Die Fußposition ist nicht veränderbar.</u></li> </ul>
T 8	<p><b><u>PROGRAMMTASTE P4</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die PROGRAMMTASTE P4 fährt die Lina Select Podo 5 in die fest definierte Massageposition (Rückenlehne maximal eingefahren, Sitzneigung maximal eingefahren, Beinteil maximal eingefahren).</li> <li>➤ <u>Die Massageposition ist nicht veränderbar.</u></li> </ul>
T 9	<p><b><u>MEMORY-TASTE M1</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die MEMORY-TASTE M1 fährt die Lina Select Podo 5 in die erste individuell eingestellte Position.</li> </ul>
T 10	<p><b><u>MEMORY-TASTE M2</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die MEMORY-TASTE M2 fährt die Lina Select Podo 5 in die zweite individuell eingestellte Position.</li> </ul>
T 11	<p><b><u>SPERRTASTE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die SPERRTASTE sperrt bzw. gibt den Handschalter / die Antriebe frei.</li> </ul>
T 12	<p><b><u>TASTE FÜR HEIZSYSTEM</u></b> (optional)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mit dieser Taste können Sie das Heizsystem einschalten, es in 3 Stufen einstellen und es wieder ausschalten.</li> </ul>

1	<p><b><u>SYMBOLE FÜR DAS DOPPEL-TIPP-SYSTEM</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Die Einstellung der Arbeitshöhe, der Neigung des Sitzbereiches, des linken und des rechten Beinteils (Tasten T 1 - T 4) und der Rückenlehne („3“) erfolgt per Doppel-Tipp-System. Die Einstellung der Rückenlehne erfolgt mittels der beiden Tasten T 3 und T 4 <b>in Kombination.</b></li> <li>❖ Dies dient der Sicherheit. Eine Bewegung, die mit Gefahr verbunden ist, wird hierdurch bewusst getätigt.</li> </ul>
2	<p><b><u>SYMBOL FÜR RESET</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Siehe Kapitel 15. RESET UND INITIALISIERUNG (3- UND 5-MOTORIGE MODELLVERSION).</li> <li>❖ <b>Ein Reset-Vorgang ist nur im Falle eines Fehlers des Systems möglich.</b></li> </ul>
3	<p><b><u>EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Drücken Sie die Tasten T 3 und T 4 <b>kombiniert.</b></li> <li>❖ Die Einstellung der Rückenlehne erfolgt per Doppel-Tipp-System.</li> </ul>

### 11.3.1.1 Sperrfunktion

- ❖ Die 5-motorige Modellvariante der **Lina Select Podo** ist zum Schutz vor nicht autorisierter Benutzung mit einer SPERRFUNKTION ausgestattet.
- ❖ Standardmäßig ist keine automatische Sperrung eingestellt.  
Sie können selbst entscheiden, ob Sie dies ändern.  
Der aktuell laufende Heizzyklus ist von einer automatischen Sperrung **nicht beeinträchtigt**.
- ❖ Eine manuelle Sperrung **beeinträchtigt** den aktuell laufenden Heizzyklus ebenfalls **nicht** und hat **keine Auswirkung auf die Bedienung des Heizsystems**.

#### VERSCHIEDENE AUTOMATISCHE SPERRZEITEN:

Es können verschiedene automatische Sperrzeiten eingestellt werden.  
Um Feedback über die aktuell eingestellte automatische Sperrzeit zu erhalten, drücken Sie die Tasten T9 und T10 einmal gleichzeitig.

Feedback über die aktuell eingestellte automatische Sperrzeit wird wie folgt mittels Blinken aller LEDs des Handschalters und einer Anzahl von Pieptönen gegeben, je nach automatischer Sperrzeit:

- automatisches Sperren nach **30** Minuten:  
1 Piepton und **1 x** Blinken aller LEDs des Handschalters
- automatisches Sperren nach **60** Minuten:  
2 Pieptöne und **2 x** Blinken aller LEDs des Handschalters
- automatisches Sperren nach **90** Minuten:  
3 Pieptöne und **3 x** Blinken aller LEDs des Handschalters
- automatisches Sperren nach **120** Minuten:  
4 Pieptöne und **4 x** Blinken aller LEDs des Handschalters
- **kein** automatisches Sperren:  
5 Pieptöne und **5 x** Blinken aller LEDs des Handschalters

Um von einer automatischen Sperrzeit zur nächsten zu wechseln, drücken Sie bitte die beiden Tasten T9 und T10 gleichzeitig und halten diese für eine Dauer von ca. 6 Sekunden gedrückt.

Mittels Blinken aller LEDs und entsprechendem Piepton wird zunächst über die jeweilige aktuell eingestellte automatische Sperrzeit Feedback gegeben, dann wird zur nächsten automatischen Sperrzeit gewechselt.

### Beispiel:


30 Minuten ist als automatische Sperrzeit eingestellt.

Sie möchten zur automatischen Sperrzeit 60 Minuten wechseln.

Drücken Sie die entsprechenden Tasten gleichzeitig und halten Sie diese für eine Dauer von ca. 6 Sekunden gedrückt, bis mittels Blinken aller LEDs des Handschalters und Pieptönen Feedback über die nun eingestellte automatische Sperrzeit 60 Minuten gegeben wird.

Die automatische Sperrzeit wird immer in dieser Abfolge gewechselt:

30 Min. - 60 Min. - 90 Min. - 120 Min. - **kein automatisches Sperren.**

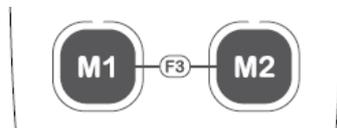

*Tasten T9 + T 10 (F3)*


### ANTRIEBE MANUELL SPERREN:

1. Um die Antriebe manuell zu sperren, drücken Sie die SPERRTASTE (Taste **T 11** des Handschalters) und **halten** Sie diese für ca. 2 Sekunden **gedrückt**.
2. Das erfolgreiche Sperren wird mittels eines akustischen Signals bestätigt und zusätzlich leuchtet die LED über der Taste des jeweiligen Handschalters auf.
3. Die Antriebe sind nun blockiert.



## ANTRIEBE MANUELL ENTPERREN:

1. Um die Antriebe zu entsperren, drücken Sie die SPERRTASTE (**T 11**) **zweimal schnell hintereinander** (Doppel-Klick) und **halten** Sie diese ca. 2 Sekunden **gedrückt**.
2. Das erfolgreiche Entsperren wird mittels eines akustischen Signals bestätigt und die LED über der Taste des jeweiligen Handschalters erlischt.
3. Die Antriebe sind nun entsperrt.

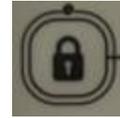

### 11.3.1.2 Memory-Funktionen des Handschalters

- ❖ Der Handschalter der Lina Select Podo 5 verfügt neben vier voreingespeicherten Behandlungspositionen über zwei Speicherpositionen (Memory - Positionen: M 1 / M 2).
- ❖ Die Memory - Funktion speichert die von Ihnen gewünschten Behandlungspositionen und erleichtert Ihnen somit die Arbeitsabläufe. Verwenden Sie die Tasten M 1 und M 2 [s. Kapitel 11.3.1 HANDSCHALTER (STANDARD-STEUERUNG)].
- ❖ Das **Speichern** von Memory-Positionen erfolgt wie die elektrischen Einstellungen der Lina Select Podo per Doppel-Tipp-System.

## EINSPEICHERN DER MEMORY-POSITIONEN:

1. Stellen Sie wie gewöhnlich die gewünschte Position mit den Tasten T 1 bis T 4 + „3“ (s. Abb. in Kapitel 11.3.1) ein.
2. Drücken Sie die TASTE M1 ODER M2 doppelt (Doppel-Tipp-System) und halten Sie diese für ca. 3 Sekunden gedrückt.
3. Nach erfolgreichem Speichern ertönt ein akustisches Signal.
4. Die jeweilige Memory-Position ist nun eingespeichert.



## ABRUFEN DER MEMORY-POSITIONEN:

Drücken und **halten** Sie die entsprechende MEMORY-TASTE M 1 oder M 2 gedrückt **bis** die gespeicherte Behandlungsposition erreicht ist.



### 11.3.2 Fußschalter Lina Select Podo 3 (optionale Steuerung)

- ❖ Der Fußschalter (s. Abbildungen) kann zusätzlich zum Handschalter angeschlossen werden.
  - ❖ Der Fußschalter ermöglicht die Steuerung der Grundfunktionen, das Speichern und Abrufen der zwei individuellen Memory-Positionen M1 und M2, das Abrufen der fest eingespeicherten Einstiegsposition und der fest eingespeicherten Fußpflegeposition sowie die Bedienung der Sperrfunktion und des optionalen Heizsystems.
  - ❖ Der Fußschalter besteht aus einem linken und einem rechten Teil und einem Mittelteil (s. Abb.).
  - ❖ Das Betätigen der **Einzelpedale** bewirkt das Verstellen nur **einer** Funktion hin / zurück (z.B. Arbeitshöhe oder Rückenlehne / s. Abb.).
  - ❖ Das Speichern und Anfahren der zwei individuellen Memory-Positionen, das Anfahren der fest eingespeicherten Einstiegsposition, die Aktivierung/Deaktivierung der Sperrfunktion und die Bedienung des Heizsystems erfolgt in Kombination **mehrerer** Pedale des Fußschalters.
  - ❖ Die Bedienung erfolgt, wie mit dem Handschalter, im Doppel-Tipp-System. Dies dient der Sicherheit.  
Eine Bewegung, die mit Gefahr verbunden ist, wird hierdurch bewusst getätigt.
- i** Für die Bewegungsrichtung beachten Sie bitte die Pfeil-Symbole und die Anzahl der Punkte auf den Folien des linken und rechten Fußschalters.

Durch einfaches Drücken einer Taste und gedrückt Halten wird eine Bewegung nach oben getätigt.

Durch doppeltes Drücken (Doppel-Tipp-System) und gedrückt Halten wird eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung getätigt.

Um die Liege zum Beispiel hochzufahren, muss man das Pedal 1 einmal drücken und gedrückt halten.

Um sie herunterzufahren, muss man das Pedal zweimal drücken und gedrückt halten.


Gleiches gilt für die Einstellung der Rückenlehne, der Sitzneigung und für die Einstellung der fest eingespeicherten Fußpflege-Position (Pedale 2, 3 und 4).

Das Einspeichern der beiden individuell speicherbaren Memory-Positionen M 1 und M 2 funktioniert auch wie mittels des Handschalters per Doppel-Klick: zweimal drücken und gedrückt halten zum Einspeichern, einmal drücken und gedrückt halten zum Abrufen/Anfahren der Position.

Sperren/Entsperren funktioniert auch genau wie mittels des Handschalters per Doppel-Klick. Wenn die Bedienung gesperrt ist, leuchtet die LED im Mittelteil des Fußschalters auf.

Nur das Abrufen/Anfahren der fest eingespeicherten Position P1 (Einstiegsposition) erfolgt durch einmaliges Drücken und gedrückt halten der beiden Pedale 1 und 2 bis die Position erreicht ist.

**HINWEIS!** Aus Sicherheitsgründen bewegt sich die Wellnessliege nur, solange Sie ein Pedal oder mehrere Pedale des optionalen Fußschalters drücken. Beim Loslassen wird die Bewegung sofort gestoppt.

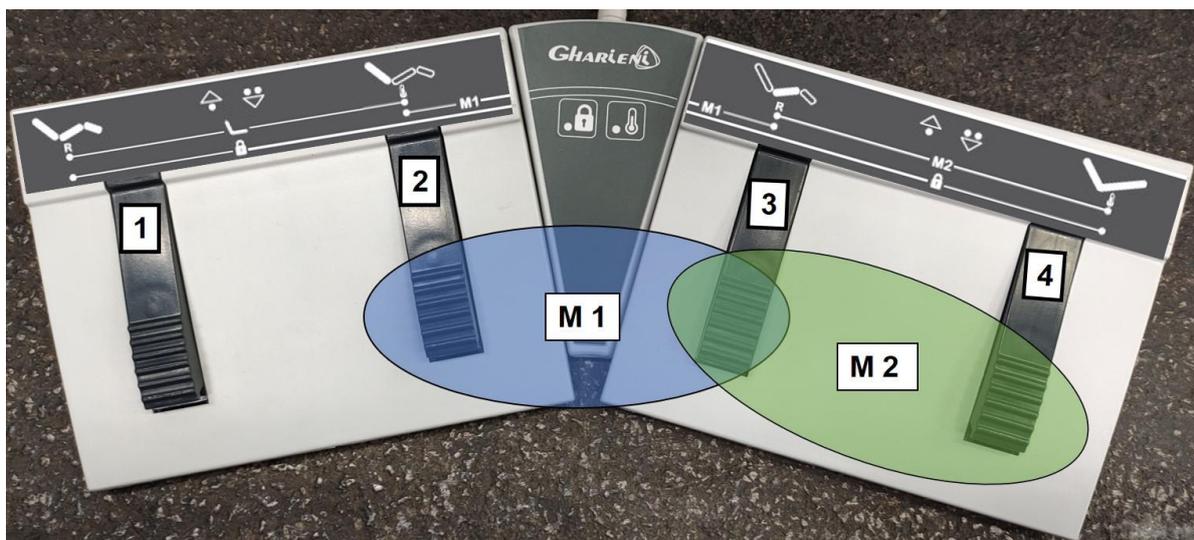

LINKES TEIL DES FUßSCHALTERS

RECHTES TEIL DES FUßSCHALTERS

**LINKES TEIL DES FUßSCHALTERS:**

1	ARBEITSHÖHE: <b>AUF / AB</b>
2	RÜCKENLEHNE: <b>AUF / AB</b>

**RECHTES TEIL DES FUSS-SCHALTERS:**

3	NEIGUNG (Sitz): <b>AUF / AB</b>
4	FUSSPFLEGE-POSITION ABRUFEN

**LINKES UND RECHTES TEIL DES FUßSCHALTERS:**

	<p><b><u>MEMORY-POSITION M 1:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Einspeichern der Memory-Position:</u> Linkes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 2 und</b> rechtes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 3 gleichzeitig zweimal</b> drücken (Doppel-Klick) und gedrückt halten bis ein Signalton die erfolgreiche Speicherung bestätigt.</li> <li>➤ <u>Abrufen der Memory-Position:</u> Drücken und halten Sie die beiden Pedale gedrückt <b>bis</b> die gespeicherte Behandlungsposition erreicht ist.</li> </ul>
<b>M 1</b>	

	<p><b><u>MEMORY-POSITION M 2:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Einspeichern der Memory-Position:</u> Rechtes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 3 und</b> rechtes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 4 gleichzeitig zweimal</b> drücken und (Doppel-Tipp) gedrückt halten bis ein Signalton die erfolgreiche Speicherung bestätigt.</li> <li>➤ <u>Abrufen der Memory-Position:</u> Drücken und halten Sie die beiden Pedale gedrückt <b>bis</b> die gespeicherte Behandlungsposition erreicht ist.</li> </ul>
<b>M 2</b>	

<p><b>Einstiegs- position P1</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Linkes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 1 und</b> linkes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 2</b> <u>gleichzeitig</u> drücken und gedrückt halten <b>bis</b> die Position erreicht wurde.</li> </ul> <p><u>DIE EINSTIEGSPOSITION IST NICHT VERÄNDERBAR.</u></p>
<p><b>Sperren / Entsperren</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Linkes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 1 und</b> rechtes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 4</b> <u>gleichzeitig</u> drücken und gedrückt halten <b>bis</b> die Liege gesperrt ist. Zur Bestätigung ertönt ein akustisches Signal und die LED (Diode) im Mittelteil des Fußschalters leuchtet auf.</li> <li>➤ Zum <u>Entsperren</u> der Liege drücken Sie die beiden Pedale des Fußschalters <u>zweimal schnell hintereinander</u> (Doppel-Klick) und halten diese gedrückt. Es ertönt wiederum ein akustisches Signal und die LED (Diode) im Mittelteil des Fußschalters erlischt.</li> </ul>
<p><b>Heiz- System</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sie können das HEIZSYSTEM einschalten, es in 3 Stufen einstellen und es wieder ausschalten.</li> <li>➤ Linkes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 2 und</b> rechtes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 4</b> <u>gleichzeitig</u> drücken, um das Heizsystem mit der ersten Heizstufe einzuschalten, zur nächsten Heizstufe zu wechseln oder um das Heizsystem auszuschalten.</li> <li>➤ Die eingestellte Heizstufe wird mittels einer LED (Diode) im Mittelteil des Fußschalters angezeigt.</li> <li>➤ Bitte beachten Sie die Tabelle in Kapitel 13. HEIZSYSTEM 3- UND 5-MOTORIGE MODELLVARIANTE (optionale Ausstattung).</li> </ul>

Um die Liege zum Beispiel hochzufahren, muss man das Pedal 1 einmal drücken und gedrückt halten.

Um sie herunterzufahren, muss man das Pedal zweimal drücken und gedrückt halten.

Gleiches gilt für die Einstellung der Rückenlehne, der Sitzneigung und für die Einstellung der fest eingespeicherten Fußpflege-Position (Pedale 2, 3 und 4).

Das Einspeichern der beiden individuell speicherbaren Memory-Positionen M 1 oder M 2 funktioniert auch wie mittels des Handschalters per Doppel-Klick: zweimal drücken und gedrückt halten zum Einspeichern, einmal drücken und gedrückt halten zum Abrufen/Anfahren der Position.

Sperren/Entsperren funktioniert auch genau wie mittels des Handschalters per Doppel-Klick.

Wenn die Bedienung gesperrt ist, leuchtet die LED im Mittelteil des Fußschalters auf.

Nur das Abrufen/Anfahren der fest eingespeicherten Position P1 (Einstiegsposition) erfolgt durch einmaliges Drücken und gedrückt halten der beiden Pedale 1 und 2 bis die Position erreicht ist.

- Beim Kauf einer LINA SELECT PODO 3 gehört der Handschalter standardmäßig zum Lieferumfang. Optional, gegen Aufpreis, kann der Fußschalter erworben werden.

### **11.3.2.1 Fußschalter mit Bluetooth (Lina Select Podo 3, optional)**

- ❖ Ein Fußschalter mit Bluetooth kann als Option zusätzlich zum Handschalter angeschlossen werden.
- ❖ Der Fußschalter ermöglicht die Steuerung der Grundfunktionen und das Anfahren der fest eingespeicherten Positionen P1 bis P 4. Zusätzlich ist die Bedienung des Heizsystems möglich und die Liege kann entsperrt werden.
- ❖ Bei Anlieferung ist der Fußschalter bereits mit der der Steuerung der Liege gekoppelt.
- ❖ Die Bedienung der Grundfunktionen erfolgt, wie mit dem Handschalter, im Doppel-Tipp-System. Dies dient der Sicherheit. Eine Bewegung, die mit Gefahr verbunden ist, wird hierdurch bewusst getätigt.

Durch einfaches Drücken einer Taste und gedrückt Halten wird eine Bewegung nach oben getätigt.

Durch doppeltes Drücken (Doppel-Tipp-System) und gedrückt Halten wird eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung getätigt.

Einige Funktionen werden ebenfalls mittels Doppel-Tipp eingestellt.


- Beim Kauf einer LINA SELECT PODO 3 gehört der Handschalter standardmäßig zum Lieferumfang. Optional, gegen Aufpreis, kann der Fußschalter mit Bluetooth erworben werden.

**HINWEIS!** Der Bluetooth-Fußschalter ist batteriebetrieben. Bei normaler Nutzung (ein paar Minuten täglich) ist mit einer Batterielebensdauer von 3-4 Jahren zu rechnen. Ein erneutes Koppeln des Bluetooth-Fußschalters mit der Steuerung der Liege ist beim Wechsel der Batterien nicht notwendig.

**HINWEIS!** Sollte der Bluetooth-Fußschalter trotz Wechsel der Batterien nicht funktionieren, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Kundenservice auf.

**HINWEIS!** Der Bluetooth-Fußschalter muss vor einer Benutzung gegebenenfalls mittels Betätigung einer beliebigen Taste aufgeweckt werden, da er nach ca. drei Sekunden in den Schlafmodus wechselt.

**HINWEIS!** Um das Heizsystem mit der ersten Heizstufe einzuschalten, zur nächsten Heizstufe zu wechseln oder das Heizsystem auszuschalten, müssen die Tasten des Bluetooth-Fußschalters ca. eine Sekunde gedrückt gehalten werden.

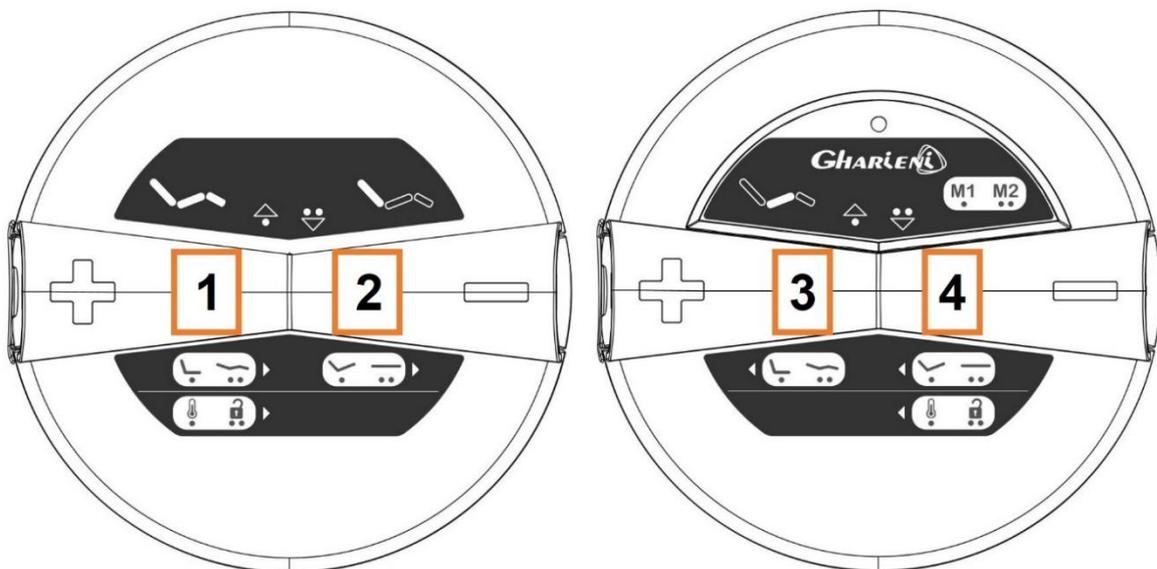

**LINKES TEIL DES FUßSCHALTERS:**

1	ARBEITSHÖHE: <b>AUF / AB</b>
2	RÜCKENLEHNE: <b>AUF / AB</b>

**RECHTES TEIL DES FUßSCHALTERS:**

3	SITZNEIGUNG: <b>AUF / AB</b>
4	M1 / M2: <b>ABRUFEN</b>

**LINKES UND RECHTES TEIL DES FUßSCHALTERS:**

<b>P1 (Einstiegs- position)</b>	<p>➤ Linkes Teil des Fußschalters, <b>Taste 1</b> und rechtes Teil des Fußschalters, <b>Taste 3 gleichzeitig einmal</b> drücken (Einzel-Tipp) und gedrückt halten bis die Position erreicht wurde.</p> <p><u>DIE EINSTIEGSPOSITION IST NICHT VERÄNDERBAR.</u></p>
<b>P2 (S-Curved Position)</b>	<p>➤ Linkes Teil des Fußschalters, <b>Taste 1</b> und rechtes Teil des Fußschalters, <b>Taste 3 gleichzeitig zweimal</b> drücken (Doppel- Tipp) und gedrückt halten bis die Position erreicht wurde.</p> <p><u>DIE S-CURVED-POSITION IST NICHT VERÄNDERBAR.</u></p>
<b>P3 (Fußpflege- position)</b>	<p>➤ Linkes Teil des Fußschalters, <b>Taste 2</b> und rechtes Teil des Fußschalters, <b>Taste 4 gleichzeitig einmal</b> drücken (Einzel- Tipp) und gedrückt halten bis die Position erreicht wurde.</p> <p><u>DIE FUBPFLEGEPOSITION IST NICHT VERÄNDERBAR.</u></p>
<b>P4 (Massage- position)</b>	<p>➤ Linkes Teil des Fußschalters, <b>Taste 2</b> und rechtes Teil des Fußschalters, <b>Taste 4 gleichzeitig zweimal</b> drücken (Doppel- Tipp) und gedrückt halten bis die Position erreicht wurde.</p> <p><u>DIE MASSAGEPOSITION IST NICHT VERÄNDERBAR.</u></p>

<b>Entsperren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zum Entsperren der Liege drücken Sie die <b>Tasten 1</b> (linkes Teil des Fußschalters) <b>und 4</b> (rechtes Teil des Fußschalters) <u>zweimal schnell hintereinander</u> (Doppel-Tipp) und halten diese gedrückt. Es ertönt ein akustisches Signal.</li> <li>➤ Ob die Liege gesperrt ist, kann anhand der LED über der Taste des Handschalters erkannt werden. Wenn die Liege gesperrt ist, leuchtet die LED.</li> </ul>
<b>Heizsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Linkes Teil des Fußschalters, <b>Taste 1</b> und rechtes Teil des Fußschalters, <b>Taste 4 gleichzeitig einmal</b> drücken und ca. eine Sekunde gedrückt halten (Einzel- Tipp), um das Heizsystem mit der ersten Heizstufe einzuschalten, zur nächsten Heizstufe zu wechseln oder um das Heizsystem auszuschalten.</li> <li>➤ Die eingestellte Heizstufe wird mittels einer LED (Diode) über der Taste des Handschalters angezeigt.</li> <li>➤ Bitte beachten Sie die Tabelle in Kapitel 13. HEIZSYSTEM 3- UND 5-MOTORIGE MODELLVARIANTE (optionale Ausstattung).</li> </ul>

### 11.3.3 Fußschalter Lina Select Podo 5 (optionale Steuerung)

- ❖ Ein Fußschalter kann als Option zusätzlich zum Handschalter angeschlossen werden.
- ❖ Der Fußschalter ermöglicht die Steuerung der Grundfunktionen, das Speichern und Abrufen der individuellen Memory-Position M1, das Abrufen der fest eingespeicherten Einstiegsposition sowie die Bedienung der Sperrfunktion und des optionalen Heizsystems.
- ❖ Der Fußschalter besteht aus einem linken und einem rechten Teil und einem Mittelteil (s. Abb.).
- ❖ Das Betätigen der **Einzelpedale** bewirkt das Verstellen nur **einer** Funktion hin / zurück (z.B. Arbeitshöhe oder Rückenlehne / s. Abb.).
- ❖ Das Speichern und Anfahren der individuellen Memory-Position M1, das Anfahren der fest eingespeicherten Einstiegsposition, die Aktivierung/Deaktivierung der Sperrfunktion und die Bedienung des Heizsystems erfolgt in Kombination **mehrerer** Pedale des Fußschalters.
- ❖ Die Bedienung erfolgt, wie mit dem Handschalter, im Doppel-Tipp-System. Dies dient der Sicherheit.  
Eine Bewegung, die mit Gefahr verbunden ist, wird hierdurch bewusst getätigt.
- ❗ Für die Bewegungsrichtung beachten Sie bitte die Pfeil-Symbole und die Anzahl der Punkte auf den Folien des linken und rechten Fußschalters.

Durch einfaches Drücken einer Taste und gedrückt Halten wird eine Bewegung nach oben getätigt.

Durch doppeltes Drücken (Doppel-Tipp-System) und gedrückt Halten wird eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung getätigt.

Ebenso erfolgt das manuelle Einspeichern der individuellen Memory-Position per Doppel-Tipp-System.

Um die Liege zum Beispiel hochzufahren, muss man das Pedal 1 einmal drücken und gedrückt halten.

Um sie herunterzufahren, muss man das Pedal zweimal drücken und gedrückt halten.

Gleiches gilt für die Einstellung der Sitzneigung, der beiden Beinteile und der Rückenlehne (Pedale 2, 3, 4 und „5“).

**Die Rückenlehne wird mittels der Pedale 3 und 4 in Kombination eingestellt.**


Nur das Abrufen/Anfahren der fest eingespeicherten Position P1 (Einstiegsposition) erfolgt durch einmaliges Drücken und gedrückt halten der beiden Pedale 1 und 2 bis die Position erreicht ist.

- Beim Kauf einer LINA SELECT PODO 5 gehört der Handschalter standardmäßig zum Lieferumfang. Optional, gegen Aufpreis, kann der Fußschalter erworben werden.

**HINWEIS!** Aus Sicherheitsgründen bewegt sich die Behandlungsliege nur, solange Sie ein Pedal oder mehrere Pedale des optionalen Fußschalters drücken. Beim Loslassen wird die Bewegung sofort gestoppt.

**LINA SELECT PODO; 5-MOTORIG  
FUßSCHALTER (OPTIONALE STEUERUNG):**

- Elektrische HÖHENVERSTELLUNG.
- NEIGUNG DER RÜCKENLEHNE elektrisch verstellbar.
- SITZNEIGUNG elektrisch verstellbar.
- BEINTEILE elektrisch verstellbar.

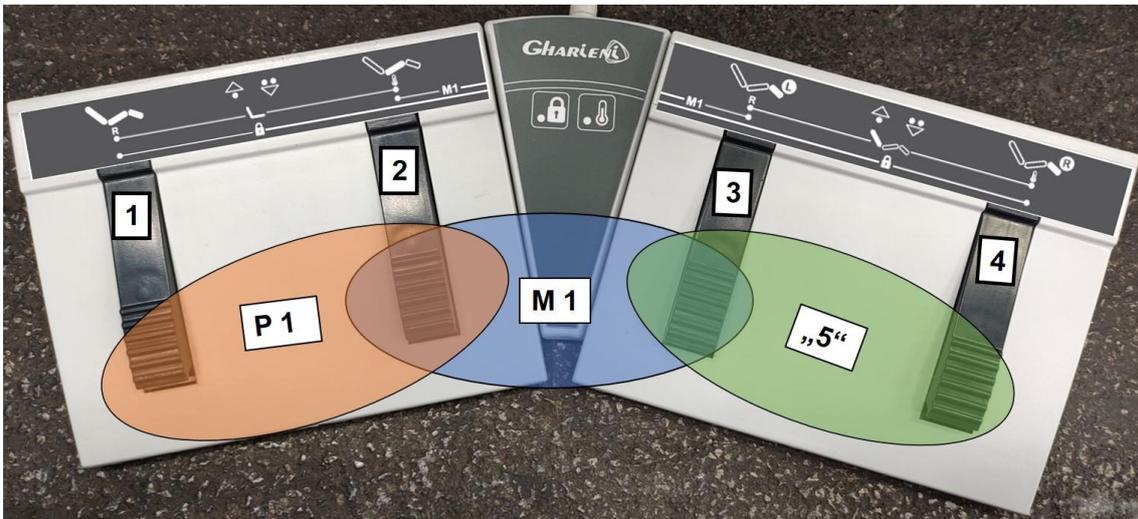

LINKES TEIL DES FUßSCHALTERS

RECHTES TEIL DES FUßSCHALTERS

**LINKES TEIL DES FUßSCHALTERS:**

1	ARBEITSHÖHE: <b>AUF / AB</b>
2	SITZNEIGUNG: <b>AUF / AB</b>

**RECHTES TEIL DES FUßSCHALTERS:**

3	LINKES BEINTEIL: <b>AUF / AB</b>
4	RECHTES BEINTEIL: <b>AUF / AB</b>
„5“ (3 + 4)	RÜCKENLEHNE: <b>AUF / AB</b>

## LINKES UND RECHTES TEIL DES FUßSCHALTERS:

<b>M 1</b>	<p><b><u>MEMORY-POSITION M 1:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Einspeichern der Memory-Position:</u> Linkes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 2 und</b> rechtes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 3 gleichzeitig zweimal</b> drücken (Doppel-Klick) und gedrückt halten bis ein Signalton die erfolgreiche Speicherung bestätigt.</li> <li>➤ <u>Abrufen der Memory-Position:</u> Drücken und halten Sie die beiden Pedale gedrückt <b>bis</b> die gespeicherte Behandlungsposition erreicht ist.</li> </ul>
<b>Einstiegs- position P1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Linkes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 1</b> und linkes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 2 gleichzeitig</b> drücken und gedrückt halten bis die Position erreicht wurde.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>DIE EINSTIEGSPOSITION IST NICHT VERÄNDERBAR.</u></p>
<b>Rückenlehne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rechtes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 3 und</b> rechtes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 4 („5“)</b> <u>gleichzeitig drücken</u>, um die Rückenlehne heraufzufahren; drücken Sie die beiden Pedale <u>zweimal schnell hintereinander</u> (Doppel-Klick) und halten Sie diese gedrückt, um die Rückenlehne herunterzufahren.</li> </ul>
<b>Sperren / Entsperren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Linkes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 1</b> und rechtes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 4 gleichzeitig</b> drücken und gedrückt halten bis die Liege gesperrt ist. Zur Bestätigung ertönt ein akustisches Signal und die LED (Diode) im Mittelteil des Fußschalters leuchtet auf.</li> <li>➤ Zum <u>Entsperren</u> der Liege drücken Sie die beiden Pedale des Fußschalters <u>zweimal schnell hintereinander</u> (Doppel-Klick) und halten diese gedrückt. Es ertönt wiederum ein akustisches Signal und die LED (Diode) im Mittelteil des Fußschalters erlischt.</li> </ul>
<b>Heizsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Linkes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 2</b> und rechtes Teil des Fußschalters, <b>Pedal 4 gleichzeitig</b> drücken, um das Heizsystem mit der ersten Heizstufe einzuschalten, zur nächsten Heizstufe zu wechseln oder um das Heizsystem auszuschalten.</li> <li>➤ Die eingestellte Heizstufe wird mittels einer LED (Diode) im Mittelteil des Fußschalters visualisiert.</li> <li>➤ Bitte beachten Sie die Tabelle in Kapitel 13. HEIZSYSTEM 3- UND 5-MOTORIGE MODELLVARIANTE (optionale Ausstattung).</li> </ul>

### **11.3.3.1 Fußschalter mit Bluetooth (Lina Select Podo 5, optional)**

- ❖ Ein Fußschalter mit Bluetooth kann als Option zusätzlich zum Handschalter angeschlossen werden.
- ❖ Der Fußschalter ermöglicht die Steuerung der Grundfunktionen und das Anfahren der fest eingespeicherten Positionen P1 und P3. Zusätzlich ist die Bedienung des Heizsystems möglich und die Liege kann entsperrt werden.
- ❖ Bei Anlieferung ist der Fußschalter bereits mit der der Steuerung der Liege gekoppelt.
- ❖ Die Bedienung der Grundfunktionen erfolgt, wie mit dem Handschalter, im Doppel-Tipp-System. Dies dient der Sicherheit. Eine Bewegung, die mit Gefahr verbunden ist, wird hierdurch bewusst getätigt.

Durch einfaches Drücken einer Taste und gedrückt Halten wird eine Bewegung nach oben getätigt.

Durch doppeltes Drücken (Doppel-Tipp-System) und gedrückt Halten wird eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung getätigt.

Einige Funktionen werden ebenfalls mittels Doppel-Tipp eingestellt.

- Beim Kauf einer LINA SELECT PODO 5 gehört der Handschalter standardmäßig zum Lieferumfang. Optional, gegen Aufpreis, kann der Fußschalter mit Bluetooth erworben werden.

**HINWEIS!** Der Bluetooth-Fußschalter ist batteriebetrieben.


Bei normaler Nutzung (ein paar Minuten täglich) ist mit einer Batterielevensdauer von 3-4 Jahren zu rechnen.

Ein erneutes Koppeln des Bluetooth-Fußschalters mit der Steuerung der Liege ist beim Wechsel der Batterien nicht notwendig.

**HINWEIS!** Sollte der Bluetooth-Fußschalter trotz Wechsel der Batterien nicht funktionieren, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Kundenservice auf.

**HINWEIS!** Der Bluetooth-Fußschalter muss vor einer Benutzung gegebenenfalls mittels Betätigung einer beliebigen Taste aufgeweckt werden, da er nach ca. drei Sekunden in den Schlafmodus wechselt.

**HINWEIS!** Um das Heizsystem mit der ersten Heizstufe einzuschalten, zur nächsten Heizstufe zu wechseln oder das Heizsystem auszuschalten, müssen die Tasten des Bluetooth-Fußschalters ca. eine Sekunde gedrückt gehalten werden.

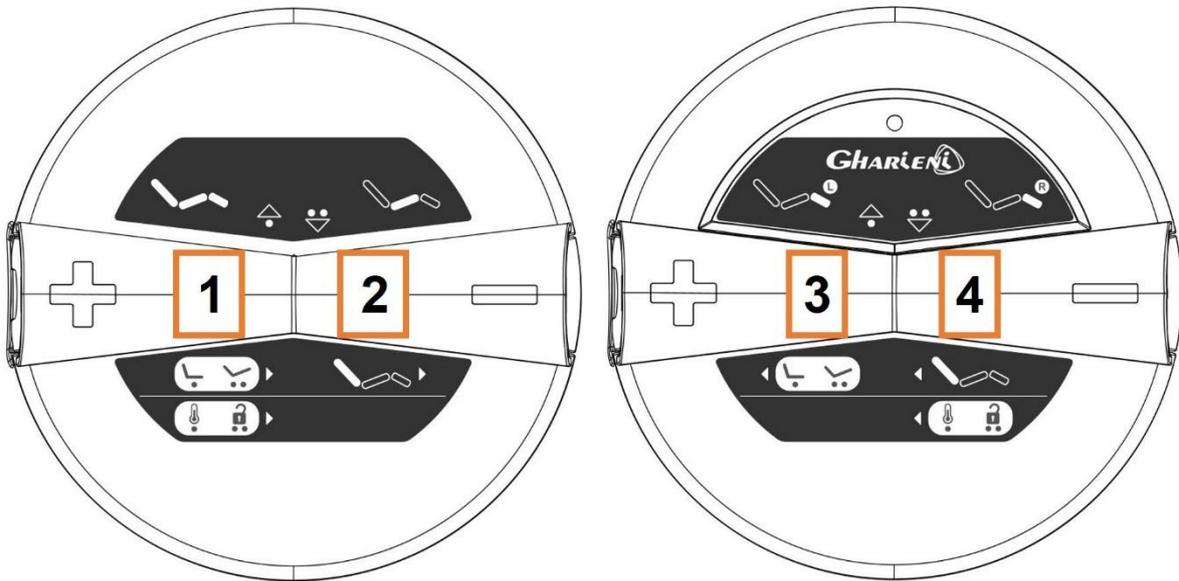

**LINKES TEIL DES FUBSCHALTERS:**

1	ARBEITSHÖHE: <b>AUF / AB</b>
2	SITZNEIGUNG: <b>AUF / AB</b>

**RECHTES TEIL DES FUBSCHALTERS:**

3	LINKES BEINTEIL: <b>AUF / AB</b>
4	RECHTES BEINTEIL: <b>AUF / AB</b>

## LINKES UND RECHTES TEIL DES FUßSCHALTERS:

<b>P1 (Einstiegs- position)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Linkes Teil des Fußschalters, <b>Taste 1</b> und rechtes Teil des Fußschalters, <b>Taste 3</b> <u>gleichzeitig einmal</u> drücken (Einzel-Tipp) und gedrückt halten bis die Position erreicht wurde.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>DIE EINSTIEGSPOSITION IST NICHT VERÄNDERBAR.</u></p>
<b>P3 (Fußpflege- position)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Linkes Teil des Fußschalters, <b>Taste 1</b> und rechtes Teil des Fußschalters, <b>Taste 4</b> <u>gleichzeitig zweimal</u> drücken (Doppel- Tipp) und gedrückt halten bis die Position erreicht wurde.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>DIE FUßPFLEGEPOSITION IST NICHT VERÄNDERBAR.</u></p>
<b>Rückenlehne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Linkes Teil des Fußschalters, <b>Taste 2</b> und rechtes Teil des Fußschalters, <b>Taste 4</b> <u>gleichzeitig einmal</u> drücken und gedrückt halten, um die Rückenlehne hochzufahren bzw. <u>gleichzeitig zweimal</u> drücken (Doppel-Tipp) und gedrückt Halten, um die Rückenlehne herunterzufahren.</li> </ul>
<b>Entsperren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zum Entsperren der Liege drücken Sie die <b>Tasten 1</b> (linkes Teil des Fußschalters) <b>und 4</b> (rechtes Teil des Fußschalters) <u>zweimal schnell hintereinander</u> (Doppel-Tipp) und halten diese gedrückt. Es ertönt ein akustisches Signal.</li> <li>➤ Ob die Liege gesperrt ist, kann anhand der LED über der Taste des Handschalters erkannt werden. Wenn die Liege gesperrt ist, leuchtet die LED.</li> </ul>
<b>Heizsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Linkes Teil des Fußschalters, <b>Taste 1</b> und rechtes Teil des Fußschalters, <b>Taste 4</b> <u>gleichzeitig einmal</u> drücken und ca. eine Sekunde gedrückt halten (Einzel- Tipp), um das Heizsystem mit der ersten Heizstufe einzuschalten, zur nächsten Heizstufe zu wechseln oder um das Heizsystem auszuschalten.</li> <li>➤ Die eingestellte Heizstufe wird mittels einer LED (Diode) über der Taste des Handschalters angezeigt.</li> <li>➤ Bitte beachten Sie die Tabelle in Kapitel 13. HEIZSYSTEM 3- UND 5-MOTORIGE MODELLVARIANTE (optionale Ausstattung).</li> </ul>

## 11.4 Einstellung der Arbeitshöhe

LINA SELECT PODO; 2-MOTORIG	➤ elektrisch
LINA SELECT PODO; 3-MOTORIG	➤ elektrisch
LINA SELECT PODO; 5-MOTORIG	➤ elektrisch

- i** Die elektrischen Einstellungen der **2-motorigen Lina Select Podo** erfolgen **standardmäßig** durch einen FUBSCHALTER.
- i** Die elektrischen Einstellungen der **3-motorigen Lina Select Podo** erfolgen **standardmäßig** durch einen HANDSCHALTER.
- i** Die elektrischen Einstellungen der **5-motorigen Lina Select Podo** erfolgen **standardmäßig** durch einen HANDSCHALTER.
  
- ❖ Benutzen Sie zum Einstellen der ARBEITSHÖHE der **2-motorigen Modellvariante** die entsprechenden Tasten (**1 / 2**) des Fußschalters, s. Abb. in Kapitel 11.1.1 FUBSCHALTER (STANDARDSTEUERUNG).
- ❖ Benutzen Sie zum Einstellen der ARBEITSHÖHE der **3-motorigen Modellvariante** die entsprechende Taste (**T 1**) des Handschalters bzw. das entsprechende Pedal (**1**) des Fußschalters; s. Abb. in Kapitel 11.2.1 HANDSCHALTER (STANDARDSTEUERUNG) oder Abb. in Kapitel 11.3.2 FUBSCHALTER (OPTIONALE STEUERUNG) und Kapitel 11.3.2.1 FUBSCHALTER MIT BLUETOOTH.
- ❖ Benutzen Sie zum Einstellen der ARBEITSHÖHE der **5-motorigen Modellvariante** die entsprechende Taste (**T 1**) des Handschalters bzw. das entsprechende Pedal (**1**) des Fußschalters oder die Taste 1 des Fußschalters mit Bluetooth; s. Abb. in Kapitel 11.3.1 HANDSCHALTER (STANDARDSTEUERUNG) oder Abb. in Kapitel 11.3.3 FUBSCHALTER (OPTIONALE STEUERUNG) und Kapitel 11.3.3.1 FUBSCHALTER MIT BLUETOOTH.
- ❖ Für die Bewegungsrichtung beachten Sie bitte die Pfeil-Symbole und die Anzahl der darüber liegenden Punkte auf dem Handschalter der 5-motorigen Modellvariante bzw. auf den Aufklebern des entsprechenden optionalen Fußschalters.
- ❖ Drücken Sie die Taste bzw. das Pedal einmal und halten Sie dies(e) gedrückt, um die Lina Select hochzufahren. Drücken Sie die Taste bzw. das Pedal zweimal und halten Sie dies(e) gedrückt, um die Lina Select herunterzufahren.
- ❖ Die waagerechte ARBEITSHÖHE der Lina Select Podo ist von ca. 54 cm bis zu ca. 96 cm einstellbar (bei eingedrehten Stellfüßen).
- ❖ Die waagerechte ARBEITSHÖHE der Lina Select Podo mit Soft-Polsterung oder Super-Soft-Polsterung ist, bedingt durch die dickere Polsterung, von mind. ca. 59 cm bis zu mind. ca. 101 cm einstellbar (bei eingedrehten Stellfüßen).
- ❖ Die Einstiegshöhe ist die niedrigste Einstellung des Sitzes:

- **Lina Select Podo:** ca. 54 cm / Sitz in waagerechter Position.
- **Lina Select Podo mit Soft-Polsterung oder Super-Soft-Polsterung:** mind. ca. 59 cm / Sitz in waagerechter Position.

- ❖ Durch Herausdrehen der Stellfüße (bis 3 cm) oder den Einbau von Rollen (ca. 8 cm / optionales Zubehör) setzen Sie die Arbeitshöhe etwas herauf.
- ❖ Im Normalfall kann man seitlich auf die Liege steigen. Dazu können die Armlehnen nach hinten weggeklappt werden, so dass das Einsteigen problemlos erfolgen kann. Da sich das Beinteil um 90° senkrecht stellen lässt, ist das Einsteigen von vorne möglich. Dies ist immer dann vorteilhaft, wenn der Zugang seitlich nicht gewährleistet ist.


## 11.5 Einstellung der Rückenlehne

LINA SELECT PODO; 2-MOTORIG	➤ pneumatisch
LINA SELECT PODO; 3-MOTORIG	➤ elektrisch
LINA SELECT PODO; 5-MOTORIG	➤ elektrisch

- i** Die **pneumatischen Einstellungen** (Rückenlehne / Beinteile) der **2-motorigen Lina Select Podo** erfolgen durch die entsprechenden Gasdruckfedern, die mittels der zugehörigen Hebel betätigt werden.
- i** Die elektrischen Einstellungen der **3-motorigen Lina Select Podo** erfolgen **standardmäßig** durch einen HANDSCHALTER, optional durch einen FUBSCHALTER oder einen FUBSCHALTER MIT BLUETOOTH.
- i** Die elektrischen Einstellungen der **5-motorigen Lina Select Podo** erfolgen **standardmäßig** durch einen HANDSCHALTER, optional durch einen FUBSCHALTER oder einen FUBSCHALTER MIT BLUETOOTH.

### LINA SELECT PODO; 2-MOTORIG

- ❖ Die **pneumatische Einstellung** der RÜCKENLEHNE erfolgt durch die entsprechende Gasdruckfeder, die mittels des zugehörigen Hebels betätigt wird.

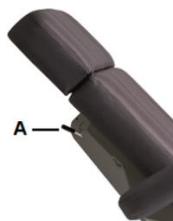

*Abbildung ähnlich: Farbe und Polsterung können je nach Modell variieren.*

**A**

**GASDRUCKFEDERHEBEL** der Rückenlehne

## LINA SELECT PODO; 3-MOTORIG

- ❖ Die Neigung der RÜCKENLEHNE lässt sich per Handschalter, optionalem Fußschalter oder Fußschalter mit Bluetooth einstellen.
- ❖ Benutzen Sie zum Einstellen der RÜCKENLEHNE die entsprechenden Taste (**T2**) des Handschalters bzw. **Pedal 2** des optionalen Fußschalters oder **Taste 2** des Fußschalters mit Bluetooth; s. Abb. in Kapitel 11.2.1 HANDSCHALTER (STANDARDSTEUERUNG) oder Abb. in Kapitel 11.3.2 FUßSCHALTER (OPTIONALE STEUERUNG) und Kapitel 11.3.2.1 FUßSCHALTER MIT BLUETOOTH.
- ❖ Für die Bewegungsrichtung beachten Sie bitte die Pfeil-Symbole Symbole und die Anzahl der darüber liegenden Punkte auf dem Handschalter bzw. auf den Aufklebern des optionalen Fußschalters.
- ❖ Drücken Sie die Tasten bzw. die Pedale einmal und halten Sie diese gedrückt, um die Rückenlehne hochzufahren. Drücken Sie die Tasten bzw. die Pedale zweimal und halten Sie diese gedrückt, um die Rückenlehne herunterzufahren.

**⚠ WARNUNG!** Achten Sie beim Einstellen unbedingt darauf, dass am Rand zwischen Rückenteil und Sitz kein Finger eingeklemmt wird. Diese beiden Stellen sind mit einem gelben Warndreieck an der Behandlungsliege markiert<sup>10</sup>.

## LINA SELECT PODO; 5-MOTORIG

- ❖ Die Neigung der RÜCKENLEHNE lässt sich per Handschalter oder per optionalem Fußschalter einstellen.
- ❖ Benutzen Sie zum Einstellen der RÜCKENLEHNE die entsprechenden Tasten (**T 3 und T 4**) des Handschalters **in Kombination** bzw. die **Pedale 3 und 4** des optionalen Fußschalters **in Kombination** bzw. die **Tasten 2 und 4** des optionalen Fußschalters mit Bluetooth; s. Abb. in Kapitel 11.3.1 HANDSCHALTER (STANDARDSTEUERUNG) oder Abb. in Kapitel 11.3.3 FUßSCHALTER (OPTIONALE STEUERUNG) und Kapitel 11.3.3.1 FUßSCHALTER MIT BLUETOOTH.
- ❖ Für die Bewegungsrichtung beachten Sie bitte die Pfeil-Symbole Symbole und die Anzahl der darüber liegenden Punkte auf dem Handschalter bzw. auf den Aufklebern des optionalen Fußschalters.
- ❖ Drücken Sie die Tasten bzw. die Pedale einmal und halten Sie diese gedrückt, um die Rückenlehne hochzufahren. Drücken Sie die Tasten bzw. die Pedale zweimal und halten Sie diese gedrückt, um die Rückenlehne herunterzufahren.

---

<sup>10</sup> abhängig vom Modell

**⚠️ WARNUNG!** Achten Sie beim Einstellen unbedingt darauf, dass am Rand zwischen Rückenteil und Sitz kein Finger eingeklemmt wird. Diese beiden Stellen sind mit einem gelben Warndreieck an der Behandlungsliege markiert<sup>11</sup>.

## 11.6 Einstellung der Sitzneigung

LINA SELECT PODO; 2-MOTORIG	➤ elektrisch
LINA SELECT PODO; 3-MOTORIG	➤ elektrisch
LINA SELECT PODO; 5-MOTORIG	➤ elektrisch

- i** Die elektrischen Einstellungen der **2-motorigen Lina Select Podo** erfolgen **standardmäßig** durch einen FUBSCHALTER.
  - i** Die elektrischen Einstellungen der **3-motorigen Lina Select Podo** erfolgen **standardmäßig** durch einen HANDSCHALTER, optional durch einen FUBSCHALTER oder einen FUBSCHALTER MIT BLUETOOTH.
  - i** Die elektrischen Einstellungen der **5-motorigen Lina Select Podo** erfolgen **standardmäßig** durch einen HANDSCHALTER, optional durch einen FUBSCHALTER oder einen FUBSCHALTER MIT BLUETOOTH.
- ❖ Die SITZNEIGUNG der Lina Select Podo lässt sich ebenfalls per Handschalter oder per optionalem Fußschalter einstellen.
  - ❖ Die SITZNEIGUNG ist frei verstellbar (siehe Abbildung unten).
  - ❖ Benutzen Sie zum Einstellen der SITZNEIGUNG der 2-motorigen Modellvariante die entsprechenden Tasten (**3 / 4**) des Fußschalters; s. Abb. in Kapitel 11.1.1 FUBSCHALTER (STANDARDSTEUERUNG).
  - ❖ Benutzen Sie zum Einstellen der SITZNEIGUNG der 3-motorigen Modellvariante die entsprechenden **Taste (T3)** bzw. **Pedal 3** des optionalen Fußschalters oder **Taste 3** des Fußschalters mit Bluetooth; s. Abb. in Kapitel 11.2.1 HANDSCHALTER (STANDARDSTEUERUNG) oder Abb. in Kapitel 11.3.2 FUBSCHALTER (OPTIONALE STEUERUNG) und Kapitel 11.3.2.1 FUBSCHALTER MIT BLUETOOTH.
  - ❖ Benutzen Sie zum Einstellen der SITZNEIGUNG der 5-motorigen Modellvariante die entsprechende **Taste (T 2)** des Handschalters bzw. das **Pedal 2** des optionalen Fußschalters bzw. **Taste 2** des optionalen Fußschalters mit Bluetooth; s. Abb. in Kapitel 11.3.1 HANDSCHALTER (STANDARDSTEUERUNG) oder Abb. in Kapitel 11.3.3 FUBSCHALTER (OPTIONALE STEUERUNG) und Kapitel 11.3.3.1 FUBSCHALTER MIT BLUETOOTH.
  - ❖ Für die Bewegungsrichtung beachten Sie bitte die Pfeil-Symbole und die Anzahl der darüber liegenden Punkte auf dem Handschalter bzw. auf den Aufklebern des optionalen Fußschalters.

<sup>11</sup> abhängig vom Modell

- ❖ Drücken Sie die Tasten bzw. die Pedale einmal für eine Aufwärtsbewegung bzw. zweimal für eine Abwärtsbewegung und halten Sie diese jeweils gedrückt, um die Neigung des Sitzbereichs zu verstellen.



Abbildung ähnlich: Farbe, Polsterung und Ausführung können je nach Modell variieren.


## 11.7 Einstellung der Beinteile

LINA SELECT PODO; 2-MOTORIG	➤ pneumatisch
LINA SELECT PODO; 3-MOTORIG	➤ pneumatisch
LINA SELECT PODO; 5-MOTORIG	➤ elektrisch

- i** Die **pneumatischen Einstellungen** (Rückenlehne / Beinteile) der **2-motorigen Lina Select Podo** erfolgen durch die entsprechenden Gasdruckfedern, die mittels der zugehörigen Hebel betätigt werden.
  - i** Die **pneumatischen Einstellungen** (Beinteile) der **3-motorigen Lina Select Podo** erfolgen durch die entsprechenden Gasdruckfedern, die mittels der zugehörigen Hebel betätigt werden.
  - i** Die elektrischen Einstellungen der **5-motorigen Lina Select Podo** erfolgen **standardmäßig** durch einen HANDSCHALTER, optional durch einen FUBSCHALTER oder einen FUBSCHALTER MIT BLUETOOTH.
- ❖ Die höchste Stellung der BEINTEILE ist erreicht, wenn sie eine Linie mit dem Sitz bilden; s. Abb. unten.

### LINA SELECT PODO; 2-MOTORIG:

- ❖ Die Beinteile können getrennt voneinander pneumatisch verstellt werden.
- ❖ Die **pneumatischen Einstellungen** der BEINTEILE erfolgen durch die entsprechenden Gasdruckfedern, die mittels der zugehörigen Hebel betätigt werden. Die Gasdruckfedern befinden sich an den Unterseiten der Beinteile und die Gasdruckfederhebel befinden sich an den Seiten der Beinteile; s. Abb. unten.

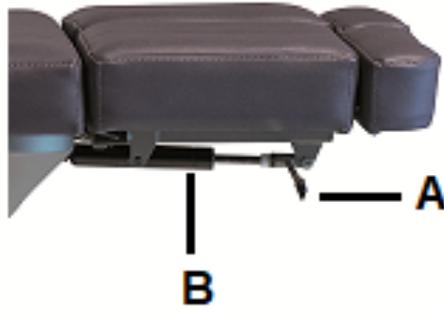

A	GASDRUCKFEDERHEBEL
B	GASDRUCKFEDER

**LINA SELECT PODO; 3-MOTORIG:**

- ❖ Die Beinteile können getrennt voneinander pneumatisch verstellt werden.
- ❖ Die **pneumatischen Einstellungen** der BEINTEILE erfolgen durch die entsprechenden Gasdruckfedern, die mittels der zugehörigen Hebel betätigt werden. Die Gasdruckfedern befinden sich an den Unterseiten der Beinteile und die Gasdruckfederhebel befinden sich an den Seiten der Beinteile.

**LINA SELECT PODO; 5-MOTORIG:**



4	SITZFLÄCHE
8	BEINTEILE

- ❖ Die Neigung der BEINTEILE lässt sich per Handschalter oder per optionalem Fußschalter einstellen.
- ❖ Die Beinteile können getrennt voneinander elektrisch verstellt werden.

- ❖ Benutzen Sie zum Einstellen der **BEINTEILE** die entsprechenden Tasten (**T 3 / T 4**) des Handschalters bzw. die **Pedale 3 und 4** des optionalen Fußschalter bzw. die **Tasten 3 und 4** des optionalen Fußschalters mit Bluetooth; s. Abb. in Kapitel 11.3.1 HANDSCHALTER (STANDARDSTEUERUNG) oder Abb. in Kapitel 11.3.3 FUBSCHALTER (OPTIONALE STEUERUNG) und Kapitel 11.3.3.1 FUBSCHALTER MIT BLUETOOTH.
- ❖ Für die Bewegungsrichtung beachten Sie bitte die Pfeil-Symbole und die Anzahl der darüber liegenden Punkte auf dem Handschalter bzw. auf den Aufklebern des optionalen Fußschalters.
- ❖ Drücken Sie die jeweilige Taste bzw. das jeweilige Pedal einmal für eine Aufwärtsbewegung bzw. zweimal für eine Abwärtsbewegung und halten Sie diese jeweils gedrückt, um das jeweilige Beinteil zu verstellen.

### 11.7.1 Fußstützen

LINA SELECT PODO; 2-MOTORIG	➤ manuell ausziehbar
LINA SELECT PODO; 3-MOTORIG	➤ manuell ausziehbar
LINA SELECT PODO; 5-MOTORIG	➤ manuell ausziehbar

- ❖ Wie die **KOPFSTÜTZE**, lassen sich auch die unteren Teile der Beinpolsterung (**FUBSTÜTZEN / 9**) verlängern, indem man sie leicht herauszieht; s. Abb. unten. Durch ein Verstellen entsprechend den vorgegebenen Arretierungen können Sie die Fußstützen Ihrem Kunden anpassen.
- ❖ Außerdem lassen sich die **FUBSTÜTZEN (9)** komplett herausnehmen, um im Fersenbereich (Pediküre, Fußpflege etc.) arbeiten zu können oder für den Fußknick, um bei Massagen ohne zusätzliche Hilfsmittel arbeiten zu können.



*Abb. ähnlich: Farbe, Polsterung und Ausführung können je nach Modell variieren.*

<b>8</b>	<b>BEINTEIL</b>
<b>9</b>	MANUELL AUSZIEHBARE <b>FUBSTÜTZE</b>
<b>A</b>	<b>GASDRUCKFEDERHEBEL</b> DES BEINTEILS (nur bei der <b>2-motorigen</b> und der <b>3-motorigen</b> Modellvariante)

## 11.8 weitere Einstellmöglichkeiten

### 11.8.1 Kopfstütze

- ❖ Die jeweilige Kopfstütze (6 / s. Abb. in Kapitel 10.4 ANSICHT) befindet sich in demselben Karton bei der Liege.
- ❖ Schieben Sie die verchromten Rohre der Kopfstütze in die Halterungen oben an der Rückenlehne, bis diese einrasten.
- ❖ Durch ein Verstellen entsprechend den vorgegebenen Arretierungen können Sie die Höhe leicht an verschiedene Körpergrößen anpassen.
- ❖ Die Kopfstütze kann ganz abgenommen werden, indem Sie diese aus den Halterungen nach oben herausziehen.



Abbildung ähnlich: Farbe und Polsterung können je nach Modell variieren.



Um in der Massageposition einen Nasenschlitz zu erhalten, wird die Kopfstütze um ca. 10 cm herausgezogen.

- i** Optional ist auch unsere beliebte NACKENSTÜTZE „DENTALAX“ erhältlich (siehe auch Kapitel 18. OPTIONAL BESTELLBARES ZUBEHÖR). Die NACKENSTÜTZE „DENTALAX“ dient zur anatomischen Stützung der Halswirbel und erhöht das Liegeempfinden nochmals erheblich.

**⚠️ WARNUNG!** Üben Sie, unabhängig von der Liegeflächeneinstellung, keinesfalls physikalische Kraft auf die Kopfstütze aus. Bei Missachtung dieser Anweisung kann die Stützkonstruktion der Lina Select Podo dauerhaft beschädigt werden. KIPPGEFAHR! BRUCHGEFAHR! VERLETZUNGSGEFAHR!

**HINWEIS!** Lehnen Sie sich nicht gegen die Kopfstütze! Stellen und setzen Sie sich niemals auf die Kopfstütze; ansonsten können Sie diese nachhaltig beschädigen! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

### 11.8.2 Armlehnen

- ❖ Die Armlehnen (7 / s. Abb. in Kapitel 10.4 ANSICHT) stehen immer parallel zum Sitz.
- ❖ Zum seitlichen Einsteigen können sie auch nach **hinten umgeklappt** werden (s. Abb. unten).
- ❖ Die Armlehnen sind beidseitig gepolstert (s. Abb. unten) und bieten ein komfortables Ablegen der Arme in verschiedenen Behandlungspositionen.



*Abbildung ähnlich: Farbe und Polsterung können je nach Modell variieren.*

**HINWEIS!** Lehnen Sie sich nicht gegen die Armlehnen! Stellen, setzen oder knien Sie sich niemals auf die Armlehnen; ansonsten können Sie diese nachhaltig beschädigen! **BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

**HINWEIS!** Die **maximale** Belastbarkeit der Armlehnen beträgt **25 kg**.

### 11.8.3 Beinteile

- i** Siehe auch Kapitel 11.7 EINSTELLUNG DER BEINTEILE.
- ❖ Die Beinteile der Lina Select Podo sind vierteilig (2 Beinteile / 2 Fußstützen) und lassen sich elektrisch verstellen (modellabhängig).
- ❖ Im Normalfall kann man seitlich auf die Liege steigen. Dazu können die Armlehnen nach hinten weggeklappt werden, so dass das Einsteigen problemlos erfolgen kann.
- ❖ Da sich die Beinteile um 90° senkrecht stellen lassen (s. Abb. unten), ist das Einsteigen von vorne möglich. Dies ist immer dann vorteilhaft, wenn der Zugang seitlich nicht gewährleistet ist.

- ❖ Wie das Kopfteil lassen sich auch die unteren Teile der Beinpolsterung (Fußstützen) verlängern, indem man sie leicht herauszieht. Außerdem lassen sich diese ganz herausnehmen, um im Fersenbereich (Pediküre / Fußpflege) arbeiten zu können oder für den Fußknick, um bei Massagen ohne zusätzliche Hilfsmittel arbeiten zu können.



*Abbildung ähnlich: Farbe, Polsterung und Ausführung können je nach Modell variieren.*

#### 11.8.4 Rückenlehne

- ❖ Die Rückenlehne (5 / s. Abb. in Kapitel 10.4 ANSICHT) der Lina Select Podo ist je nach Modellvariante- pneumatisch **oder** elektrisch verstellbar; s. Kapitel 11.5 EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE.
- ❖ Die Lina Select Podo ist mit einem mechanischen AIRBACK© für die Lordoseunterstützung ausgestattet, der sich in der Rückenlehne befindet.

#### **MECHANISCH VERSTELLBARER AIRBACK©:**

- ❖ Diese Option ist bei allen Polsterungen der Lina Select Podo in manueller Form Standard.
- ❖ In der Rückenlehne der Behandlungsliege befindet sich im Lordosebereich ein Luftkissen, das durch eine graue Handpumpe aufgepumpt werden kann. Diese Funktion wird immer benötigt, wenn der Kunde auf dem Rücken auf der Behandlungsliege liegt. Es unterstützt die menschliche Anatomie (S-förmige Wirbelsäule) und erhöht den Liegekomfort. Dies gilt im Besonderen für Menschen mit einem Hohlkreuz, bei deren Behandlung Sie entsprechend mehr Luft in den AIRBACK© hineinpumpen.
  - Sollte der Kunde sich auf dem Bauch liegend auf der Behandlungsliege befinden, kann der AIRBACK© **nicht** eingesetzt werden.
  - Lassen Sie in diesem Fall mittels des schwarzen Knopfes an der grauen Handpumpe die im AIRBACK© befindliche Luft ab.

**HINWEIS!** Pumpen Sie die Luftkammern nicht zu stark auf; anderenfalls können die Kissen durch das Eigengewicht des Kunden eventuell beschädigt werden.

## 12. Smart Thermo 3-Heizsystem der 2-motorigen Modellvariante (optionale Ausstattung)

---

<b>ABKÜRZUNG:</b>	SMART THERMO = SMART THERMO 3-HEIZSYSTEM
-------------------	--

❖ Die Liegefläche der 2-motorigen Modellvariante der Lina Select Podo kann zur Erhöhung des Komforts beheizt werden. Die Smart Thermo ist ein vorprogrammiertes und vollautomatisches Heizsystem, welches eine komfortable Bedienung ermöglicht. Die intelligente Smart Thermo ist in das Polster der Liege integriert und arbeitet mit moderner Mikroprozessor-Technologie. Für die Lina Select Podo ist die Smart Thermo optional gegen Aufpreis erhältlich.

**i** Aufgrund des vorprogrammierten Mikrochips müssen Sie die Smart Thermo nur mit der Einschalttaste einschalten, um das automatische Heizprogramm zu starten. Zum schnellen Aufheizen der kalten Liegefläche wird nach dem Start für die Dauer der Vorheizzeit mit maximaler Leistung geheizt. Das Heizprogramm der Smart Thermo ist vollautomatisiert und schaltet sich nach Ablauf der Gesamtzeit (100 Minuten) automatisch ab.

➤ s. Kapitel 12.1 BEDIENUNG.

**i** Die Heizungsparameter der Smart Thermo lassen sich bei Bedarf außerdem nach eigenem Wunsch verändern (s. Kapitel 12.1 BEDIENUNG): Mit dem Heizungsbedienfeld (s. Abb. in Kapitel 12.1) können, sowohl die Heizleistung als auch die Heizdauer individuell eingestellt werden.

**i** Vor der Benutzung der Liege sollte die tatsächliche Temperatur überprüft werden und die Liege bei längerer Nichtbenutzung (z.B. über Nacht) vom Stromnetz getrennt werden.

**⚠ VORSICHT!** Falls Ihre Lina Select Podo mit dem optional erhältlichen Smart Thermo-Heizsystem ausgestattet ist, dürfen keine schweren Decken, Kleidungsstücke o.Ä. auf die Polsterung gelegt werden während das Heizsystem eingeschaltet ist. Anderenfalls kann ein Hitzestau entstehen. **BESCHÄDIGUNGSGEFAHR! VERBRENNUNGSGEFAHR!**

**⚠️ WARNUNG!**

1. Benutzen Sie die Option Smart Thermo **nicht** in folgenden Fällen:
  - bei Kunden mit Herzschrittmachern.
  - bei Schwangeren.
  - bei Kunden mit Thrombose.
  - bei Kunden, die unter Schmerzen unbekannter Ursache leiden.
2. Anwendung **ausschließlich** bei gesunden Menschen.
3. Bei vorzeitigem Beenden der Behandlung muss die Smart Thermo Funktion durch Drücken der Taste „Off“ auf dem Bedienfeld ausgeschaltet werden, um einen Hitzestau zu vermeiden.
4. Trennen Sie die Lina Select Podo von der Stromversorgung, wenn sie über längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. über Nacht.

**⚠️ WARNUNG!** Menschen mit akuten Schmerzen, Venenleiden, niedrigem Blutdruck, entzündlichen Prozessen und anderen Krankheitsbildern, die Wärmeanwendungen oder diese Form der Patientenpositionierung bedenklich machen, **müssen** immer vor der Anwendung den Arzt konsultieren.

**⚠️ WARNUNG!** Verwenden Sie die Lina Select Podo und / oder die Smart Thermo niemals bei Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

**⚠️ WARNUNG!** Bei der Ausführung mit dem Smart Thermo Heizsystem<sup>12</sup> befinden sich die Kabel zwischen der Polsterung und dem Untergestell (modellabhängig). **Das Abnehmen der Polsterung darf nur durch von uns autorisierten Personen durchgeführt werden.**

---

<sup>12</sup> optionale Ausstattung

## 12.1 Bedienung

- ❖ Die Bedienung der Liegenheizung erfolgt mit Hilfe der vier Tasten   und ,  (s. Abb. unten: BEDIENFELD).
- ❖ Die Einstellung der Heizleistung und die Zeitauswahl wird durch den 10-stufigen LED-Balken dargestellt.

### BEDIENFELD:



EINSCHALTTASTE



AUSSCHALTTASTE




TEMPERATURAUSWAHLTASTE



ZEITAUSWAHLTASTE

## LED - LEISTE:

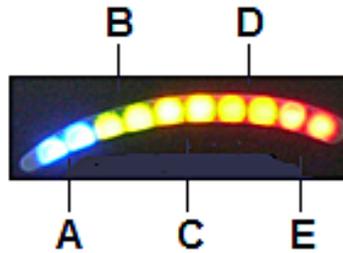

A	2 blaue LEDs
B	2 grüne LEDs
C	2 gelbe LEDs
D	2 orangene LEDs
E	2 rote LEDs



## EINSCHALT-TASTE:

- ❖ Mit dieser Taste schalten Sie die Smart Thermo **ein**.
  - 1. Wenn Sie die Smart Thermo einschalten, heizt das Gerät für die Dauer von **5 Minuten** auf maximaler Wärme- / Leistungsstufe (**Stufe 5**: die 2 **roten** LEDs (**E**) leuchten).
  - 2. Nach Ablauf der 5 Minuten heizt die Smart Thermo automatisch für **weitere 95 Minuten** auf minimaler Wärme- / Leistungsstufe (**Stufe 1**: die 2 **blauen** LEDs (**A**) leuchten).
  - 3. Nach Ablauf der Gesamtzeit (**100 Minuten**) schaltet sich die Heizung **automatisch** ab.
- ❖ Dieser Ablauf ist vorprogrammiert.
- Die **Wärme- / Leistungsstufe** und die **Heizdauer** der Smart Thermo können jedoch jederzeit mit den entsprechenden Tasten verändert werden;  
(s. Beschreibung unten:  TEMPERATURAUSWAHLTASTE /  ZEITAUSWAHLTASTE).



### AUSSCHALT-TASTE:

- ❖ Mit dieser Taste schalten Sie die Smart Thermo **aus**.




### TEMPERATURAUSWAHLTASTE:

- ❖ Mit dieser Taste können Sie die **Temperatur** der Smart Thermo und damit die gewünschte Wärme einstellen.

**ES STEHEN IHNEN DABEI FÜNF WÄRME- / LEISTUNGSSTUFEN ZUR VERFÜGUNG:**

Stufe 1	<b>Minimale Leistung</b> = geringe Temperatur
Stufe 2	Wärme- / Leistungsstufe <b>zwischen</b> minimaler und mittlerer Leistung
Stufe 3	<b>Mittlere Leistung</b> = mittlere Temperatur
Stufe 4	Wärme- / Leistungsstufe <b>zwischen</b> mittlerer und maximaler Leistung
Stufe 5	<b>Maximale Leistung</b> = hohe Temperatur

**Die gewählte Wärme- / Leistungsstufe wird Ihnen dabei über die oberhalb der Bedientasten liegenden LED-Leiste angezeigt:**

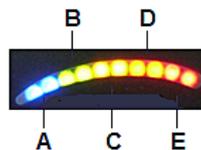

Taste	<b>1x</b> drücken	Stufe <b>1</b>	blaue LEDs ( <b>A</b> )
Taste	<b>2x</b> drücken	Stufe <b>2</b>	grüne LEDs ( <b>B</b> )
Taste	<b>3x</b> drücken	Stufe <b>3</b>	gelbe LEDs ( <b>C</b> )
Taste	<b>4x</b> drücken	Stufe <b>4</b>	orangene LEDs ( <b>D</b> )
Taste	<b>5x</b> drücken	Stufe <b>5</b>	rote LEDs ( <b>E</b> )

- Durch erneutes Drücken der Taste  (6x) beginnt der Auswahlzyklus wieder bei **Stufe 1**.



#### ZEITAUSWAHLTASTE:

- ❖ Mit dieser Taste können Sie die gewünschte **Heizdauer** der Smart Thermo einstellen.
- Es stehen Ihnen dabei **zehn Zeiteinstellungen** (in 10 Minuten Intervallen) zur Verfügung, die wiederum auf der LED - Leiste (10 LEDs) angezeigt werden.
- Sie können durch ein- oder mehrmaligen Tastendruck eine Heizdauer von **10 Minuten bis 100 Minuten** wählen.
- Eine erleuchtete LED entspricht dabei 10 Minuten.
- Nach Ablauf der gewünschten Zeiteinstellung schaltet sich die Smart Thermo **automatisch** ab.

#### BEISPIEL:


**Sie möchten eine mittlere Wärme- / Leistungsstufe (Stufe 3) für 30 Minuten einstellen. Gehen Sie dabei bitte wie folgt vor:**

1. Schalten Sie das Gerät über die Einschalttaste  ein.
2. Wählen Sie nun die TEMPERATURAUSWAHLTASTE . Drücken Sie diese so oft, bis die beiden **gelben** LEDs (C) erleuchtet sind (s. Abb. unten).



3. Das Gerät ist nun auf die mittlere Wärme- / Leistungsstufe (**Stufe 3**) eingestellt.

4. Wählen Sie nun die ZEITAUSWAHLTASTE .
5. Drücken Sie diese Taste so oft, bis **drei** der zehn LEDs erleuchtet sind (**zwei blaue LEDs und eine grüne LED** / s. Abb. unten).

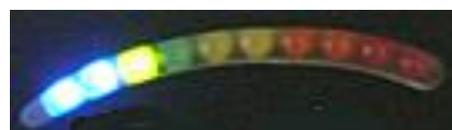

6. **Eine** erleuchtete LED entspricht dabei einer Heizdauer von **10 Minuten**.
  7. Das Gerät heizt nun auf der gewählten Wärme- / Leistungsstufe für die Dauer von 30 Minuten.
  8. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich die Smart Thermo **automatisch** ab.
- Wenn Sie die Heizdauer **vorzeitig** beenden möchten, drücken Sie die Taste  um die Smart Thermo auszuschalten.
  - ❖ Bei der Programmierung der Smart Thermo ist es unerheblich, ob Sie **zuerst** die Zeit einstellen möchten und **dann** die Temperatur, **oder** umgekehrt.
  - ❖ Es ist nicht möglich die Heizfunktion **unabhängig** von der Zeitauswahl einzuschalten. Die Mindest-Heizdauer beträgt 10 Minuten (**eine** erleuchtete LED); die maximale Heizdauer beträgt 100 Minuten (**zehn** erleuchtete LEDs).
  - ❖ Sie können jederzeit die gewählten Einstellungen durch Druck auf die entsprechende Taste kontrollieren.
  - ❖ Die Smart Thermo ist mit einer Erinnerungsfunktion ausgestattet, die nach dem Einschalten immer die zuletzt gewählte Einstellung aktiviert.

## 13. Heizsystem 3- und 5-motorige Modellvariante (optionale Ausstattung)

---

- ❖ Die Liegefläche der 3- und der 5-motorigen Modellvariante der Lina Select Podo kann zur Erhöhung des Komforts beheizt werden. Es handelt sich um ein vorprogrammiertes und vollautomatisches Heizsystem, welches eine komfortable Bedienung ermöglicht. Das Heizsystem ist in das Polster der Liege integriert und arbeitet mit moderner Mikroprozessor-Technologie. Für die 3- und die 5-motorige Modellvariante der Lina Select Podo ist das Heizsystem optional gegen Aufpreis erhältlich.
  - i** Aufgrund des vorprogrammierten Mikrochips müssen Sie das Heizsystem nur mit der Einschalttaste einschalten, um das Heizsystem mit der niedrigsten Wärme- / Leistungsstufe zu starten. Das Heizprogramm ist vollautomatisiert und schaltet sich nach Ablauf der Gesamtzeit (90 Minuten) automatisch ab.
- s. Kapitel 13.1 BEDIENUNG

- ❖ Es können verschiedene automatische Sperrzeiten eingestellt werden, siehe Kapitel 11.2.1.1. und 11.3.1.1 SPERRFUNKTION.  
Der aktuell laufende Heizzyklus ist davon **nicht beeinträchtigt**.
- ❖ Auch eine **manuelle** Sperrung **beeinträchtigt** den aktuell laufenden Heizzyklus **nicht** und hat **keine Auswirkung auf die Bedienung des Heizsystems**.
  - s. Kapitel 11.2.1.1 und 11.3.1.1 SPERRFUNKTION.
  - s. Kapitel 11.3.2 und 11.3.3 FUßSCHALTER (OPTIONALE STEUERUNG).  
und Kapitel 11.3.2.1 und 11.3.3.1 FUßSCHALTER MIT BLUETOOTH.

**⚠ VORSICHT!** Falls Ihre Lina Select mit dem optional erhältlichen Heizsystem ausgestattet ist, dürfen keine schweren Decken, Kleidungsstücke o.Ä. auf die Polsterung gelegt werden während das Heizsystem eingeschaltet ist. Anderenfalls kann ein Hitzestau entstehen. **BESCHÄDIGUNGSGEFAHR! VERBRENNUNGSGEFAHR!**

**HINWEIS!** Die jeweils aktive Heizstufe wird mittels einer LED (Diode) über der Taste des Handschalters oder im Mittelteil des optionalen Fußschalters visualisiert. Die Häufigkeit des Impulses zur Visualisierung variiert entsprechend der aktiven Heizstufe.

**⚠ WARNUNG!**

1. Benutzen Sie die Option Heizsystem **nicht** in folgenden Fällen:
  - bei Kunden mit Herzschrittmachern.
  - bei Schwangeren.
  - bei Kunden mit Thrombose.
  - bei Kunden, die unter Schmerzen unbekannter Ursache leiden.
2. Anwendung **ausschließlich** bei gesunden Menschen.
3. Bei vorzeitigem Beenden der Behandlung muss das Heizsystem durch Drücken der entsprechenden Taste auf dem Handschalter bzw. der Pedale oder Tasten auf dem jeweiligen optionalen Fußschalter ausgeschaltet werden, um einen Hitzestau zu vermeiden.
4. Trennen Sie die Lina Select Podo von der Stromversorgung, wenn sie über längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. über Nacht.

**⚠️ WARNUNG!** Menschen mit akuten Schmerzen, Venenleiden, niedrigem Blutdruck, entzündlichen Prozessen und anderen Krankheitsbildern, die Wärmeanwendungen oder diese Form der Kundenpositionierung bedenklich machen, **müssen** immer vor der Anwendung einen Arzt konsultieren.

**⚠️ WARNUNG!** Verwenden Sie die Lina Select Podo und / oder das Heizsystem niemals bei Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

**⚠️ WARNUNG!** Bei der Ausführung mit dem Heizsystem befinden sich die Kabel zwischen der Polsterung und dem Untergestell.  
**Das Abnehmen der Polsterung darf nur durch von uns autorisierten Personen durchgeführt werden.**

## 13.1 Bedienung

- ❖ Die Bedienung der Liegenheizung erfolgt mit Hilfe der Taste  (T 12) des Handschalters.
- ❖ Zur Bedienung mittels des optionalen Fußschalters oder mittels des Fußschalters mit Bluetooth s. Kapitel 11.3.2 und 11.3.3 FUBSCHALTER (OPTIONALE STEUERUNG) und Kapitel 11.3.2.1 und 11.3.3.1 FUBSCHALTER MIT BLUETOOTH.



### EINSCHALT-TASTE:

- ❖ Mit dieser Taste schalten Sie das Heizsystem **ein**.

Das Heizsystem verfügt über drei Wärme- / Leistungsstufen.  
Zum schnellen Aufheizen der Liegefläche vor Beginn einer Behandlung empfehlen wir Ihnen, das Heizsystem auf Stufe 2 einzustellen; nur in Ausnahmefällen auf Stufe 3 (höchste Stufe).

- i** Zur Bedienung des Heizsystems beachten Sie bitte die folgende Tabelle.
- i** Nach Ablauf der Gesamtzeit (**90 Minuten**) schaltet sich das Heizsystem **automatisch** ab; unabhängig von der eingestellten Heizstufe.
- ❖ Dieser Ablauf ist vorprogrammiert.



### AUSSCHALT-TASTE:

- ❖ Mit dieser Taste schalten Sie das Heizsystem auch **aus**.

**Es stehen Ihnen drei Wärme- / Leistungsstufen zur Auswahl:**

		Heizstufe	Visualisierung mittels LED (Diode)	Heizleistung
Taste 	Taste <b>1x</b> drücken	einschalten / Stufe <b>1</b>	<b>Einzelimpuls</b> für 0,3 Sek., Abstand 1 Sek.	30 %
Taste 	Taste <b>ein</b> <b>weiteres Mal</b> drücken	Stufe <b>2</b>	<b>Doppelimpuls</b> , Aufleuchten für 0,3 Sek., Abstand 1 Sek.	60 %
Taste 	Taste <b>ein</b> <b>weiteres Mal</b> drücken	Stufe <b>3</b>	<b>Dreifachimpuls</b> , Aufleuchten für 0,3 Sek., Abstand 1 Sek.	90 %
Taste 	Taste <b>ein</b> <b>weiteres Mal</b> drücken	ausschalten		

**HINWEIS!** Wenn das Heizsystem an Ihrer Liege nicht vorhanden ist, wird Ihnen dies bei Betätigung der Taste zur Bedienung des Heizsystems durch schnelles Blinken der LED über der Taste signalisiert.

Zur Bedienung mittels des optionalen Fußschalters mit Kabel und mittels des Bluetooth-Fußschalters stehen Ihnen ebenfalls drei Wärme- / Leistungsstufen zur Auswahl:

		Heizstufe	Visualisierung mittels LED (Diode)	Heizleistung
Pedale / Tasten  2 + 4	Pedale / Tasten <b>1x</b> drücken	einschalten / Stufe <b>1</b>	<b>Einzelimpuls</b> für 0,3 Sek., Abstand 1 Sek.	30 %
Pedale / Tasten  2 + 4	Pedale / Tasten <b>ein weiteres Mal</b> drücken	Stufe <b>2</b>	<b>Doppelimpuls,</b> Aufleuchten für 0,3 Sek., Abstand 1 Sek.	60 %
Pedale / Tasten  2 + 4	Pedale / Tasten <b>ein weiteres Mal</b> drücken	Stufe <b>3</b>	<b>Dreifachimpuls,</b> Aufleuchten für 0,3 Sek., Abstand 1 Sek.	90 %
Pedale / Tasten  2 + 4	Pedale / Tasten <b>ein weiteres Mal</b> drücken	ausschalten		

**HINWEIS!** Für die Bedienung des Heizsystems mittels des Bluetooth-Fußschalters siehe Kapitel 11.3.2.1. und 11.3.3.1.

**HINWEIS!** Wenn das Heizsystem an Ihrer Liege nicht vorhanden ist, wird Ihnen dies bei Betätigung der Pedale zur Bedienung des Heizsystems durch schnelles Blinken der LED im Mittelteil des Fußschalters mit Kabel signalisiert.

**HINWEIS!** Der Bluetooth-Fußschalter muss gegebenenfalls mittels Betätigung einer beliebigen Taste vor einer Benutzung aufgeweckt werden, da er nach ca. drei Sekunden in den Schlafmodus wechselt.

**HINWEIS!** Um das Heizsystem mit der ersten Heizstufe einzuschalten, zur nächsten Heizstufe zu wechseln oder das Heizsystem auszuschalten, müssen die Tasten des Bluetooth-Fußschalters ca. eine Sekunde gedrückt gehalten werden.

## 14. Audio Relax-Kopfstütze (optionale Ausstattung)

---

- ❖ Diese Option unterstützt die optimale Entspannung Ihrer Kunden und bringt einen individuellen Touch in Ihre Massagen. Zwei seitlich in das Kopfteil eingebaute Lautsprecher unterstützen die Massage durch eine einzigartige Klangerfahrung für Ihre Kunden. Die Lautstärke ist **nicht** dazu bestimmt, Räume zu beschallen.

## 15. Reset und Initialisierung (3- und 5-motorige Modellversion)

---

- ❖ Sollten Sie bemerken, dass beim Abrufen der von Ihnen gespeicherten **Memory-Positionen** diese Liegenpositionen nicht mehr erreicht werden, so muss die Software der Lina Select Podo 3 oder 5 neu initialisiert werden. Um die von Ihnen gespeicherten Liegenpositionen wieder korrekt abrufen zu können, müssen folgende Schritte ausgeführt werden:


**GEHEN SIE BITTE WIE FOLGT VOR:**

### Reset:

Drücken Sie die unteren beiden Tasten des Handschalters (Tasten T 10 + T 11 bei der SPL Podo 3, Tasten T11 + T12 bei der SPL Podo 5, s. Abb. unten)

**gleichzeitig und halten Sie diese für ca. 10 Sekunden gedrückt** bis der Signalton endet.


Fahren Sie nun die Hubsäule und die Motoren wie unten beschrieben (Initialisierung).

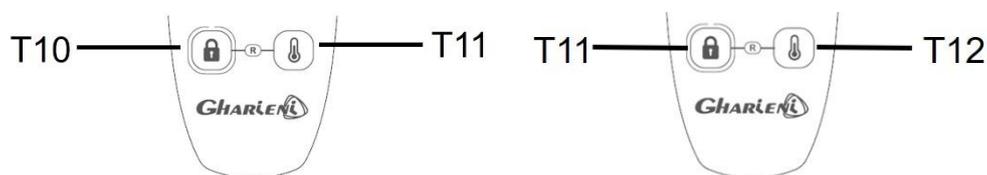

### Initialisierung:

1. Der **Motor zur Einstellung der Rückenlehne** muss einmal **komplett ein- und ausgefahren** werden; verwenden Sie dazu die **Tasten T 3 und T 4** des Handschalters der SPL Podo 5 **in Kombination** bzw. die **Taste T 3** des Handschalters der SPL Podo 3/ s. Abb. unten.

2. Alle **anderen Antriebe** müssen ebenfalls einmal komplett **ein- und ausgefahren** werden, das bedeutet
- Die Hubsäule zur Einstellung der **ARBEITSHÖHE** muss in die unterste Position gebracht werden und anschließend vollständig ausgefahren werden; verwenden Sie dazu die **Taste T 1** des Handschalters / s. Abb. unten.
  - Der **NEIGUNGSMOTOR** (Sitzbereich) muss komplett eingefahren und anschließend komplett ausgefahren werden, d.h. der Sitzbereich muss waagrecht eingestellt werden.  
**ACHTUNG!** Bitte hierbei die **Taste T 2** des Handschalters der SPL Podo 5 bzw. **Taste T3** des Handschalters der SPL Podo 3 so lange gedrückt halten, **bis der Motor sich abschaltet!**
  - Die Motoren der **BEINTEILE** müssen ebenfalls eingefahren (senkrecht gestellt) und anschließend komplett ausgefahren werden; d.h. Sie müssen die **Tasten T 3** und **T 4** des Handschalters der SPL Podo 5 so lange gedrückt halten, bis sich auch hier **der Motor hörbar abschaltet!**

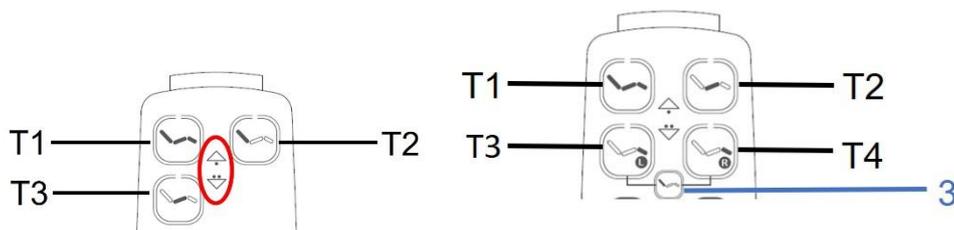

- ❖ Die Initialisierung ist beim Erreichen der beschriebenen Positionen abgeschlossen.
- ❗ Dieser Abgleich (Initialisierung) erfolgt manuell, das heißt: Jeder Antrieb muss von Ihnen **einzel**n in die Endstellung gefahren werden.



**Bitte beachten Sie, dass Sie die Drucktasten nach dem Erreichen der Endstellung 2 - 3 Sekunden länger gedrückt halten.**

**⚠ WARNUNG!** Dieser Abgleich (Initialisierung) **muss** manuell erfolgen, d.h. jeder Antrieb **muss einzeln** bewegt werden. **Benutzen Sie für diesen Schritt keine der Memory Tasten!**

## 16. Reinigung und Pflege

---

**⚠️ WARNUNG!** Trennen Sie die Lina Select Podo vor allen Pflege- und Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen) **STROMSCHLAGGEFAHR! BRANDGEFAHR!**

**⚠️ WARNUNG!** Entfernen Sie **regelmäßig** eventuelle Staubanhaftungen am Netzanschlussstecker, an der Sicherheitssteckdose und an allen elektrischen Steckverbindungen, zum Beispiel mit einem handelsüblichen Staubsauger. **BRANDGEFAHR!**

**⚠️ WARNUNG!** Achten Sie darauf, dass niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse und die Armaturen der Lina Select Podo oder in den Handschalter / Fußschalter<sup>13</sup> eindringen. **STROMSCHLAGGEFAHR! BRANDGEFAHR!**

- ❖ Bevor Sie Pflege- oder Reinigungsarbeiten an der Lina Select Podo durchführen möchten, legen Sie bitte jeglichen Hand- und Armschmuck (Ringe, Armbänder etc.) ab. Sie könnten sonst unabsichtlich das Polster und / oder das Material der Basis / Stützkonstruktion zerkratzen und / oder beschädigen.
- ❖ Verwenden Sie **ausschließlich** Wasser oder ein für das Material geeignetes mildes Reinigungsmittel.
- ❖ Verwenden Sie **kein** extrem heißes Wasser zur Reinigung der Lina Select Podo.
- ❖ Verwenden Sie **niemals** Schwämme, Topfreiniger oder Scheuertücher.
- ❖ Verwenden Sie **niemals** aggressive Reinigungsmittel, wie z. B. Scheuerpulver, Bodenreiniger, etc.
- ❖ Verwenden Sie **niemals** Geschirrspülmittel.
- ❖ Verwenden Sie **niemals** Lösungs- oder Bleichmittel.
- ❖ Verwenden Sie zur Reinigung **niemals** ätherische Öle.

**HINWEIS!** Schäden an der Liege, am Polster und / oder am Material der Basis / Stützkonstruktion, die durch Verwendung von nicht geeigneten Desinfektions- / Reinigungsmitteln entstehen, **unterliegen weder der Garantie noch der Gewährleistung!**

---

<sup>13</sup> Ausstattung abhängig vom Modell

## 16.1 Reinigung und Pflege des Außenmaterials der Polsterung

- ❖ Die Polsterung der Lina Select Podo ist entweder mit einem Außenmaterial aus **KUNSTLEDER** (Standardpolsterung) oder **POLYURETHAN (PU)** (Soft- / Super-Soft-Polsterung) ausgestattet.

### 16.1.1 Reinigung und Pflege des Kunstleders

- i** Reinigen und pflegen Sie das KUNSTLEDER **ausschließlich** mit einem speziellen Reinigungs- und Pflegemittel für Kunstleder (auch optional bei Gharieni erhältlich: s. Kapitel 19. POLSTERPFLEGE UND -REINIGUNGSMITTEL).

**HINWEIS!** Die Standard-Polsterung besteht aus Kunstleder, welches mit etwas Reinigungsmittel, **welches für Kunstleder geeignet sein muss**, auf einem Tuch gereinigt werden kann.

### 16.1.2 Reinigung und Pflege des Polyurethan - Materials (PU)

- i** Reinigen Sie das POLYURETHAN - Material **ausschließlich** mit einem weichen Tuch, das mit einer kleinen Menge eines für dieses Material geeigneten Reinigungsmittels versehen ist (auch optional bei Gharieni erhältlich: s. Kapitel 19. POLSTERPFLEGE UND -REINIGUNGSMITTEL).

**HINWEIS!** Die Soft-Polsterung und die Super-Soft-Polsterung bestehen aus Polyurethan (PU), welches kann mit etwas Reinigungsmittel, **welches für Polyurethan geeignet sein muss**, auf einem Tuch gereinigt werden kann.

## 16.2 Reinigung des Gehäuses und der Armaturen

- i** Reinigen Sie das Gehäuse und die Armaturen nur mit einem feuchten weichen Tuch oder einem weichen Schwamm und etwas Seife.

**⚠️ WARNUNG!** Achten Sie **immer** darauf, dass niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse, in die Armaturen oder in den Handschalter / Fußschalter<sup>14</sup> der Lina Select Podo eindringen.  
**STROMSCHLAGGEFAHR! BRANDGEFAHR!**

---

<sup>14</sup> Ausstattung abhängig vom Modell

## 17. Betriebsstörungen (Ursachen und Fehlerbehebung)

<b>STÖRUNG</b>	
<b>MÖGLICHE URSACHE(N)</b>	<b>FEHLERBEHEBUNG</b>
<b>ALLE MOTOREN ARBEITEN NICHT.</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kein Netzanschluss.</li> <li>2. Netzanschlusskabel defekt.</li> <li>3. Handschalter / Motorstecker nicht ordnungsgemäß eingesteckt.</li> <li>4. Handschalter defekt.</li> <li>5. Control-Box Totalausfall.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anschlussstatus überprüfen.</li> <li>2. Netzanschlusskabel muss ersetzt werden (bitte kontaktieren Sie den Kundendienst).</li> <li>3. Anschlussstatus überprüfen.</li> <li>4. Handschalter muss ersetzt werden (bitte kontaktieren Sie den Kundendienst).</li> <li>5. Control-Box muss ersetzt werden (bitte kontaktieren Sie den Kundendienst).</li> </ol>
<b>EINZELNER MOTOR ARBEITET NICHT.</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motorstecker nicht ordnungsgemäß eingesteckt.</li> <li>2. Handschalter defekt.</li> <li>3. Control-Box defekt.</li> <li>4. Motorkabel / Stecker defekt.</li> <li>5. Motor defekt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anschlussstatus überprüfen.</li> <li>2. Handschalter muss ersetzt werden (bitte kontaktieren Sie den Kundendienst).</li> <li>3. Control-Box muss ersetzt werden (bitte kontaktieren Sie den Kundendienst).</li> <li>4. Kabel / Stecker muss / müssen ersetzt werden (bitte kontaktieren Sie den Kundendienst).</li> <li>5. Motor muss ersetzt werden (bitte kontaktieren Sie den Kundendienst).</li> </ol>

**i** Sollte die Liege Störungen abweichend von den oben beschriebenen aufweisen, oder falls Sie alle Punkte der Liste überprüft haben, das Problem aber nicht behoben werden konnte, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst (siehe auch Kapitel 17.1 REPARATUR).

## 17.1 Reparatur

### SIE ERREICHEN DEN GHARIENI KUNDENDIENST UNTER DEN FOLGENDEN KONTAKTDATEN:

KUNDENSERVICE-HOTLINE:	+49 (0)2841/88300-40
E-MAIL:	service@gharieni.com

1. Geben Sie immer die **Seriennummer** an, wenn Sie den Gharieni-Kundendienst kontaktieren.
2. Wir betrachten uns für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Lina Select Podo nur dann als verantwortlich, wenn Reparaturen und Änderungen durch uns oder einer von uns ermächtigten Person durchgeführt werden. Ferner muss die elektrische Installation des Raumes den Bestimmungen entsprechen und die Lina Select Podo in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung verwendet werden.
3. Bei unsachgemäßen Veränderungen oder Manipulationen an der Lina Select Podo ist **jegliche** Gewährleistung der Gharieni Group GmbH ausgeschlossen.
4. Die Liege kann an das Stromnetz angeschlossen bleiben und muss bei täglicher Anwendung nicht vom Stromnetz getrennt werden.
5. Überprüfen Sie das Netzanschlusskabel regelmäßig auf Schäden.
6. Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, darf es ausschließlich von der Gharieni Group GmbH oder einem von der Gharieni Group GmbH autorisierten Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ausgetauscht werden.

**⚠ GEFAHR!** Bei auftretenden Defekten oder Fehlfunktionen der Behandlungsliege muss **umgehend** Kontakt zum Kundenservice aufgenommen werden. Die Nutzung der Behandlungsliege **muss** eingestellt werden bis das Problem geklärt ist, um weitere Sach- und Personenschäden zu vermeiden.



Falls Sie bezüglich Ihrer Behandlungsliege Kontakt mit dem Gharieni Kundendienst aufnehmen möchten, empfehlen wir Ihnen, das Typenschild vorher zu fotografieren (z.B. mit einem Mobiltelefon oder einer Digitalkamera). So können Sie die Angaben auf dem Typenschild (z.B. die Seriennummer der Behandlungsliege) leichter erkennen und dem Kundendienst die benötigten Informationen mitteilen. Auf dem Deckblatt dieser Bedienungsanleitung befindet sich ein freies Feld, in dem Sie die Seriennummer Ihrer Behandlungsliege eintragen können. So haben Sie die Seriennummer stets griffbereit.

## 18. Optional bestellbares Zubehör

---

- ★ Für Detailinformationen bezüglich des optional bestellbaren Zubehörs (s. unten) setzen Sie sich bitte mit unseren Mitarbeitern des Vertriebs in Verbindung. Unser Team berät Sie gerne!

### 18.1 Rollensatz

- ❖ Für die Gharieni Behandlungsliege Lina Select Podo ist ein ROLLENSATZ als optionales Zubehör gegen Aufpreis erhältlich.
- ❖ Der Satz besteht aus vier bremsbaren Rollen mit weicher Lauffläche, die für harte und weiche Böden geeignet sind.

ROLLENSATZ / BREMSBAR

Artikelnummer: 73006

### 18.2 XL-Verbreiterung

- ❖ Für die Lina Select Podo ist bei Gharieni eine XL-VERBREITERUNG optional gegen Aufpreis erhältlich.
- ❖ Der Aufsatz dient zur Verbreiterung der Liege im oberen Rückenbereich und erhöht so zusätzlich den Liegekomfort.

#### COLOR-XL-VERBREITERUNG AUS KUNSTLEDER

- ❖ Die XL-VERBREITERUNG für die Lina Select Podo ist optional ebenfalls als Color Polster aus **Kunstleder** erhältlich
- ❖ Sie haben ebenfalls die Möglichkeit verschiedene Farben miteinander zu kombinieren (maximal **zwei**).

- ★ Die Farben können dabei jeweils aus zwei verschiedenen Farbkollektionen gewählt werden:

- Farbkollektion für das Standard-Kunstleder
- Farbkollektion für das Ferrari Stamskin® Top Kunstleder (optionaler Kunstlederbezug)

- ★ Für Detailinformationen bezüglich der XL-VERBREITERUNG setzen Sie sich bitte mit unseren Mitarbeitern des Vertriebs in Verbindung. Unser Team berät Sie gerne!

### 18.3 Fußrollen

- ❖ Als Alternative zu den Standardfußstützen sind für die Lina Select Podo FUBROLLEN (s. Abb. unten) optional gegen Aufpreis erhältlich.
- ❖ Die FUBROLLEN sind zylindrisch geformt und bieten für die Fußauflage bzw. Fußablage eine Vielzahl von Möglichkeiten.



- ★ Bezüglich der passenden Ausführung für Ihre Liege setzen Sie sich bitte mit unseren Mitarbeitern des Vertriebs in Verbindung. Unser Team berät Sie gerne!

### 18.4 Nackenstütze "Dentalax"

- ❖ Optional gegen Aufpreis ist auch unsere beliebte NACKENSTÜTZE „DENTALAX“ (s. Abb. unten) erhältlich.
- ❖ Die NACKENSTÜTZE „DENTALAX“ dient zur anatomischen Stützung der Halswirbel.
- ❖ Die NACKENSTÜTZE „DENTALAX“ ist in weiß oder farbig erhältlich.
- ❖ Das Liegeempfinden wird durch die NACKENSTÜTZE "DENTALAX" nochmals erheblich erhöht: "KLEINES TEIL, GROBE WIRKUNG!"



*Abbildung ähnlich: Farbe und Ausführung können je nach gewähltem Modell variieren*

- ★ Bezüglich der passenden Ausführung für Ihre Liege setzen Sie sich bitte mit unseren Mitarbeitern des Vertriebs in Verbindung. Unser Team berät Sie gerne!

## 18.5 Schonbezüge für Behandlungsliegen

- ❖ Für unsere Behandlungsliegen sind BEZÜGE AUS FROTTEE optional gegen Aufpreis erhältlich.
- ❖ Mit den speziell für unsere Liegen gefertigten Bezügen sind Ihre Arbeitsgeräte perfekt vor Verschmutzung und Beanspruchung geschützt.
- ❖ Durch das hochwertige Frottee-Material, ist eine Maschinenwäsche bis 60 °C und somit eine hygienische Reinigung möglich.
- ❖ Mit ihren eingearbeiteten Gummizügen, bleiben die einzelnen Segmente genau da, wo Sie hingehören und die Funktion der Liegen bleibt vollständig erhalten.
- ❖ Unsere Bezüge sind erhältlich in drei verschiedenen Farben: Weiß, Choco und Creme.
- ❖ Bestellen Sie den passenden Bezug am besten direkt beim Kauf Ihrer Liege dazu.



VERSION "KOSMETIK"



VERSION "PODO"

*Abb. ähnlich: Abb. dient **ausschließlich** als Beispiel.*

- ★ Bezüglich der richtigen Größe und der passenden Ausführung der Bezüge sowie der Kompatibilität mit Ihrer Liege, setzen Sie sich bitte unseren Mitarbeitern des Vertriebs in Verbindung. Unser Team berät Sie gerne!

## 19. Polsterpflege und -reinigungsmittel

---

### 19.1 Mikrozyd® Sensitive (alkoholfrei)

- ❖ Für die sanfte und gründliche Pflege und Reinigung der Polsterungen empfehlen wir Mikrozyd® Sensitive.
- ❖ Mikrozyd® Sensitive beseitigt Bakterien, Pilze und Viren (z. B. HBV, Rota, Vaccinia etc.).
- ❖ Mikrozyd® Sensitive ist als Liquid erhältlich.
- ❖ **Geeignet zur Reinigung von PU- und Kunstleder-Polstern.**
- ❖ **Ohne Alkohol!**



MIKROZID® SENSITIVE LIQUID

ARTIKELNUMMER: 79417

## Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
<b>bakterizid</b> <i>gemäß VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten</i>	gebrauchsfertig	1 Min.

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
<b>bakterizid</b> <i>EN16615 - hohe Belastung</i>	gebrauchsfertig	1 Min.
<b>bakterizid</b> <i>EN13727 - hohe Belastung</i>	gebrauchsfertig	1 Min.
<b>levurozid</b> <i>EN13624 - hohe Belastung</i>	gebrauchsfertig	1 Min.
<b>levurozid</b> <i>EN16615 - geringe Belastung</i>	gebrauchsfertig	1 Min.
<b>begrenzt viruzid</b> <i>gemäß DVV-/RKI-Leitlinie</i>	gebrauchsfertig	1 Min.
<b>Norovirus</b> <i>EN14476</i>	gebrauchsfertig	15 Min.
<b>Polyoma SV40</b> <i>gemäß DVV-/RKI-Leitlinie</i>	gebrauchsfertig	1 Min.
<b>Rotavirus</b>	gebrauchsfertig	1 Min.

### Listungen

- VAH-Zertifikat
- IHO-Liste



Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Herstellers unter folgendem Link:

<https://www.schuelke.com/de-de/produkte/mikrozid-sensitive-liquid.php>

## 19.2 Skai Reiniger

- ❖ Für die sanfte und gründliche Pflege und Reinigung der **Kunstleder**polsterungen empfehlen wir zusätzlich den Skai Reiniger.
- ❖ Der Skai Reiniger ist in der 200 ml-Sprühflasche erhältlich.
- ❖ **Speziell geeignet zur Reinigung von Kunstleder.**



SKAI REINIGER

ARTIKELNUMMER: 79427

## 20. Bedingungen für Transport, Lagerung und Betrieb

---

### 20.1 Transport

- ❖ Heben Sie die Lina Select Podo bei einem Transport **ausschließlich** an der Basis (Stützkonstruktion) an.
- ❖ Heben Sie die Lina Select Podo bei einem Transport **niemals** an der Sitzfläche / Liegefläche oder den Armlehnen an; ansonsten können Sie die Lina Select Podo ernsthaft beschädigen.
- ❖ Auf **ebener Fläche** kann die Lina Select Podo mit Hilfe der optionalen Rollen (optionales Zubehör) **vorsichtig** bewegt bzw. transportiert werden. Auf unebener Fläche dürfen Sie die Rollen (optionales Zubehör) **nicht** benutzen.
- ❖ Bedenken Sie bei einem Transport das Gesamtgewicht der Lina Select Podo, es können für den Transport mehrere Personen nötig sein.
- ❖ Bedenken Sie bei einem Transport **immer** die Abmessungen der Lina Select Podo. Enge Flure, Türen oder Treppen usw. können den Transport erschweren oder unmöglich machen.

### 20.2 Umgebungsbedingungen für Lagerung und Transport

TEMPERATUR	- 10 °C bis + 50 °C Umgebungstemperatur
ATMOSPHERISCHER DRUCK	700 bis 1060 hPa
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	20 % bis 90 % bei +30 °C nicht-kondensierend

### 20.3 Umgebungsbedingungen für den Betrieb

TEMPERATUR	+ 5 °C bis + 40 °C Umgebungstemperatur
ATMOSPHERISCHER DRUCK	700 bis 1060 hPa
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	35 % bis 65 % bei 30 °C nicht-kondensierend

## 21. Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtlänge	ca. 202 cm
maximale Breite	ca. 80 cm
Höhenverstellbereich mit Verstellfüßen	ca. 54 - 96 cm
Höhenverstellbereich mit Verstellfüßen (Soft-Polsterung / Super-Soft-Polsterung)	mind. ca. 59 - 101 cm
Höhenverstellbereich mit Rollen (ca. + 8 cm / optionales Zubehör)	ca. 62 - 104 cm
Höhenverstellbereich mit Rollen (Soft-Polsterung / Super-Soft-Polsterung / ca. + 8 cm / optionales Zubehör)	mind. ca. 67 - 109 cm
maximale Höhe: Fersenpolster	134 cm
Neigung der Rückenlehne	0° bis 70°
Neigung der Beinteile	0° / -90°
max. Belastbarkeit der Sitzfläche / Liegefläche	ca. 250 kg
maximale Hebekraft	ca. 200 kg
maximale Belastbarkeit der Armlehnen	25 kg
Gesamtgewicht (ohne Optionen)	mind. ca. 80 kg

❖ Technische Änderungen vorbehalten.

### VERSTELLANTRIEBE MIT STEUERUNG

Spannungsversorgung	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	Ausgang: 350 W
Einschaltdauer (Antrieb)	10 % / max. 2 Min. Dauerbetrieb / 18 min. Pause
A-Schalldruckpegel $L_{PA}$	≤ 35 dB (A)
Geräteschutzklasse	I mit Smart Thermo 3 und / oder 10er Vibro Wellness; ansonsten II
Schutzklasse gegen Eindringen von Stoffen	IP X6

❖ Technische Änderungen vorbehalten.

**SMART THERMO 3 HEIZSYSTEM 2-MOTORIGE MODELLVARIANTE  
(OPTIONALE AUSSTATTUNG)**

Spannungsversorgung	230 V AC / 48 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 120 W (VA) max.
Sicherung	630 mA-T
Trafo-Ausgangsspannung	12 V AC / ca. 9A max.

❖ Technische Änderungen vorbehalten.

**HEIZSYSTEM 3- UND 5-MOTORIGE MODELLVARIANTE  
(OPTIONALE AUSSTATTUNG)**

Spannungsversorgung	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	Ausgang: ca. 120 W

❖ Technische Änderungen vorbehalten.

## 22. Entsorgung

---

1. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung nicht in die Reichweite von Kindern, Tieren oder Menschen mit verringerten mentalen Fähigkeiten gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**  
**VERLETZUNGSGEFAHR!**
2. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektronischen und elektrischen Geräten abgegeben werden. Das entsprechende Symbol auf dem Produkt darf nicht entfernt werden.
3. **Keinesfalls** offenen Flammen aussetzen.
4. Vor der Entsorgung sollte die Behandlungsliege zum Schutz von Personen, Umwelt und Material gründlich gereinigt werden
5. Bevor Sie eine Behandlungsliege entsorgen, **machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig!** Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Stromanschlusskabel an der Behandlungsliege abschneiden und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen!
6. Die Lina Select Podo besteht unter anderem aus Metall- und Kunststoffbauteilen, Elektronikkomponenten und Elektrokabel. Die Entsorgung der einzelnen Materialien ist entsprechend den Umwelt- und Entsorgungsbestimmungen der jeweiligen Länder vorzunehmen.
7. Entsorgen Sie Papier und Kartonagen in den dafür vorgesehenen Behältern.
8. Entsorgen Sie Kunststoffe in den dafür vorgesehenen Behältern.
9. Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.
10. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler, bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen oder bei:

### Gharieni Group GmbH

➤ Telefon:	+49 (0)2841/88300-0
➤ Fax:	+49 (0)2841/88300-999
➤ Kundenservice-Hotline:	+49 (0)2841/88300-40
➤ E-Mail:	service@gharieni.com



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Materialien sind wiederverwertbar.



Alle verfügbaren Informationen zur Mülltrennung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.

## 23. Garantie

---

### 23.1 Garantiedauer

**Die folgenden Garantiebestimmungen gelten bei Neuware weltweit:**

Die Gharieni Group GmbH gibt auf alle Behandlungsliegen der Lina Select Podo Baureihe

- 10 Jahre Garantie auf deren Metallgestelle
- 5 Jahre Garantie auf deren Motoren sowie
- 3 Jahre Garantie auf deren übrige Bauteile.

### 23.2 Garantiausschlüsse

Bei Lieferung muss überprüft werden, ob keine Transportschäden vorliegen und ob das Zubehör komplett ist und sich im ordnungsgemäßen Zustand befindet. Daraus resultierende Garantieansprüche müssen innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung des Gharieni-Produkts angemeldet werden.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile (wie z.B. alle Arten von Lampen sowie Glasscheiben, Verbrauchsartikel wie Frottierwaren etc.).

**Weiterhin werden keine Garantieansprüche gewährt, wenn:**

- an der Behandlungsliege und ihren zugehörigen Komponenten Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.
- an der Behandlungsliege und ihren zugehörigen Komponenten Schäden durch grobe Fahrlässigkeit entstanden sind.
- die Fehlfunktion durch Verschulden des Betreibers auftritt.
- Aufkleber (wie z.B. Typenschild, Warnhinweise etc.) entfernt wurden.
- zugehörige Geräte oder Teile der Behandlungsliege bzw. der zugehörigen Geräte geöffnet werden, ohne dass dieses in der Bedienungsanleitung (z.B. zu Reinigungszwecken) ausdrücklich gestattet wird.
- den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung nicht Folge geleistet wurde.
- die Behandlungsliege Veränderungen durch Reparaturarbeiten von nicht von der Gharieni Group GmbH autorisiertem Personal aufweist.

## 24. EG-Konformitätserklärung

<b>CE-Konformitätserklärung</b> Hiermit erklären wir, die <b>Gharieni Group GmbH</b> <b>Gutenbergstr. 40</b> <b>D-47443 Moers</b>		
in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Gerät aufgrund seiner Konstruktion und Bauart den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.		
(Typ oder Modell, Bezeichnung)		
	<b>Hubsäulenliegen</b>  Lina Select; MLX Quarz; MLX Limber; PediSpa-Serie; MLR Wet; MLW Space MLX iDome (MLX i <sup>3</sup> (Cube) Dome; MLR; MLX;RLL-Serie; Ellipse; Liege 601, E-Line, 601 Podo	<b>2022</b>
<b>Einschlägige EU-Richtlinien und verwendete harmonisierte Normen:</b>  2006 / 42 / EU Maschinenrichtlinie  2014 / 35 / EU Niederspannungsrichtlinie  2014 / 30 / EU EMV-Richtlinie  2011 / 65 / EU RoHS-Richtlinie  <b>DIN EN ISO 12100 (2011)</b> Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze Risikobeurteilung und Risikominderung		
Dokumentenverantwortlicher:  Mohammad Abbassi Gutenbergstr. 40 D-47443 Moers	Herstellerunterschrift:  Sammy Gharieni, Geschäftsführer  	Ort und Datum:  Moers, 01.02.2022

## 25. Ausgabestatus

AUSGABE	ÄNDERUNGEN (SEITEN)	DATUM
1. Ausgabe	-	02.09.2019
2. Ausgabe	vollständige Überarbeitung	17.05.2021
3. Ausgabe	52	19.05.2021
4. Ausgabe	68	20.05.2021
5. Ausgabe	10, 12, 25, 26, 28-31, 38, 41-56, 67, 75, 76	18.08.2021
6. Ausgabe	vollständige Überarbeitung	10.12.2021
7. Ausgabe	9, 69, 76, 93, 94	10.05.2022



### NOTIZEN

DIE EIGENTUMSRECHTE AN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG SIND VORBEHALTEN. DIE REPRODUKTION ODER WEITERGABE AN DRITTE SIND OHNE ZUSTIMMUNG DER GHARIENI GROUP GMBH UNTERSAGT. DIE GHARIENI GROUP GMBH BEHÄLT SICH DEN SCHUTZ IHRER EIGENTUMSRECHTE SOWIE DIE STRAFRECHTLICHE VERFOLGUNG BEI DEREN MISSBRAUCH VOR.

VERTRIEB UND AUSSTELLUNG	PRODUKTION / ABHOLUNG REPARATUR
Gharieni Group GmbH Gutenbergstraße 40 D - 47443 Moers	Gharieni Group GmbH Am Schürmannshütt 24 D - 47441 Moers