

Produktdatenblatt AquaHy Konzentrat

Anwendungsbereich

Stabilisierungsmittel zur Verwendung in Nasstechnikgeräten in der medizinischen Fußpflegepraxis.

Anwendung

Nach dem Mischen ist die Sprayflüssigkeit mindestens 3 Monate haltbar. Bei erhöhter Licht und Temperaturbelastung der Sprayflüssigkeit kann es in seltenen Einzelfällen zur Bildung eines Biofilms kommen (glitschiger Film im Tank). In diesem Fall darf die Flüssigkeit nicht weiter verwendet werden und muss nach gründlicher Reinigung des Tanks und Spraysystems durch neue Flüssigkeit ersetzt werden. Gerät nach Benutzung mit destilliertem Wasser durchspülen.

Anwendungskonzentration

1:50

Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- Keimreduktion innerhalb weniger Minuten
- geruchsneutral
- einfache Anwendung
- wirtschaftlich
(Anwendungskonzentration 1:50)

Zusammensetzung

100 g AquaHy enthalten:
0,5 g Polymer Hydrochlorid

Haltbarkeit

5 Jahre



Lieferform

Art. Nr. 560 Flasche mit 100 ml Konzentrat

Gutachten

Gutachten gemäß DIN EN 1040:1997:

- Dr. Andrea Dreusch / MicroMol / Karlsruhe / 2004

Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse I, RL 93/42/EWG, Anhang IX, Abs. 1.1, Regel 1

Hersteller

Alfred Becht GmbH, Postfach 1145,
D-77601 Offenburg, Tel.: +49 781 605860,
Fax.: +49 781 6058640,
www.becht-online.de