



Steam Sensor 5

**Chemischer Indikator zur Überwachung der Dampfsterilisation
bei 121 °C bzw. 134 °C bis einschließlich Kritisch A Instrumente**

Gemäß
RKJ/KRINKO 2012
Anlage 4

Unsere Empfehlung: Den Test zur Überwachung
jeder Sterilisationscharge mit in die Kammer legen.

Entspricht
**DIN EN ISO
11140-1 Typ 5**

Produktdetails

Mit dem Steam Sensor 5 bieten wir Ihnen einen geeigneten Indikator des Typ 5 zur vorgeschriebenen Routineprüfung Ihres Sterilisators. Er ist ideal geeignet für Arzt- und Zahnarztpraxen, ambulante OP-Zentren sowie Krankenhäuser.

Anwendung

1. Den Steam Sensor 5 zur Beladung in die Sterilisationskammer legen und den entsprechenden Sterilisationszyklus starten.
2. Nach Beendigung des Sterilisationszyklus den Steam Sensor herausnehmen und visuell auswerten.



Auswertung

Prüfen Sie den Farbumschlag des Indikators anhand der Farbkarte auf der Innenseite der Verpackung. Der Steam Sensor 5 wechselt seine Farbe abgestuft von hellblau über violett nach pink. Das Ergebnis zur Dokumentation in das Sterilisationstagebuch (Best.-Nr. 810001) eintragen.



stericop
HEBENDISCHE
KONTROLLSYSTEME

Stericop GmbH & Co. KG
Biedrichstraße 10
61200 Wölfersheim

T +49 (0) 6036 984 33 0
F +49 (0) 6036 984 33 21
info@stericop.de
www.stericop.de

Produkt	Bestellnummer	Packungsgröße	Lagerung	Haltbarkeit
Steam Sensor 5	212001	200 Stück	dunkel & trocken bei Raumtemperatur	3 Jahre ab Herstellungsdatum