



FIRST BLADES



Klinge N°1

- Sorgfältige Reinigung des Nagelfalzes.
- Schnitt in den eingewachsenen Nagelsporn.
- Anbringung von Tamponaden zwischen Nagel und Nagelfalz.
- Entfernung oder Ablation von Hornschwielen. Insbesondere Behandlung und Elimination des Sporns.
- Reinigung des erweiterten Nagelfalzes mit Hilfe der schneidenden Klinge, einschließlich des seitlichen Teils, wie mit einem Skalpell.
- Einkerbung des Nagels zur Anbringung von polymerisierbaren Nagelspannen zur Nagelkorrektur (Orthonyxie) und Nagelplastik (Onychoplastik).
- Tamponieren des Nagelfalzes.



Klinge N°2

- Reinigung breiterer Nagelfalze.
- Tiefere Aushöhlung, wenn eine Hornschwiele kleiner wird.



Klinge N°3

- Tiefere Aushöhlung mit einer Klinge Nr. 4, wenn eine Hornschwiele schwer zugänglich ist (Hornschwiele mit Hyperkeratose).
- Ermöglichung der Entfernung von mittelgroßen bis kleinen Warzen nach Anwendung eines Warzenmittels, auch mit Hilfe der Klingenseite.
- Öffnung von Fersenrissen.



Klinge N°4

- Aushöhlung / Weitung von Hornschwielen mit Hyperkeratose.
- Entfernung von Warzen nach Anwendung eines Warzenmittels.



Klinge N°5

- Aushöhlung / Weitung von Hornschwielen mit Hyperkeratose.
- Entfernung von Warzen nach Anwendung eines Warzenmittels.
- Entfernung von Hornschwielen zwischen den Zehen (interdigitalen Hühneraugen).
- Entfernung von kleinen dorsalen Hornschwielen an den Zehengelenken.
- Öffnung von Fersenrissen.



BEI IHREM HÄNDLER ERHÄLTlich

PRÄSENTATION

Am 29. Oktober 1981 meldete Bernard Plançon einen Hohlmeißel mit herausnehmbarer Klinge als neues Instrument für die Podologie zum Patent an. 1997 stellte sein Sohn uns sein Know-how zur Verfügung. Seit diesem Tag produzieren wir Hohlmeißelklingen aus bestem Edelstahl.

Unsere Schneideinstrumente und unsere Diamantschleifgeräte ermöglichen uns die Produktion perfekter Hohlmeißel, die zur natürlichen Verlängerung Ihrer Hand werden und hochpräzises podologisches Arbeiten möglich machen. Die besondere, sehr feine Form unserer Hohlmeißel und ihres Ansatzes, bieten bisher nie dagewesene Präzision und eine unvergleichliche Wirkung all Ihrer Handgriffe.

Die Qualität des Schliffs macht die Klinge zu einer der schärfsten aller Zeiten. Der Komfort für den Patienten und den Podologen macht die Klingen der Hohlmeißel von First Blade zum unerlässlichen podologischen Instrument.

Klinge N°6

- Aushöhlung / Weitung von Hornschwielen mit Hyperkeratose.
- Entfernung von Warzen nach Anwendung eines Warzenmittels.
- Entfernung von Hornschwielen zwischen den Zehen (interdigitalen Hühneraugen).
- Entfernung von dorsalen Hornschwielen an den Zehengelenken oder an der Zehenspitze mittlerer Größe.



Klinge N°8

- Entfernung plantarer Keratosen geringer Größe.
- Entfernung von großen Hornschwielen zwischen den Zehen (interdigital).
- Entfernung von großen dorsalen Hornschwielen an den Zehengelenken oder an der Zehenspitze.



Klinge N°10

- Entfernung plantarer Keratosen mittlerer Größe.
- Entfernung von großen dorsalen Hornschwielen an den Zehengelenken oder an der Zehenspitze.



Klinge N°12

- Entfernung von großflächiger Hyperkeratose am Metatarsalkopf (Vorderfuß) oder dichter Schichten an der Ferse.



Klinge N°15

- Entfernung von besonders großflächiger Hyperkeratose am Metatarsalkopf (Vorderfuß) oder dichter Schichten an der Ferse.



Klingenhalter



ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

STERILE R

CE
0459

CZ MBI
COBLENTZ MEDICAL BLADES INDUSTRY

CZ-MBI
49650 ALLONNES
FRANKREICH
www.cz-mbi.com
contact@cz-mbi.com